

## novofine® Autocover® 30G

0,3x8 mm

### Introduktion


Læs denne brugervejledning omhyggeligt inden du bruger NovoFine® Autocover®, også selvom du har brugt NovoFine® nåle før.

NovoFine® Autocover® er en steril injektionsnål med en sikkerhedslås, der nedsætter risikoen for utilsigtede nålestik. Sikkerhedslåsen indikerer, at nålen har været brugt.

Nålene er beregnet til ENGANGSBRUG. Plastikskjoldet på NovoFine® Autocover® skjuler nålen, således den ikke kan ses, når den er i brug. NovoFine® Autocover® anbefales ikke til blinde eller svagtsynende uden hjælp fra en person med normalt syn, der er instrueret i at bruge den.

NovoFine® Autocover® kan bruges sammen med: Autopen®, BerliPen®, Bjecta®, ClickStar®, FlexPen®, FlexPro®, FlexTouch®, Humapen®, InnoLet®, KwikPen®, NordiFlex®, NordiPen®, NovoPen®, NovoPen Echo®, Omnican®, SoloStar®, TactiPen®, Victoza®.

Det garanteres, at nålen er steril, hvis papirforseglingen ikke er brudt.

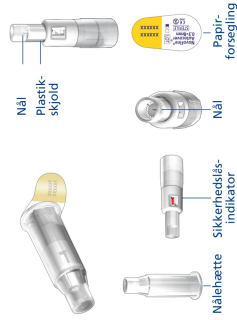


### 1 Montering af NovoFine® Autocover®

- Tag en ny NovoFine® Autocover® nål og riv papirforseglingen af.
- Skub nålen direkte på pennen. Skru indtil den sidder godt fast.




### 2 Tag nålehætten af

- Træk nålehætten af og gennem den.

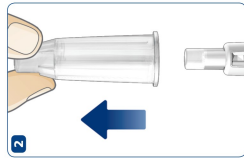

### 3 Kontrol af gennemløb (klargøring)


- Kontroller altid gennemløbet af dispenseringsystemet for hver injektion. Dette hjælper dig med at sikre, at du får hele din dosis. Følg instruktionen beskrevet i brugervejledningen til dispenseringsystemet.

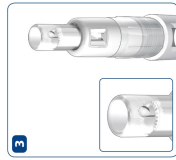

⚠ Sørg for, at nålen ikke er låst inden injektion. Nålen kan ikke bruges, hvis sikkerhedslåsen indikatoren er rød. Fjern nålen og sæt en ny nål på (se trin 5).


### 4 Injektion

- Indstil den dosis du har brug for, som beskrevet i brugervejledningen, der følger med dispenseringsystemet.
- Stik nålen ind i huden. Følg den injektionsteknik, du er blevet instrueret i af sundhedspersonalet. For at sikre en mere fast overflade på injektionsstedet, kan du tage fat i en hudfold.
- Injicér lægemidlet, som beskrevet i brugervejledningen til dispenseringsystemet. Hold NovoFine® Autocover® presset mod huden i mindst 6 sekunder, som vist på billede 4, for at sikre, at nålen forbliver fuldstændig indsat under injektionen.
- Fjern nålen fra huden. Nogle få dråber af lægemidlet kan komme til syne på huden. Dette er noget af lægemidlet, som samler sig i hættens forbindelse med klargøringen. Det har ingen indflydelse på den dosis, der indgives.

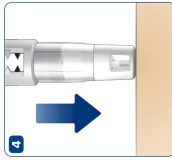

### 5 Sikkerhedslås

- Når nålen fjernes fra huden aktiveres sikkerhedslåsen. Den røde sikkerhedslåseindikator angiver, at nålen er blevet låst.

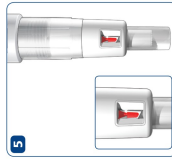

### 6 Afmontering af nålen

- Efter injektionen sættes nålehætten på igen og nålen skrues af.
- Kassér nålen sikkert som instrueret af sundhedspersonalet.



novonordisk.com  
 © 2017  
 Novo Nordisk A/S  
 Novo Allé, 2860 Bagsvaerd, Danmark

