

## Mepilex® Border med Safetac® teknologi

Selvkædbende skumbandage af blød silikone



### Produktbeskrivelse

Mepilex Border består af:

1. et sårkontaktlag af blød silikone (Safetac®) på en polyuretannofil
2. en fleksibel, absorberende pude i tre lag: polyuretanskum, et nonwoven spredningslag af viskose/polyester og et lag med superabsorberende polyakrylatfibre
3. en ydre polyuretannofil, der er åndbar og vandtæt

Safetac er en unik og patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret og den omkringliggende hud.

Mepilex Border er en meget formbar selvkædbende bandage, der absorberer væske, bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø samt minimerer risikoen for maceration.

Da Mepilex Border bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø, som understøtter debridering, kan der forekomme en øget sårstørrelse initialt. Det er normalt og kan forventes.

### Anvendelsesområde

Mepilex Border er udviklet til en bred vifte af væskende sår, såsom tryksår, ben- og fodsår og traumatisk sår, f.eks. rifter og operationssår.

Mepilex Border kan også anvendes på tørre/hekrotiske sår sammen med geler.

Mepilex Border kan bruges som led i en profylaktisk behandling, hvor produktet er med til at forhindre hudskader, f.eks. tryksår, postoperativ blæredannelse.

### Brugsanvisning

1. Rens såret efter normale procedurer.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Fjern beskyttelsespapiret, og applicer bandagen med den klæbende side mod såret. Stræk ikke bandagen.
4. For opnåelse af det bedste resultat skal Mepilex Border overlappes den tørre omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for de mindste størrelser (størrelser op til 12,5 x 12,5 cm) og 5 cm for de største størrelser med det formål at beskytte den omkringliggende hud mod maceration og at fiksere bandagen sikkert.

Mepilex Border kan blive siddende i flere dage afhængigt af sårets og den omkringliggende huds tilstand, efter hvad de kliniske retningslinjer anbefaler.

I begyndelsen kan det være nødvendigt at skifte bandagen hyppigere, fordi en ændring i behandlingen kan resultere i en forøgelse af væske i starten.

Mepilex Border kan anvendes under kompressionsbandager.

Mepilex Border kan anvendes sammen med geler.



### Forholdsregler

Bandagen må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for bandagen eller dens komponenter.

I tilfælde af tegn på klinisk infektion bør du konsultere en læge og få en passende infektionsbehandling.

Anvend ikke Mepilex Border sammen med oxiderende midler som f.eks.

hypochloritopløsninger eller hydrogenperoxid.

Brugen af bandager som led i en profylaktisk behandling udelukker ikke behovet for at forstærke med at udvikle og følge en omfattende forebyggelsesprotokol for tryksår, dvs. støtteoverflader, positionering, ernæring, hydrering, hudpleje og mobilitet.

### Opbevaring og bortskaffelse

Mepilex Border bør opbevares tørt ved temperaturer under 35 °C.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

### Andre oplysninger

Det polyuretanskum, der anvendes i produktet, kan skifte farve til en mere gullig farve, når det udsættes for lys, luft og/eller varme. Farveændringen har ingen indflydelse på produktets egenskaber, når det blot anvendes før udløbsdatoen.

Må ikke genbruges. Hvis produktet genanvendes, kan det begynde at lugere dårligere, og der kan forekomme krydskontamination.

Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage er beskadiget eller har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres.

Hvis produktet anvendes efter udløbsdatoen, kan der ikke garanteres for produktets egenskaber.

Mepilex og Safetac er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB