

Mextra® Superabsorbent



Superabsorberende bandage med væskeafvisende lækagebarriere

Produktbeskrivelse

Mextra Superabsorbent er en superabsorberende bandage med en væskeafvisende nonwoven bagside, en kerne bestående af superabsorberende partikler og et nonwoven sårkontaktlag.

Mextra Superabsorbent absorberer sårvæsken gennem sårkontaktlaget, holder sårvæsken inde i kernen og minimerer risikoen for maceration. Den væskeafvisende nonwoven bagside virker som en barriere og forhindrer sårvæsken i at trænge igennem.

Anvendelsesområde

Mextra Superabsorbent er beregnet til brug på moderat til kraftigt væskende sår.

Brugervejledning

Applicering

1. Rens såret efter normale procedurer.
2. Applicér Mextra Superabsorbent direkte på sårområdet med bandagens hvide side vendende mod såret. Det bedste resultat opnås, når puden overlapper den tørre omkringliggende hud med mindst 2 cm.
3. Fiksér bandagen med eksempelvis en passende bandage eller med tape.

Mextra Superabsorbent kan bruges i forbindelse med kompressionsbehandling af venøse bensår.

Bandageskift



Såret og Mextra Superabsorbent skal kontrolleres regelmæssigt. Bandagen skiftes baseret på sårets tilstand, eller inden bandagen er mættet med sårveske. Mextra Superabsorbent kan sidde på såret i maksimalt syv dage.

Forholdsregler

- Hvis der er tegn på infektion (f.eks. mange smerter, hævelse), bør du konsultere sundhedspersonalet for en passende infektionsbehandling.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage er beskadiget eller har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres.
- Må ikke genbruges. Hvis produktet genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontamination.
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Hvis produktet anvendes efter udløbsdatoen, kan der ikke garanteres for produktets egenskaber.
- Brug ikke Mextra Superabsorbent i sårkaviteter.
- Undgå at klippe i Mextra Superabsorbent-bandagen.

Opbevaring

Mextra Superabsorbent opbevares tørt under 25 °C.