



Hydrofilm roll Applikering


1. Klip Hydrofilm roll i den ønskede længde.

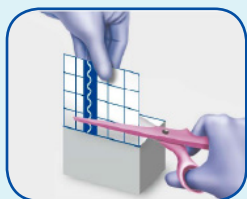


2. Stræk filmen eller fold og gnid den fra hinanden langs den bølgede linje.

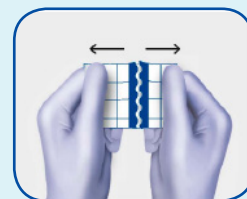


3. Tag fat i kanten på den brede del af beskyttelsespapir 1.

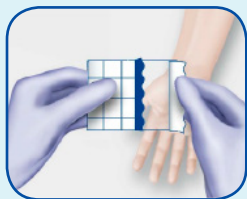


4. Påfør den brede del af filmen på huden ved forsigtigt at holde din hånd over filmen, mens du fjerner den brede del af beskyttelsespapir 1. For at undgå at sidde fast i den bølgede linie under filmen, er det vigtigt at folde den smalle del ordentligt op.

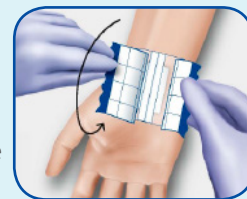

5. Påfør den smalle del af filmen på huden ved forsigtigt at holde hånden over filmen, mens du samtidig fjerner den smalle del af beskyttelsespapir 1.

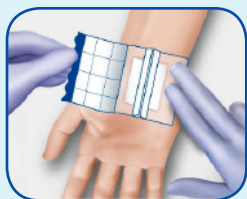

6. Når filmen er applikeret på huden, tager man forsigtigt beskyttelsespapir 2 af.

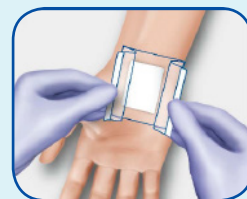

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

(2018-01)



Going further
for health