



ALLEVYN LIFE
Non-Bordered

Kvikguide

www.closetozero.com

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®] LIFE
NON-BORDERED
Foam Dressing



Supporting healthcare professionals

ALLEVYN[®] LIFE Non-Bordered

ALLEVYN LIFE Non-Bordered er en ny multilagsskumbandage, som er specielt udviklet til at opfylde de krav, som stilles til skumbandager uden kant. Kombinationen af et hyperabsorberende indkapslingslag med hydrocellulært skum giver en bandage med høj absorptionsevne og væskeindkapslingsteknologi^{1,2}. Samtidig gør den blide lowtack silikoneklæber bandagen³ enkel at applicere og er skånsom mod huden^{4,5,6}.



Kraftigt absorberende og opretholder absorption under kompression^{1,7}

Absorberer viskøst eksudat⁸

- Kraftigt absorberende og opretholder absorptionsevnen under kompression^{1,7}
- Hyperabsorberende indkapslingslag som bidrager til minimal væskelækage^{1,2}
- Absorberer viskøst eksudat⁸
- Brugervenlig og kan klippes til⁹
- Egnede til brug under kompression^{1,7}
- Blød silikoneklæber minimerer traume for såret og smerte for patienten^{4,5,6}

Indikationer

Sårbehandling af overfladiske, granulerende sår, kroniske og akutte væskende sår, inklusive fuld- og delhudssår:

- Tryksår
- Bensår
- Diabetiske fodsår
- Kirurgiske sår
- Første- og andengrads forbrændinger
- Donorsteder for hudtransplantation
- Rifter/skin tears
- Ulcererende cancersår


Yderligere information

- Kan bruges sammen med INTRASITE[®] Gel til nekrotiske sår eller sår med dødt væv
- Kan klippes til, så den passer vanskelige bandagerbare områder. Brug altid en ren teknik, når der klippes i bandagen.


Forholdsregler

- Må ikke anvendes sammen med oxideringsmidler, som hypokloritløsninger (f.eks. EUSOL) eller hydrogenperoxid, da disse kan reducere bandagens absorptionsevne
 - Hvis der forekommer rødme eller sensibilisering, skal brug af bandagen ophøre.
 - Kun til engangsbrug. Brug på mere end én patient kan føre til krydskontaminering eller infektion
 - Når inderforpakningen er åbnet, må ubrugte bandager ikke beholdes til brug på et senere tidspunkt
-


Applicering

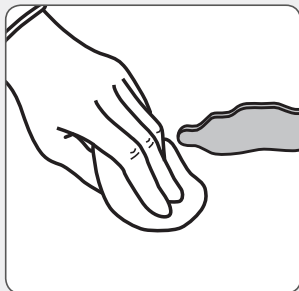


1. Rengør påføingsstedet. Sørg for at den omgivende hud er ren, tør og fri for kraftig hårvækst.

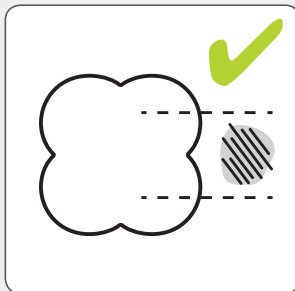


2. Vælg en passende bandagestørrelse. Sørg for at bandagen dækker hele sårområdet, som skal beskyttes.

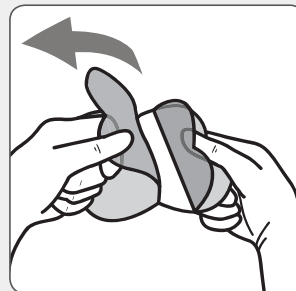


3. Fjern det første stykke beskyttelsespapir og fastgør den klæbende side af bandagen til huden.

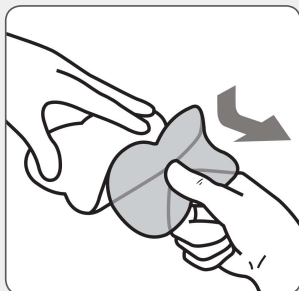

4. Fjern det andet stykke beskyttelsespapir.

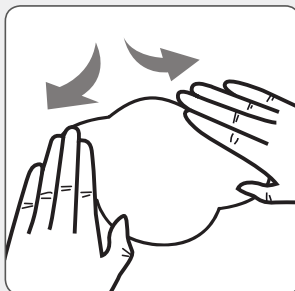


5. Glat bandagen ud. Sørg for at bandagen dækker såret. Stræk ikke bandagen. Bandagen kan omplaceres efter behov.

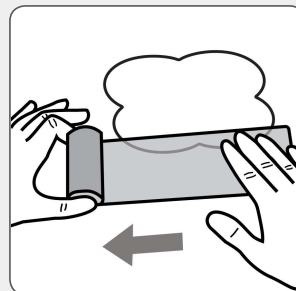


6. Fastgør med sekundær fikseringsbandage, f.eks. OPSITE® Flexifix, OPSITE Flexifix Gentle bandage eller kompression.

Hvor ofte skal bandagen skiftes?


I de tidlige faser af sårbehandlingen skal bandagen kontrolleres ofte. Bandager kan sidde i op til syv dage. Bandager skal skiftes afhængigt af såret og den omgivende huds tilstand, eller når ekssudatet er under 0,5 cm fra bandagekanten.

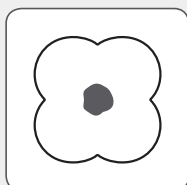

Ingen behov for at skifte

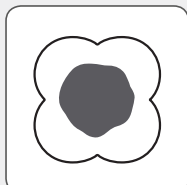

Overvej at skifte

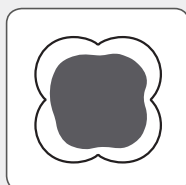

Skift bandagen

Fjernelse

Løft i et hjørne og træk forsigtigt tilbage, indtil hele bandagen er taget af.

Illustrationen er kun vejledende. Beslutning om bandageskift skal tages på baggrund af en klinisk vurdering og lokale protokoller.

Bestillingsinformation

S&N-varenummer	Størrelse	Antal/æske
66801747	5,5 x 5,5 cm	10
66801748	10.5cm x 10.5cm	10
66801749	16cm x 16cm	10
66801750	21 cm x 21 cm	10
66801751	10cm x 20cm	10
66801752	20 cm x 50 cm	2

Wound Management

Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm

T 45 80 61 00
F 45 80 61 51

www.smith-nephew.dk

sn.dk@smith-nephew.com

*Varemærke tilhørende Smith & Nephew

TMAlle varemærker er godkendt

© Smith & Nephew februar 2018

18-03469-DK

Supporting healthcare professionals for over 150 years

Referencer: 1. Smith & Nephew Data on File DS.16.328.R V2 ALLEVYN® LIFE Non-Bordered physical testing; 2. Smith & Nephew Data on File DS.16.470.R ALLEVYN LIFE Non-Bordered horizontal wound model; 3. Weedon. F (2016) ALLEVYN LIFE Non-Bordered Human Factors summary; 4. Fairlamb D. (2017) ALLEVYN LIFE Non-Bordered Clinical Claims Supporting Statement; 5. Rossington *et al.* (2013) Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. WOUNDS. Vol 9. No. 4; 6. Davies *et al.* (2015) Selecting dressings to manage exudate and enhance patient wellbeing. WOUNDS UK Vol. 11 No. 3; 7. Smith & Nephew Data on File DS.16.469.R ALLEVYN LIFE Non-Bordered Vertical Wound Model; 8. Smith & Nephew Data on File DS.16.334 V2 ALLEVYN LIFE Non-Bordered Fluid Uptake Testing; 9. Smith & Nephew Data on File DS.16.429.R Shedding when cut – Testing on ALLEVYN LIFE Non-Bordered and DURAFIBER® dressings.