

PLASMA Steriliseringsposer og ruller – BRUGERVEJLEDNING

Mpack Plasma steriliseringsposer og ruller er beregnet til at anvendes som pakkemateriale til sterilisering af medicinsk udstyr v.hj.a. Hydrogen peroxid gas plasma.

Efter sterilisation vil indikatorerne (Klasse I) skifte farve: VH202: fra grøn til gul

Særlige advarsler og forholdsregler

- Mpack Plasma steriliseringsposer og ruller kan kun anvendes til lav temperatur sterilisering.

Forberedelse før pakning:

1. Steriliseringsposen må ikke foldes. Dette for at sikre korrekt penetration af plasma.
2. Det anbefales at emballagen ikke fyldes mere end $\frac{3}{4}$ af posens rumfang. (Ruller: Rul tilstrækkeligt ud af steriliseringsrullen for at sikre plads nok til indholdet, svejsningen og til at der kan tages et godt greb ved åbningen)
3. Gummibånd, skarpe genstande (f.eks. : papirclips, sikkerhedsnåle eller hæfteklammer) bør ikke anvendes til at sikre pakker eller til at organisere indholdet.
4. Inden forsegling. Fjern så meget luft som muligt fra posen for at forhindre brist under sterilisering.

Forsegling:

1. Sørg for, at posens indhold er min. 2 cm fra forseglingen og ikke kommer i vejen for forseglingen.
2. Sørg for at der er 2 cm ekstra på ydersiden af svejsningen. (Ruller: efterlad plads nok uden for svejsningen til at der kan tages et godt greb ved åbningen)
3. Anbefalede parametre for forseglingen - intervaller:
 - Temperatur: 140 - 160°C
 - Tryk: 0,2 – 0,6 MPa
 - Tid: 0,2 – 3,0 sek.
4. Kontrollér forseglingsens integritet fx; ingen folder, rynker eller luftbobler.

Før sterilisering

- Sørg for at arrangere poserne på en sådan måde, at der er minimal kontakt mellem poserne. Det anbefales at placere de forseglede poser lodret i lav temperatur sterilisatoren.
- Kurven må ikke pakkes for tæt, idet pakkerne udvider sig under sterilisationsprocessen, og skal kunne ånde frit.

Efter sterilisering

- Kontrollér, at posen er tør og ikke er beskadiget eller misfarvet.
- Kontrollér, at forseglingen er komplet.
- Kontrollér, at sterilisationsindikator har ændret farve ifølge specifikationen.

Opbevaringsbetingelser

- Opbevar Mpack® produkter i deres oprindelige emballage i et støvfrit miljø, væk fra direkte sollys, UV-lyskilder og høj fugtighed. Procesindikatoren kan risikere at skifte farve over tid såfremt den ikke opbevares korrekt.
 - ❖ Anbefalet relativ fugtighed: 30 - 60 %
 - ❖ Anbefalet Temperatur: 10 - 40°C
- Ydre kartoner skal behandles med omhu og beskyttes mod skader.