

3M Precise Vista

Hudstaplere 3995, 3996, 3997, 3998 til engangsbrug

3M Precise Hudstaplere DS-5, DS-15, DS-25 til engangsbrug

3M Precise Hudstaplere PGX-15W, PGX 35-W til engangsbrug

3M Precise Hudclipsfjernere SR-1, SR-3 til engangsbrug

Brugervejledning

3M™ Precise™ Vista

(DK)

Hudstaplere 3995, 3996, 3997, 3998 til engangsbrug

3M™ Precise™ Hudstaplere DS-5, DS-15, DS-25 til engangsbrug

3M™ Precise™ Hudstaplere PGX-15W, PGX-35W til engangsbrug

3M™ Precise™ Hudclipsfjernere SR-1, SR-3 til engangsbrug

Produktbeskrivelse

3M™ Precise™ Vista hudstapler til engangsbrug med optimal hudclipsvisibilitet. Hudstapleren fås med 15 eller 35 hudclips i standard eller ekstra bredde.

3M™ Precise™ DS hudstapler til engangsbrug er en lille, tanglignende stapler. Huddipsen er buet og samler vævet på en måde, der svarer til en perkutan sutur. Stapleren fås med 5, 15 eller 25 clips.

3M™ Precise™ PGX hudstapler er en levægts pistollignende hudstapler, der fås med 15 og 35 hudclips i ekstra bredde.

3M™ Precise™ Hudclipsfjerner SR-1 til engangsbrug er en standard hudclipsfjerner af metal fremstillet af rustfrit stål.

3M™ Precise™ Hudclipsfjerner SR-3 til engangsbrug er en sakselignende hudclipsfjerner. Fjernerens håndtag er af plastik og kaber af rustfrit stål.

Anvendelse

3M Precise hudstaplere til engangsbrug kan anvendes til lukning af mange forskellige typer hudsår og kirurgiske hudincisioner. Staplelemlene er kun beregnet til ekstern brug. 3M Precise hudclipsfjernere til engangsbrug er af universaldesign og kan fjerne alle typer hudclips. Kun til medicinsk brug.

Kontraindikationer

- Når det ikke er muligt at opretholde en afstand på mindst 5 mm fra den sammenhæftede hud og de underliggende strukturer, er brugen af hudstaplere til lukning af hud kontraindikeret.
- Brugen af hudstaplere er kontraindikeret hos patienter med kendt følsomhed eller allergiske reaktioner over for metallerne i 316L rustfrit stål, dvs. krom, nikkel, kobber, kobolt og jern.
- Må ikke anvendes til lukning af internt væv.
- Dette produkt er ikke designet, solgt eller beregnet til andet end de indikerede anvendelser.

Advarsler

- Kun til brug på en enkelt patient.
- Må ikke genforarbejdes eller resteniseres. Dette kan kompromittere produktets funktionelle integritet.
- Brugere bør have erfaring med kirurgiske procedurer og teknikker, som involverer anvendelse af hudstaplere, inden 3M Precise hudstaplere anvendes til lukning af hud.
- Ethvert fremmed materiale, der kommer i nærheden af et område, hvor der forekommer bakteriel kontaminering, kan øge bakteriernes smitsomhed. Godkendt kirurgisk praksis skal følges ved dræning og lukning af inficerede eller kontaminerede sår.
- Denne anordning er ikke blevet testet til brug ifm. MR-scanningsprocedurer (magnetisk resonansbilleddannelse). Hvis lægen ordinerer denne procedure, vil påvirkningen af det rustfrie stål 316L som resultat af det magnetiske felt være begrænset. Under MR-scanning kan clipsene eventuelt forårsage udfald i scanningsbilledet (undertiden betegnet "defokuseringseffekt").
- Må ikke genbruges. Produktet må ikke genbruges, da genbrug kan påvirke produktets uskadthed eller/og funktion og derved medføre en risiko for sårkontaminering, patientinfektion eller krydsinfektion, som kunne føre til skade, sygdom eller dødsfald.

Forsigtighedsregler

- Amerikansk føderal lovgivning begrænser salg af denne anordning til læge eller ifølge en læges ordre.
- Bivirkninger forbundet med brugen af instrumentet omfatter: sårruptur, allergiske reaktioner hos patienter med kendt følsomhed over for metallerne i 316L rustfrit stål (dvs. krom, nikkel, kobber, kobolt og jern), øget smitsomhed af bakterier, minimal akut betændelsesforårsagende vævsreaktion samt smerte, ødem og erytem på sårstedet.
- Precise hudclips er fremstillet af 316L rustfrit stålwire af hospitalsklasse og er ikke resorberbare. Cytotoksicitet og testning af intramuskulære implantationer viser ingen vævstoksicitet.

Brugsanvisning

Brugsanvisning - 3995, 3996, 3997, 3998

3M™ Precise™ Vista hudstaplere til engangsbrug:

- Hold hudkanterne sammen, og kræng dem lidt udad. Hudclipsens stilling før placeringen bestemmes bedst ved at trykke på aftrækkeren til første stop, så hudclipsen føres fremad.
- Hold stapleren en smule skråt, og placér den forsigtigt over de udkrængede hudkanter. Hvis instrumentet trykkes for hårdt ned, kan det vanskeliggøre fjernelsen af hudclipsene og føre til et dårligt kosmetisk resultat.
- Form hudclipsen ved at klemme håndtaget helt sammen, til det stopper.
- Slip håndtaget helt.
- Løft stapleren væk fra huden. Kontrollér altid hudclipsenes placering, og udskift clips, der er placeret forkert.



3M™ Precise™ Vista Disposable Skin Staplers, 3995, 3996, 3997, 3998



3M™ Precise™ Multi-Shot DS Disposable Skin Stapler System, DS-5, DS-15, DS-25



3M™ Precise™ PGX Disposable Skin Staplers PGX-15W, PGX-35W



3M™ Precise™ Disposable Skin Staple Removers SR-1, SR-3

Brugsanvisning - DS-5, DS-15, DS-25

3M™ Precise™ Multi-Shot DS hudstapler til engangsbrug:

1. Hold hudkanterne sammen, og kræng dem lidt udad. Hold stapleren opad (90°). Anbring stapleren på huden med et let nedadrettet tryk. Hvis der trykkes hårdere, går hudclipsen dybere ned i huden.
2. Hudclipsen formes ved, at aftrækkeren trykkes fast og helt i bund. Hvis trykket på instrumentet er for kraftigt, kan hudclipsen sætte sig fast i instrumentet og vanskeliggøre afskydningen af clipsen. Hvis instrumentet trykkes for hårdt ned, kan det vanskeliggøre fjernelsen af hudclipsene og føre til et dårligt kosmetisk resultat.
3. Instrumentet frigøres fra clipsen ved, at tommelfingertrykket udløses helt.
4. Før instrumentet bagud fra clipsen, og løft stapleren væk fra huden. Kontrollér altid hudclipsenes placering, og udskift clips, der er placeret forkert.

Brugsanvisning - PGX-15W, PGX-35W

3M™ Precise™ PGX hudstaplere til engangsbrug:

1. Hold hudkanterne sammen, og kræng dem lidt udad. Hold stapleren opad (60-90°). En vinkel på 90° vil resultere i en dybereliggende hudclips. Anbring stapleren på huden med et let nedadrettet tryk. Hvis instrumentet trykkes for hårdt ned, kan det vanskeliggøre fjernelsen af hudclipsene og føre til et dårligt kosmetisk resultat.
2. Form hudclipsen ved at klemme på håndtaget, til det stopper. Hvis håndtaget ikke klemmes helt sammen, kan dette resultere i, at clipsen ikke formes korrekt og ikke holder vævet tilstrækkeligt sammen.
3. Slip håndtaget helt.
4. Løft stapleren væk fra huden. Kontrollér altid hudclipsenes placering, og udskift clips, der er placeret forkert.

Brugsanvisning - SR-1, SR-3

3M™ Precise™ Hudclipsfjernere til engangsbrug:

1. Clipsene skal undersøges for at sikre, at de ikke har vendt sig. Hudclips, der har vendt sig, skal placeres korrekt, inden de fjernes.
2. Sørg for, at fjernerer ligger korrekt med den nederste kæbe nedad.
3. Før spidsene på fjernerens nederste kæbe ind under hudclipsen.
4. Omplacér clips, der ikke ligger korrekt, så de ligger vinkelret i forhold til hudoverfladen.
5. Løft fjernerer lidt opad, så clipsen stadig ligger vinkelret i forhold til hudoverfladen.
6. Fortsæt med at løfte lidt, samtidig med at håndtagene klemmes forsigtigt sammen for at omforme clipsen.
7. Løft den omformede clips direkte op fra vævet, og kassér den i overensstemmelse med offentlige eller lokale vedtægter.

Opbevaring/holdbarhed/bortskaffelse

Holdbarhed: 5 år

Levering

3M Precise hudstaplere og hudclipsfjernere leveres sterile. Produktets sterilitet er garanteret, medmindre pakken er beskadiget eller åbnet.

Symbolforklaring



Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget eller har været åbnet



Opmærksom, se brugsanvisningen



Må ikke genbruges



Holdbarhedsdato



LOT Batchnr.



Producent



STERILE R Steriliseret vha. stråling