


PütterFlex®

Bi-elastische Kurzzugbinden
Bi-elastic short-stretch bandages
Bandes bi-extensibles à allongement court
Bi-elastische zwachtels met korte rek
Bende bielastiche a corta trazione
Vendas bielásticas de corta elasticidad
Ligaduras bielasticas de curta tração
Επίδεσμοι μικρής τάνυσης με οριζόντια και κάθετη ελαστικότητα
Bi-elastická obinadla s krátkým tahom
Bi-elastické obvazy s krátkym ťahom
Opaski bi-elastyczne o dwukierunkowej rozciągliwości
Bielasztikus rövid megnyúlású pólyák
Ελαστικές βινты средней растяжимости с продольной и поперечной эластичностью
Bi-elastisk kortsträck/lågelastisk binda
Bi-elastisk kortstræksbind
Kaksisuuntaisesti joustavat vähäelastiset kompressiositeet
Bi-elastisk kortstrekkinde
雙延展性短張力繃帶
ضمادات قابلة للمط في الاتجاهين وقصيرة التمدد

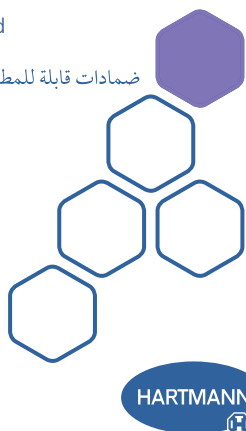

DK

Brugsanvisning

PütterFlex er et hudfarvet, særlig tyndt, bi-elastisk kortstræksbind med en strækveje på langs på ca. 90 % til meget stærk kompression. Yderligere elasticitet på tværs gør det meget bekvemt at have på og enkelt at anlægge.

Egenskaber

- Komfortabelt.
- Særlig tyndt, så forbindingen passer bedre i normalt fodtøj.
- Steriliserbart. Bindene kan steriliseres enkeltvis i egnet indpakning i autoklaven ved 134 °C.
- Økonomisk i brug. PütterFlex er bestandigt over for ældning. Er uimodtageligt over for fedtstoffer, salver og sved. Det kan vaskes ved 95 °C

Anvendelsesområder

En kompressionsbandage, der bruges ved alle akutte og kroniske ødemer. Er ligeledes egnet til bensår og årebetændelse.

Sammensætning

100 bomuld

Kontraindikationer

PütterFlex må ikke anvendes ved:

- fremskreden arteriel iskæmi
- dekomenseret hjerteinsufficiens
- ankel/arm-index over 1,3
- ulcera af arteriel oprindelse
- overfølsomhed over for materialerne
- udprægede sensibilitetsforstyrrelser i underekstremiteterne

Der skal udvises særlig forsigtighed ved anvendelse hos patienter med:

- hudlidelser
- diabetes mellitus
- blandede ulcera
- Ankel/arm-index ≤ 0,8

Bemærk

Forbindsklemmer har udelukkende til formål at fiksere bindet under opbevaringen. Brug dem ikke på patienten.

Dato for ændring af teksten: 2016-07



PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12 · 89522 HEIDENHEIM, GERMANY

AE – PAUL HARTMANN Middle East FZE · Dubai, U.A.E.
AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. · 2355 Wiener Neudorf
AU – PAUL HARTMANN Pty. Ltd. · Macquarie Park, NSW 2113
BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A. · 1480 Saintes/Sint-Renelde
CH – IVF HARTMANN AG · 8212 Neuhausen
CZ – HARTMANN-RICO a.s. · 66471 Veverská Bítýška
DK – PAUL HARTMANN A/S · 2300 København
ES – Laboratorios HARTMANN S.A. · 08302 Mataró
FR – Lab. PAUL HARTMANN S.à.r.l. · Châtenois
67607 Sélestat CEDEX
GB – PAUL HARTMANN Ltd. · Heywood OL10 2TT
GR – PAUL HARTMANN Hellas A.E. · 16674 Glyfada/Athina
HK – PAUL HARTMANN Asia-Pacific Ltd. · Hong Kong
HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft. · 2051 Biatorbágy, Budapest
IT – PAUL HARTMANN S.p.A. · 37139 Verona
NL – PAUL HARTMANN B.V. · 6546 BC Nijmegen
NO – PAUL HARTMANN AS · 0278 Oslo
PL – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. · 95-200 Pabianice
PT – PAUL HARTMANN LDA · 2685-378 Prior Velho
RU – PAUL HARTMANN OOO · 115114 Moskva
SE – HARTMANN-ScandiCare AB · 33421 Anderstorp
SI – PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. · 1000 Ljubljana
SK – HARTMANN-RICO spol. s r.o. · 85101 Bratislava
ZA – HARTMANN South Africa · 2194 Johannesburg



www.hartmann.info