



COMPRESSANA MASTER



På- og aftagnings hjælp



COMPRESSANA MASTER

Formålsbestemmelse

For at give effektiv hjælp til muskel-venepumpen er det nødvendigt, at COMPRESSANA kompressionsstrømper yder et stort, men korrekt tryk mod benet. I sær i ankelområdet, hvor benene er smallest er strømperne specielt stramme. En særlig påtagnings teknik er nødvendig for at få strømpen over fod og hæl. For at nå hæl og fod med hænderne, er det nødvendigt med god bevægelighed og gode kræfter.

COMPRESSANA MATER er en på- og aftagningshjælp til medicinske kompressionsstrømper. På- og aftagningshjælpen er først og fremmest velegnet, hvis din bevægelighed er begrænset. Den gør det ikke kun lettere at tage dine medicinske kompressionsstrømper på og af, men giver dig også ekstra sikkerhed: Du undgår den fysiske anstrengelse ved at bukke dig, og faren for at falde reduceres. Samtidig skåner på- og aftagningshjælpen din hud samt det strikmateriale, som din kompressionsstrømpe er lavet af. Ved at strække strømpen ud på forhånd bliver det lettere at tage den på. Strømpeholderet gør det lettere at tage den af.

COMPRESSANA MASTER På- og aftagningshjælp til kompressionsstrømper

Compressana Master gør på- og aftagning betydelig lettere.

- Ved påtagning: Strømpen udvides og strækkes, så den let kommer på foden.
- Ved aftagning: Strømpen fastholdes af en bøjle, som sammen med håndtagene gør det let at tage strømpen af.
- Kan også anvendes til buksestrømper.

Ubesværet På- og aftagning

Med lidt øvelse gør Compressana Master det let at tage kompressionsstrømper på og af.

Ubesværet og let - i siddende stilling - uden anstrengende foroverbøjning - uden at bruge kraft.

Compressana Master gør det tilmed lettere at få strømpen korrekt placeret på foden.

Særligt velegnet til

COMPRESSANA MASTER er specielt velegnet til mennesker med nedsat bevægelighed og/eller nedsat muskelstyrke. COMPRESSANA MASTER sikrer at strømperne bliver korrekt placeret på benene.

Endvidere anbefales COMPRESSANA MASTER til mennesker med forskellige dysfunktioner:

- Gigt sygdomme i leddene
- Misdannelser i hænderne
- Skader efter håndlæsioner
- Stive led
- Ryglidelser
- Adipositas

Advarsel

På- og aftagningshjælpen bør kun udleveres af dertil uddannet personale i relevant specialbutik. Kontakt venligst forhandleren, hvis produktet er blevet beskadiget. Undlad selv at foretage reparationer – det kan påvirke kvaliteten og den medicinske effekt negativt. Brug kun på- og aftagningshjælpen, når du sidder ned. Læs hele brugsanvisningen grundigt, og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen omhyggeligt. Producenten hæfter ikke for skader/tilskadekomst som følge af ukorrekt håndtering eller utilsigtet anvendelse. Opbevar COMPRESSANA MASTER utilgængeligt for børn. Brug kun COMPRESSANA MASTER, hvis stellet og holdelement er i fejlfri stand.

Opbevaring

Opbevares tørt under hygiejniske forhold. Undgå varme, direkte sollys og fugt.

Gode råd

- Træk aldrig strømpen opad ved at holde i grip-toppen
- Vend grip-toppen udad før påtagningen
- Brug gummihandsker for at undgå at ringe, negle og lignende kan lave skader på strømpen.
- I tilfælde af åbne sår i anvendelsesområdet kan det være nødvendigt at yde professionel sårbehandling og dækning.

Rengøring

Tør af med en fugtig klud og almindelig rengøringsmiddel til husholdningen.

Indikationer

- Lammelse
- Aldersbetinget styrkenedsættelse
- Artrose / gigt
- Svær overvægt
- Vidtgående hvirvelsøjle- / hofte- / knæstivhed
- Degenerative sygdomme i hænder / håndområdet
- Følger af tilskadekomst / amputation

Relative kontraindikationer

Absolute immobilitet


COMPRESSANA GmbH hæfter ikke, hvis denne kontraindikation ikke overholdes.

Bivirkninger

Ved korrekt anvendelse er der ingen kendte bivirkninger. Hvis der alligevel sker negative forandringer under den ordnede anvendelse, skal du straks kontakte din læge eller forhandler. Producenten hæfter ikke for skader / tilskadekomst som følge af ukorrekt håndtering eller utilsigtet anvendelse. Ved reklamationer i forbindelse med produktet bedes du henvende dig direkte til det sted, hvor du købte produktet. Kun alvorlige hændelser, som kan resultere i en væsentlig forværring af sundhedstilstanden eller kan have døden til følge, skal meddeles producenten og den ansvarshavende myndighed i medlemslandet. Alvorlige hændelser er defineret i artikel 2 nr. 65 i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Bortskaffelse

Rekvirer venligst regionale regler.

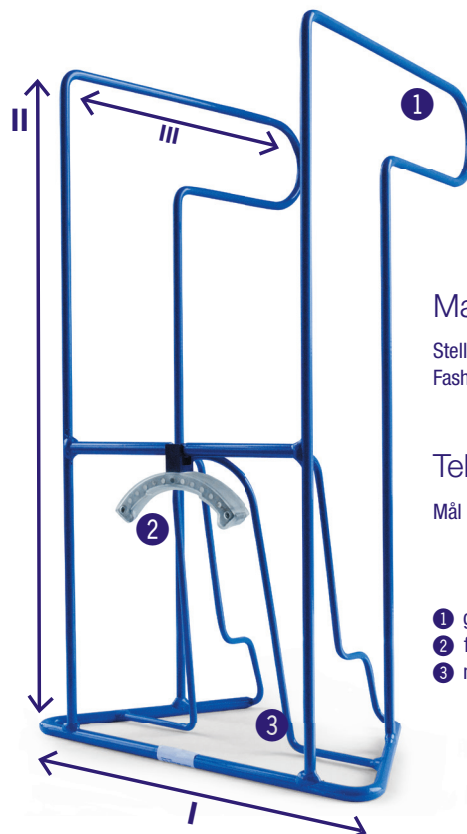

Materiale:

Stell: beklædt metal
Fasholdelsesbøjlen: PVC

Tekniske data:


Mål	I	32,0 x 18,0 cm
	II	52,0 cm
	III	28,5 cm

- ① gribehåndtag
- ② fasholdelsesbøjle
- ③ midterdel




COMPRESSANA MASTER


Påtagning med COMPRESSANA MASTER

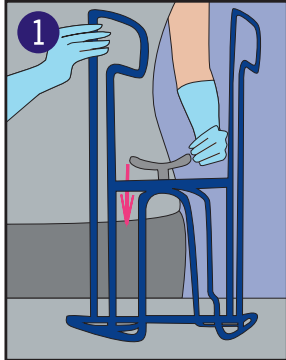


1
Vend fasholdelsesbøjlen bagud. Bøjlen skal kun anvendes ved aftagning. Vend COMPRESSANA MASTER sådan at håndtagene vender opad mod dig selv.

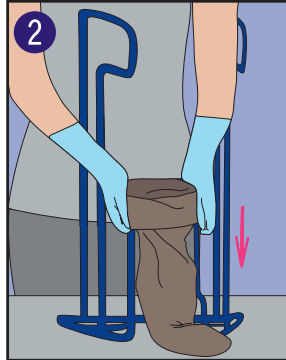


2
Brug begge hænder (med gummihandsker på) og skub strømpen ned over stativets midterdel, således at tådelene vender nedad og fremad.

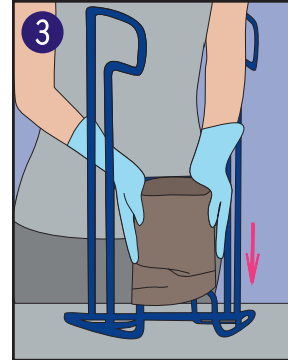


3
Glid strømpen ned over midterdelen, indtil strømpens hæl er helt oppe ved den øverste kant.

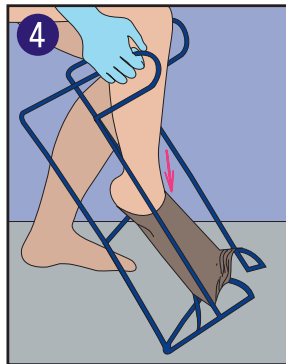


4
Sæt dig ned og hold strømpepåtageren i en let vinklet position. Stik tæerne ind i strømpen og fortsæt indtil hælen er dækket.

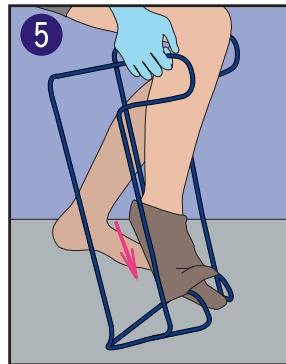


5
Før benet ind i strømpen så langt som muligt, indtil foden kan ses under stativets midterdel. Placer COMPRESSANA MASTER næsten lodret. Bøj, hvis mulig, tæerne opad og skub benet ind i strømpen.

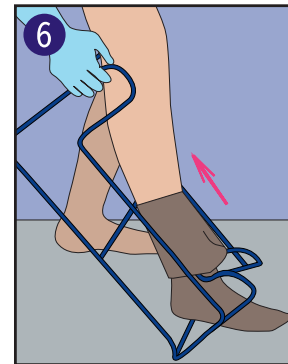


6
Sæt nu foden fast på gulvet og træk ved hjælp af COMPRESSANA MASTER strømpen op til knæet.

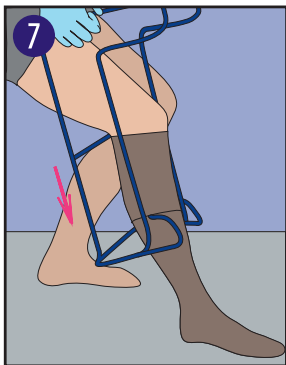

7
Før herefter strømpepåtageren nedad og ud af strømpen.

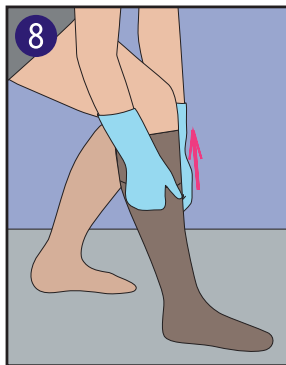

8
Tag fat i strømpen med handsker på og placer den korrekt på benet.

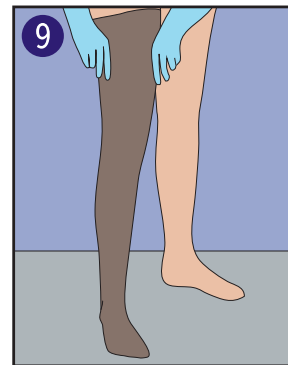


9
Det er vigtigt at anvende gummihandsker ved påtagningen, både for at placere strømpen korrekt og behageligt - og for at undgå at lave skader på den.




COMPRESSANA MASTER


Aftagning med COMPRESSANA MASTER

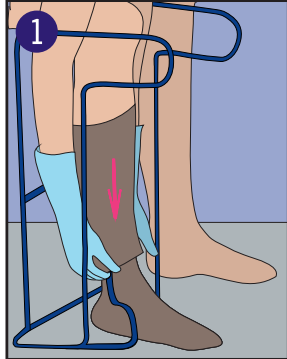


1 Tag fat i strømpeens øverste kant med begge hænder og træk den nedad. Sæt dig ned og sæt benet ind i COMPRESSANA MASTER sådan at læggen rører ved stativets midterdel. Træk strømpeens øverste del ud over midterdelen ned mod gulvet.

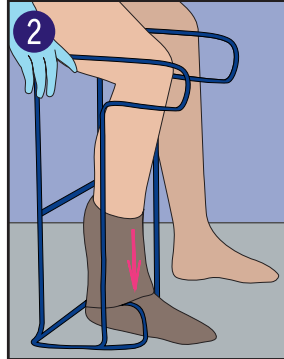


2 Træk strømpen nedad indtil den ikke kan komme længere på grund af midterdelen.

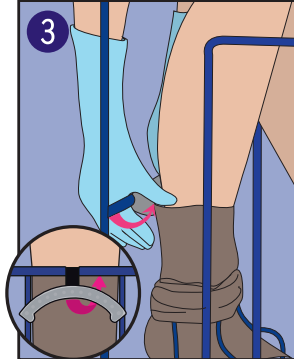


3 Skub nu fasholdelsesbøjlen opad mod midterdelen indtil den "klikker" fast. Strømpen er nu fikseret på stativet.

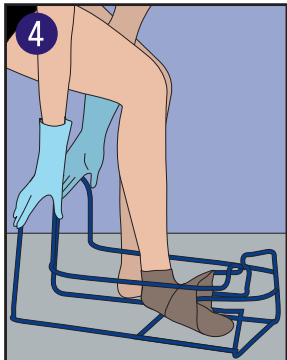

4 Stræk benet fremad og læg COMPRESSANA MASTER bagud ned på gulvet. Tag fat på den øverste del af stativet med begge hænder og sæt den anden fod på stativet mod gulvet. Løft benet med strømpen på op, så det er i niveau med midterdelen. Hælen er nu over fastholdelsesbøjlen.

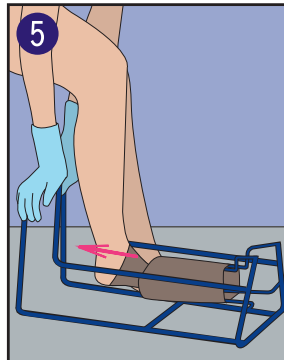

5 Træk foden vandret ud af strømpe, parallelt med gulvet, mens du skubber COMPRESSANA MASTER fremad. Undgå at løfte foden opad.

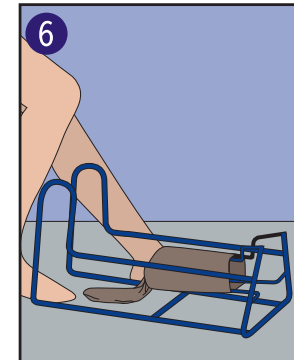

6 Fold til sidst fastholdelsesbøjlen nedad, således at strømpen let kan fjernes fra COMPRESSANA MASTER.

Betydning af symbolerne	Producent	Medicinsk udstyr	Fremstillingsdato	Parti	Art. Nr.	www.compressana.de	Skal beskyttes mod sollys	Opbevares tørt	Følg instrukserne!



COMPRESSANA GmbH
Böhmerwaldstraße 3
93073 Neutraubling · Germany

Tel.: 09401 9226-0
Fax: 09401 9226-20

info@compressana.de
www.compressana.de



Made in Germany