



BD Vacutainer® Eclipse™ Blodprøvetagningskanyle med præ-monteret holder

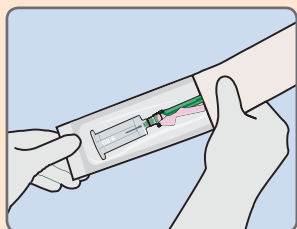


1 Tag handsker på og åbn pakningen til BD Vacutainer® Eclipse™ Blodprøvetagningskanyle med præ-monteret holder. Produktet er klar til brug – der skal ikke samles noget.

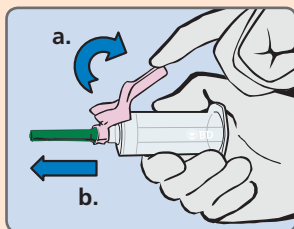


2a Vip sikkerhedsskjoldet helt tilbage til det møder holderen.


2b Drej og tag den farvede kanylebeskyttelseshætte af. Notér at kanylens øje altid er i korrekt position til veneblodprøvetagning. Vrid eller rotér **IKKE** sikkerhedsskjoldet.

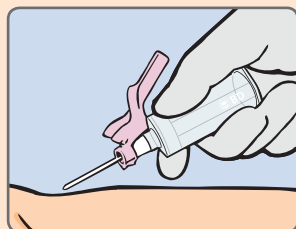

3 Foretag veneblodprøvetagning efter de gældende regler og procedurer på din arbejdsplads.

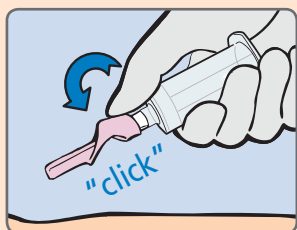


4 Umiddelbart efter at have fjernet kanylen fra venen, placér din tommelfinger direkte på sikkerhedsskjoldets tommelfinger flade. Skub sikkerhedsskjoldet fremad for at dække nålen ved hjælp af en-hånds teknik. Når sikkerhedsskjoldet låser sig om nålen, vil du høre et klik. Forsøg **IKKE** at aktivere sikkerhedsskjoldet ved at presse det mod en hård overflade.

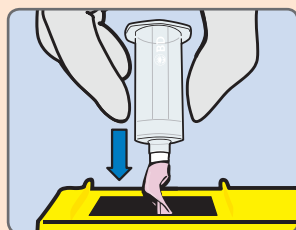

5 Efter aktivering af sikkerhedsskjoldet bortskaffes kanylen øjeblikkeligt i en godkendt kanyleboks.



BD Diagnostics
Preanalytical Systems

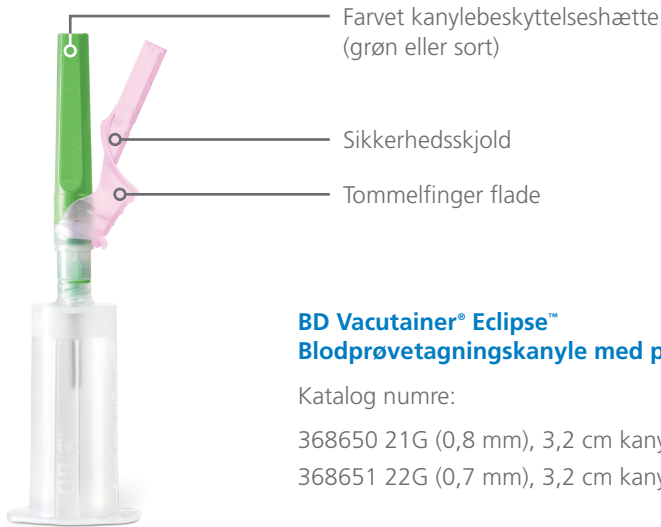

BD Vacutainer® Eclipse™ Blodprøvetagningskanyle med præ-monteret holder

Katalog numre:

368650 21G (0,8 mm), 3,2 cm kanyle

368651 22G (0,7 mm), 3,2 cm kanyle

www.bd.com/vacutainer

FORSIGTIG: Håndter alle biologiske prøver og blodprøvetagnings "skarpe genstande" (lancetter, kanyler, luer-adaptore og blodprøvetagningsæt) i henhold til de gældende regler og procedurer på din arbejdsplads. Opsøg relevant lægelig hjælp i tilfælde af eksponering af biologiske prøver (for eksempel ved en stik skade), da prøver kan overføre viral hepatitis, HIV (AIDS) eller andre smitsomme sygdomme. Udnyt enhver sikkerhedsfunktion på blodprøvetagningsudstyret, såfremt det er et sikkerhedsprodukt. Bortskaf alle blodprøvetagnings "skarpe genstande" i en kanyleboks til biologisk materiale.



BD Diagnostics
Preanalytical Systems

BD Vacutainer® Eclipse™ Blodprøvetagningskanyle med præ-monteret holder
Brugerguide, EA, 040512, 01, EN

BD, BD's logo og alle andre varemærker tilhører Becton, Dickinson and Company. ©2013 BD.

Becton Dickinson A/S
Herstedøstervej 27-29, bygn. A, 2. Sal
DK-2620 Albertslund
Telefon: +45 43 43 45 66
Fax: +45 88 51 00 01
Mail: bd Denmark@europe.bd.com