

## 3M™ Littmann® Cardiology IV™ - Brugervejledning

### Funktioner og fordele

- Fremragende akustisk ydeevne
- Enkelt flydende membran giver bedre mulighed for at høre højfrekvente lyde (voksenside, fast tryk)
- De flydende membraner er nemme at rengøre
- Alsidigt bryststykke med en voksenside og en pædiatrisk side
- Slange af næste generation for længere holdbarhed
- 2-i-en slange leverer to lydveje i en slange
- Den pædiatriske side kan ændres til en åben klokke
- 7 års garanti
- Inkluderet i æsken:
  - Store Snap-On faste og bløde forseglende øreoliven
  - Små Snap-On faste og bløde forseglende øreoliven
  - Kuldefri ring




### Symbolforklaring

 Se brugsanvisningen.


 Ikke fremstillet i naturgummilatex.

### Brugervejledning


Sæt øreoliven i fremadgående retning.

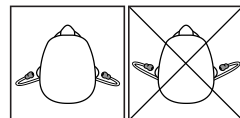

### Indstil hovedbøjelens stramning

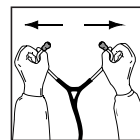

For at reducere fjederens stramning, træk bøjerne fra hinanden.

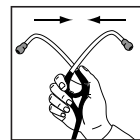

For at øge fjederens stramning, tryk bøjerne sammen.


### Vælg den aktive side af bryststykket

Kun én side af bryststykket er akustisk aktivt ad gangen. Dette indikeres af et mærke på stilkene.


Drej bryststykket for at skifte den aktive side.

### Lyt til lav- og højfrekvente lyde med Littmann flydende membraner på begge sider af bryststykket

Brug den store side til voksne og den lille side til børn, tynde patienter, ved forbindinger, eller til vurdering af halspulsåren.

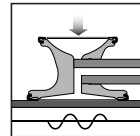


*Lavfrekvente lyde:* anvend et let tryk på bryststykket

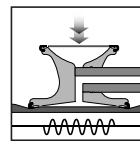

*Højfrekvente lyde:* anvend et fast tryk på bryststykket

#### Skift til traditionel åben klokke

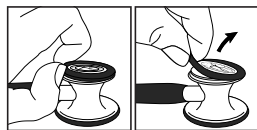

Klem kanten af membranen på den lille side; træk og løft fra bryststykket.



Sæt ringen fast ved at placere den ene side på kanten og strække den over bryststykket.




For at sætte membranen på, skal den kuldefri ring fjernes. Før membranens kant ind i rillen og rul ringen omkring bryststykket.

#### Rengøring, desinfektion og opbevaring

Rens dit stetoskop mellem hver patient med enten en 70% isopropylalkoholserviet eller med en engangsserviet med sæbevand. Der kan anvendes en 2% blegemiddelopløsning til at desinficere dit stetoskop; dog kan slangen opleve en mindre misfarvning efter brug af blegemiddel. De flydende membraner, den kuldefri klokkering og øreoliven kan fjernes for en grundigere rengøring.

Træk hårdt i øreoliven, for at fjerne dem fra bøjerne. Når øreoliven skal sættes på igen, presses den lille side hårdt ind på bøjerne, indtil de klikker på plads. Alle dele og overflader tørres omhyggeligt, inden de samles igen. Sørg for at øreoliven sættes godt fast på hovedbøjlen, inden du sætter dem i dine ører.

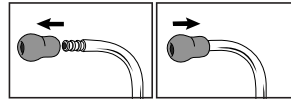

Stetoskopet må ikke dyppes i nogen form for væske. Stetoskopet må ikke udsættes for en steriliseringsproces. Undgå at opbevare stetoskopet under ekstremt varme forhold. For at forhindre pletter på stetoskopslangen, undgå kontakt med kuglepenn, tuscher, avispapir eller andet trykt materiale.



#### Littmann service og garantiprogram

Stetoskopet bør registreres online

på: <http://www.littmann.com/warranty-registration>

Littmann Cardiology IV er garanteret mod enhver materiale- og håndværkfejli i en periode på syv (7) år. Reparationer i garantiperioden foretages uden beregning ved returnering af stetoskopet til 3M, dog ikke hvis stetoskopet viser tydelige tegn på misbrug eller skade.

For service og reparation i USA, besøg venligst

[www.littmann.com/service](http://www.littmann.com/service) eller ring på 1-800-292-6298.

Hvis du er uden for USA, besøg venligst [www.littmann.com](http://www.littmann.com) for kontaktoplysninger for dit lokale 3M-kontor.

For yderligere oplysninger, besøg [www.littmann.com](http://www.littmann.com).

3M, Littmann, L Littmann-logoet, L, og Cardiology IV er varemærker tilhørende 3M.

Anvendt under licens i Canada.

© 2017, 3M. Alle rettigheder forbeholdt.