

MEDIXPRO® MEDICINSK ENGANGSLEJEPAPIR

PRODUKTBEKRIVELSE:

MedixPro® - medicinsk engangslejepapir er et produkt designet til at isolere patienten fra potentielt forurenede overflader af medicinske brikse, gynækologiske stole, pædiatriske borde, undersøgelsesborde til spædbørn, behandlingsborde, terapeutiske massageborde, fysioterapiborde osv.

Anvendelsen af MedixPro® - medicinsk engangslejepapir forbedrer de hygiejniske forhold ved udførte procedurer og reducerer sandsynligheden for perioperative infektioner.

MedixPro® medicinsk engangslejepapir (kun model - PF: PAPER + FOIL) takket være det ekstra folielag kan også bruges ved en middelhøj risiko for forurening med væsker.

PÅTÆNKET ANVENDELSE:

MedixPro® medicinsk engangslejepapir er beregnet til brug med henblik på at forbedre de hygiejniske forhold under medicinske procedurer samt at beskytte patienten, møbler og medicinsk udstyr mod forurening som følge af medicinske procedurer.

MedixPro® medicinsk engangslejepapir (model: PF: PAPER + FOIL) kan desuden bruges til at beskytte patienten, møbler og medicinsk udstyr mod sygdomsfremkaldende infektioner, der opstår under medicinsk behandling.

*) Manualen gælder for følgende modeller: PF (PAPER + FOIL); PN (PAPER + NONWOVEN); P (PAPER); N (NONWOVEN).

MedixPro® medicinsk engangslejepapir er et ikke-sterilt, ikke-invasivt medicinsk udstyr til engangsbrug med begrænset eksponering (op til 24 timer).

KONTRAINDIKATIONER

- Brug ikke produktet på personer, der er allergiske over for polyethylen eller polypropylen.
- Brug ikke lejepapiret på beskadiget hud, og åbne, ubeskyttede sår.

ADVARSLER

- Produktet er beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges.
- Ved brug af produktet skal grundlæggende regler for hygiejne følges under de udførte medicinske procedurer. Brug af produktet fritager ikke fra udførelse af dekontaminering (rengøring, vask og desinficering) af de arbejdsflader, hvorpå produktet påføres.
- For at forhindre infektion skal produktet efter engangsbrug betragtes som kontamineret eller potentielt kontamineret affald, anbringes i beholdere beregnet til dette formål og behandles i overensstemmelse med gældende regler om medicinsk affald.
- Produktet skal opbevares på et tørt sted. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys. Produktet må ikke blive permanent/væsentligt fugtigt eller gennemblødt.
- Brug ikke produktet, hvis emballagen tidligere er åbnet eller beskadiget.
- Produktets holdbarhed er 3 år fra produktionsdatoen, der er angivet på etiketten. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

SAMMENSÆTNING:

Model "PF: PAPER + FOIL": Hygiejnisk tissuepapir (cellulose), polyethylenfolie (PE).

Model "PN: PAPER + NONWOVEN": Hygiejnisk tissuepapir (cellulose), hygiejnisk ikke-vævet tekstilstof af polypropylen (PP).

Model „P: PAPER” Hygiejnisk tissuepapir (cellulose).

Model „N: NONWOVEN”: Hygiejnisk ikke-vævet tekstilstof af polypropylen (PP).

PRACTICAL - ENGANGSLEJEPAPIR

PRODUKTBESKRIVELSE:

Practical - medicinsk engangslejepapir er et produkt designet til at isolere patienten fra potentielt forurenede overflader af medicinske brikke, gynækologiske stole, pædiatriske borde, undersøgelsesborde til spædbørn, behandlingsborde, terapeutiske massageborde, fysioterapiborde osv.

Anvendelsen af Practical - medicinsk engangslejepapir forbedrer de hygiejniske forhold ved udførte procedurer og reducerer sandsynligheden for perioperative infektioner.

Practical engangslejepapir takket være det ekstra folielag kan også bruges ved en middelhøj risiko for forurening med væsker.

PÅTÆNKT ANVENDELSE:

Practical medicinsk engangslejepapir er beregnet til brug med henblik på at forbedre de hygiejniske forhold under medicinske procedurer samt at beskytte patienten, møbler og medicinsk udstyr mod forurening som følge af medicinske procedurer.

Practical medicinsk engangslejepapir kan desuden bruges til at beskytte patienten, møbler og medicinsk udstyr mod sygdomsfremkaldende infektioner, der opstår under medicinsk behandling.

BRUGSANVISNINGER

1. Rul rullen ud.
2. Riv af langs perforeringen
3. Spred lejepapiret på det valgte sted.
4. Bortskaf efter engangsbrug.

Produktet er beregnet til professionel brug. Efter engangsbrug skal man smide det brugte lejepapir ud i en foliepose og fortsætte i overensstemmelse med de gældende regler for medicinsk affald. Practical medicinsk engangslejepapir er et ikke-sterilt, ikke-invasivt medicinsk udstyr til engangsbrug med begrænset eksponering (op til 24 timer).

KONTRAINDIKATIONER

1. Brug ikke produktet på personer, der er allergiske over for polyethylen eller polypropylen.
2. Brug ikke lejepapiret på beskadiget hud, og åbne, ubeskyttede sår.

ADVARSLER

- Produktet er beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges.
- Ved brug af produktet skal grundlæggende regler for hygiejne følges under de udførte medicinske procedurer. Brug af produktet fritager ikke fra udførelse af dekontaminering (rengøring, vask og desinficering) af de arbejdsflader, hvorpå produktet påføres.
- For at forhindre infektion skal produktet efter engangsbrug betragtes som kontamineret eller potentielt kontamineret affald, anbringes i beholdere beregnet til dette formål og behandles i overensstemmelse med gældende regler om medicinsk affald.
- Produktet skal opbevares på et tørt sted. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys. Produktet må ikke blive permanent/væsentligt fugtigt eller gennemblødt.
- Brug ikke produktet, hvis emballagen tidligere er åbnet eller beskadiget.

Produktets holdbarhed er 3 år fra produktionsdatoen, der er angivet på etiketten. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

SAMMENSÆTNING:

PAPER + FOIL: Hygiejnisk tissuepapir (cellulose), polyethylenfolie (PE).

Manualens nummer og udstedelsesdato: JPM/MP/Rev.0/02.2016