

## Mepilex® XT

Blød skumbandage af silikone



- Steril. Må ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget eller har været åbnet før brug. Må ikke resteriliseres.

### Produktbeskrivelse

Mepilex XT er en meget formbar bandage med integrerede ekssudatkanaler, der absorberer både lav- og højviskøst ekssudat, bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø og minimerer risikoen for maceration. Bandagen har et Safetac®-sår-kontaktlag, som er en unik klæbeteknologi. Det minimerer smerte hos patienter og traume på såret og den omkringliggende hud ved bandageskit.

Mepilex XT består af:

- et blødt sårkontaktlag af silikone (Safetac)
- en fleksibel, absorberende pude af polyuretanskum
- en ydre polyuretanium, der er åndbar, men vandtæt

Materialeindhold:

Silikone, polyurethan

### Anvendelsesområde

Mepilex XT er en bandage, der er udviklet til en bred vifte af væskende akutte og kroniske sår i alle helingsstadier såsom ben- og fodsår, tryksår og traumatiske sår, f.eks. rifter og sekundært ophelende sår.

### Forholdsregler

- Må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for bandagen eller dens materialer.
- Må ikke bruges sammen med oxiderende midler som f.eks. hypochloritopløsninger eller hydrogenperoxid.
- Hvis der iagttages tegn på klinisk infektion, f.eks. feber eller hvis såret eller det omkringliggende hudområde bliver rødt, varmt eller hævet, skal du kontakte sundhedsfagligt personale vedrørende passende behandling.
- Vær ekstra forsigtig, når du overvejer brug på meget løs hud/væv, f.eks. på patienter med diagnosticeret epidermolysis bullosa. Sårpudens unikke overflade kan påføre ekstra stress på sårbanden og den omkringliggende hud. Overvej at bruge et andet Safetac-produkt.
- Produktet må ikke genanvendes. Hvis det genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminering.

### Brugsanvisning

Mepilex XT kan bruges af ikke-fagpersoner under tilsyn af sundhedspersonale.

1. Rens såret i henhold til de kliniske retningslinjer.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Væg en passende bandagestørrelse. Bandagen skal overlappe den tørre, omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for de mindste størrelser (op til 12,5x12,5 cm) og med 3-5 cm for de største størrelser. Bandagen kan klippes til efter behov, så den passer til forskellige sårformer størrelser og placeringsområder.
4. Fjern den første beskyttelsesfilm, og applicer bandagen med den klæbende side mod såret.
5. Fjern den resterende beskyttelsesfilm, og udglat bandagen mod huden. Stræk ikke bandagen.
6. Hvis det er nødvendigt, kan bandagen fikseres med en bandage eller anden fiksering.

Der kan gå flere dage mellem skift af bandagen. Skift bandagen, inden den er helt mættet, ved tegn på lægge eller i henhold til klinisk praksis.

Mepilex XT kan anvendes under kompressionsbandager og sammen med geler. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

### Andre oplysninger

Det polyuretanskum, der anvendes i produktet, kan skifte farve til en mere gullig farve, når det udsættes for lys, luft og/eller varme. Farveændringen har ingen indflydelse på produktets egenskaber, når blot det anvendes tør udbåndet. Enhver alvorlig ulykke relateret til brugen af Mepilex XT skal rapporteres til Mölnlycke Health Care.

Mepilex® og Safetac® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.