

**da**

## Exufiber®

Gelfiberbandage

### Produktbeskrivelse

Exufiber er en steril, nonwoven bandage fremstillet af meget absorberende polyvinylalkohol fibre (PVA-fibre). Når Exufiber kommer i kontakt med såresudat, danner det en gel, der fremmer hurtig sårhelning og gør det nemmere at fjerne bandagen ved bandageskift. Exufiber absorberer og holder på såresudat. Exufiber kan fås både som flad bandage og til kaviteter.

### Anvendelsesområde

Exufiber-sårbandage er beregnet til anvendelse på en bred vifte af væskende sår:

- Ben- og fodsår
- Tryksår
- Overfladiske delhudsforbrændinger
- Operationssår
- Donorsteder
- Maligne sår

### Forholdsregler

- Exufiber skal bruges under opsyn af kvalificeret sundhedspersonale.
- Alle sår bør observeres regelmæssigt.
- Hvis der opstår infektion under brugen af bandagen, skal der iværksættes passende medicinsk behandling i overensstemmelse med lokale kliniske protokoller. Infektion er ikke en kontraindikation mod brug af Exufiber-bandager.
- Exufiber er ikke beregnet til tørre sår eller dybe brandsår.
- Exufiber er kun til engangsbrug og bør ikke genanvendes. Ved genanvendelse kan produktet forringes, eller også kan der forekomme krydskontamination.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage er beskadiget eller har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres.
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Hvis produktet anvendes efter udløbsdatoen, kan der ikke garanteres for produktetsegenskaberne.

### Brugervejledning

#### Applicerer

#### Overfladiske sår

Rens såret med en saltvandsopløsning eller vand i henhold til de kliniske retningslinjer.

1. Tør den omkringliggende hud grundigt.

**da**

2. Vælg en bandage i en passende størrelse, så hele såret dækkes. Det bedste resultat opnås ved at læde Exufiber overlappende den tørre omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for mindre produktstørrelser (op til 10 x 10 cm) og med 5 cm for større størrelser. Bandagen hæver op og skaber en sammentrækning af sårbandagens kant i takt med, at den absorberer sårvæske og begynder at danne en gel.

3. Applicer en tør Exufiber-bandage over såret.
4. Fastgør med en passende sekundær bandage. Vælg af bandage afhænger af eksudatniveauet.
5. Kompressionsbehandling kan anvendes sammen med Exufiber.

#### Dybe sår/kaviteter, tunnelering eller underminering

Rens såret med en saltvandsopløsning eller vand i henhold til de kliniske retningslinjer.

1. Tør den omkringliggende hud grundigt.
2. Læg kaviteitsbandagen eller puden løst i såret, så der er plads til, at bandagen kan hæve op. Når kaviteitsbandagen bruges, skal strimlen klippes, så dens længde passer med 2-3 cm overlap omkring såret, så det er lettere at fjerne produktet.
3. Tildæk med en egnet sekundær bandage. Vælg af bandage afhænger af eksudatniveauet.
4. Fastgør (eller tildæk) med en klæbende eller anden egnet bandage.

#### Donorsteder

Tag en vævsprøve, og opnå hæmostase (i henhold til standardpraksis).

1. Vælg en bandage i en passende størrelse, så hele såret dækkes. Exufiber-bandagen skal overlappes den tørre omkringliggende hud med mindst 5 cm. Bandagen hæver op og skaber en sammentrækning af sårbandagens kanter i takt med, at den absorberer sårvæske og begynder at danne en gel.
2. Applicer en tør Exufiber-bandage over såret.
3. Tildæk med en egnet sekundær bandage. Vælg af bandage afhænger af eksudatniveauet.
4. Fastgør (eller tildæk) med en klæbende eller anden egnet bandage.

#### Skift og fjernelse af bandage:

Skift Exufiber-bandagen, når den er helt mættet, ved tegn på lækage eller i henhold til klinisk praksis. Exufiber kan blive siddende i op til syv dage (14 dage på donorsteder) afhængigt af sårets tilstand og de kliniske retningslinjer.

1. Fjern den sekundære bandage, og bortskaf den på en passende måde.
2. Fjern Exufiber-bandagen ved forsigtigt at rense/skylle den, hvis det er påkrævet. Al materiale, som ikke er omgivet af gel, vil blive fugtigt, når det kommer i kontakt med væske.
3. Hvis bandagen tørrer ud og er svær at fjerne, bør den fugtgøres med en saltvandsopløsning eller med vand i henhold til klinisk praksis, og den skal derefter have lov til at ligge i blød, indtil den er let at fjerne. Der kan gå flere minutter, inden Exufiber dannes en gel. Fjern bandagen ved forsigtigt at rense/skylle den.