

# TRACHIWIPE®

## No Sting Skin Barrier

### INSTRUCTIONS FOR USE

KAPITEX®

DA DANSK

#### Brugsvejledning:

- Rens området omkring tracheostomien, og sørg for, at det er tørt.
- Fjern Trachi-Wipe fra folieposen, og aftør huden omkring tracheostomien så vel som området, der dækkes af basispladen, hvis en sådan anvendes.
- Applicér basispladen efter behov.

#### Advarsler:

- Må ikke anvendes, hvis emballagen eller vådservietterne viser tegn på skade.
- Må ikke steriliseres før brug.
- Kun til brug på huden omkring tracheostomien. Tracheostomien må ikke aftørres indvendigt.
- Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, da det udgør en risiko for infektion.
- Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af utilsigtet kontakt skylles øjnene godt med vand.
- Må ikke anvendes på brudt eller beskadiget hud eller slimhinder.
- Brug én Trachi-Wipe pr. bruger. Trachi-Wipe må ikke anvendes på andre brugere.
- Patienter med overfølsom hud bør tale med en sundhedsprofessionel før brug.
- Må ikke anvendes, hvis du er overfølsom eller har kendte allergier over for indholdsstofferne.
- Undgå dyb indånding af opløsningsmidlet under applicering, og vær forsigtig med at sikre, at væsken ikke kommer ind i stomien.
- Hvis der er tegn på ubehag, eller der opstår irritation, skal du straks ophøre med brug. Hvis symptomerne vedvarer, skal du tale med en sundhedsprofessionel.

58

DANSK DA

- Meget brandfarlig. Må ikke placeres eller opbevares i nærheden af en tænd-/forbrændingskilde.
- Produktet må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

#### Information til nye brugere:

- Hvis du anvender Trachi-Wipe, vil det hjælpe med at beskytte huden omkring stomistedet mod sekreter ved at skabe en barriere mellem huden og basispladerne.

#### Bortskaffelse:

- I almindeligt husholdningsaffald i et hjem og klinisk affald i et sundhedsmiljø.
- Må ikke skylles ud i eller kasseres gennem kloaksystemer.

#### Opbevaring og håndtering:

- Opbevares på et køligt og tørt sted, beskyttet mod sollys.
- Meget brandfarlig. Må ikke placeres eller opbevares i nærheden af en tænd-/forbrændingskilde.

#### Kontakt en sundhedsprofessionel:

- Hvis du er usikker på, hvordan anordningen skal bruges selv efter at have læst brugsvejledningen, eller du oplever hudirritation af nogen art.

#### Indberetning af en alvorlig hændelse:

- Tag kontakt til Kapitex Healthcare Ltd og den relevante myndighed i det brugsland.

#### Indholdsstoffer:

Cyklometikon 5, trimetyleret silica, hexametyldisiloxan.

59