

# SenSura<sup>®</sup> Mio



# SenSura<sup>®</sup> Mio Convex

1-dels tømbar ileostomipose

Stomipleje



## Brugsvejledning

23324194 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. ©

Velcro<sup>®</sup> tilhører Velcro Industries B.V.

2020-08-20

## Erklæret formål

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

## Indikationer

Produktet er indiceret til personer med stomi.

## Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Oparbejdning, rensning, desinfektion og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

## Forholdsregler

For korrekt brug skal du kontakte din sundhedsperson, inden du begynder at bruge et Convex-produkt.

## Information

Stomipose til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik stregkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.


## Særlige opbevaringskrav

Produktet skal opbevares horisontalt.


Må ikke udsættes for sollys.

## Anvendelse


### Forberedelse

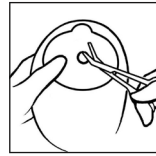


Følg klippeguiden på klæberen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

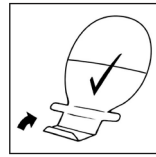


Læg posen på et fladt underlag med klæberen nedad. Luk udløbet ved at folde den nederste del af udløbet op tre gange, indtil Velcro<sup>®</sup>-strimlen bliver synlig.

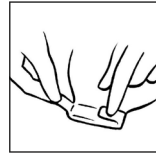


Fold de to turkise ører ind over Velcro<sup>®</sup>en.

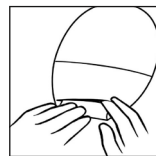

Udløbet kan skjules på to måder. Enten ved hjælp af Velcro<sup>®</sup>-punktet lige over udløbet eller Velcro<sup>®</sup>-punktet midt på posen.

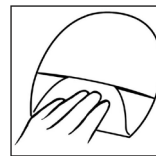

(Det gælder ikke for de transparente poser, hvor der ikke er et Velcro<sup>®</sup>-punkt midt på posen).

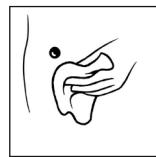


Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt ren, inden klæberen påsættes.

### Påsætning



Placér tommelfingeren på det hvide aftagningsøre (på den klæbende del) og træk i den turkise afmærkning på beskyttelsesfolien.

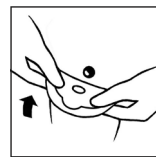

Tilpas den klæbende overflade omkring stomien og tryk den godt fast på huden.


Klæberen skal sidde tæt omkring stomien. For at forhindre lækage er det vigtigt at sikre en tæt vedhæftning omkring stomien, ved at hullet passer perfekt til huden omkring stomien. Når klæberen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at få presset klæberen godt fast til huden.

Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien samtidig med, at du presser klæberen godt fast til huden.



Tryk på posen omkring stomien for at sikre, at posen sidder godt fast.

## Tømning af posen

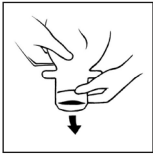


Åbn udløbet og tøm posen ud i toiletet ved behov.



Rens udløbet, for eksempel med toiletpapir. Fold og luk udløbet igen, når du har tømt posen.

## Aftagning

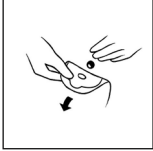


Posen fjernes langsomt og forsigtigt ved at trække i aftagningsøret på klæberen. Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

## Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug, og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.


Det må ikke skylles ud i toiletet.

## Filterlabel

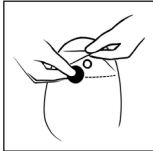

For at forhindre udslip af tarmluft kan man, om nødvendigt, sætte en af de medfølgende filterlabels på filtret.

## Bælte

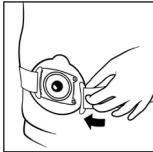

Bruger du bælte, så juster bæltets længde ved at trække i stropperne, så det passer til din krop. Det er ikke nødvendigt at fjerne stofstykket, der dækker spændet. Fastgør bæltets fire kroge i bæltets fire øjne på hver side af basispladen. Start forrest, og læg et let tryk mod maven. Træk derefter bæltets kroge væk fra samlingen, indtil de "klikker" på plads.

(Gælder kun for produkter med bælteører).

## Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

## Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Fabrikant



Se brugervejledning



Må ikke genbruges



Indikerer, at strekkoden indeholder Unik udstyrsidentifikation



Global Trade Item Number (GTIN-varenummer)



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker