



Brugsanvisning

23324250 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-09-15

Erklæret formål

Stomiposen er beregnet til passivt at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

Indikationer

Produktet er indiceret til personer med stomi.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Forbehold

For korrekt brug skal du kontakte din sundhedsperson, inden du begynder at bruge et Convex-produkt.

Information

Stomipose til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik stregkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.


Særlige opbevaringskrav

Produktet skal opbevares horisontalt.

Må ikke udsættes for sollys.

Anvendelse

Forberedelse

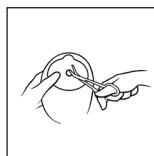

Følg klippeguiden på klæberen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.




Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt ren, inden klæberen påsættes.

Påsætning




Placer tommelfingeren på det hvide aftagningsøre (på den klæbende del) og træk i den turkise afmærkning på beskyttelsesfolien.

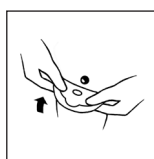

Tilpas den klæbende overflade omkring stomien og tryk den godt fast på huden. Klæberen skal sidde tæt omkring stomien. For at forhindre lækage er det vigtigt at sikre en tæt vedhæftning omkring stomien, ved at hullet passer perfekt til huden omkring stomien. Når klæberen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at få presset klæberen godt fast til huden. Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien samtidig med, at du presser klæberen godt fast til huden.




Tryk på posen omkring stomien for at sikre, at posen sidder godt fast. Husk at lukke udløbet inden brug.

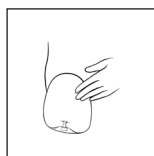

Udløbet kan skjules i lommen foran, så stomiposen er mere komfortabel og diskret.


(Gælder kun for poser med forside af gråt tekstil).

Tømning af posen

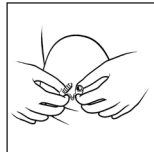

Hold proppen/enden af udløbet opad, og klem på udløbets udvendige ende. Træk proppen ud og løsn grebet om udløbet, så du kan tømme posen. Når posen er helt tømt, skal du sikre, at udløbet er omhyggeligt lukket, og proppen er sat korrekt i.

Aftagning

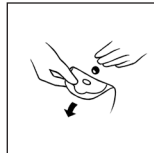


Posen fjernes langsomt og forsigtigt ved at trække i aftagningsøret på klæberen. Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug, og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.


Den må ikke skylles ud i toiletet.

Natpose

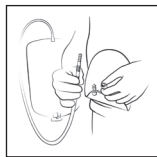

For større sikkerhed anbefaler vi, at du bruger Coloplast drænagepose til sengekanten, der er specielt designet til at blive tilsluttet direkte til din urostomi flerkammerpose. Urostomi flerkammerposer kan tilsluttes til alle typer drænageposer til sengekanten ved brug af den medfølgende konektor. Konnektorens smalle ende skubbes ind i urostomi flerkammerposens åbning, og den anden ende sluttes til drænageposen til sengekanten.

Bælte

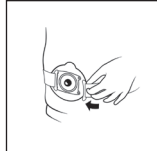

Bruger du bælte, så juster bæltets længde ved at trække i stropperne, så det passer til din krop. Det er ikke nødvendigt at fjerne stofstykket, der dækker spændet. Fastgør bæltets fire kroge i bæltets fire øjne på hver side af basispladen. Start forrest, og læg et let tryk mod maven. Træk derefter bæltets kroge væk fra samlingen, indtil de "klikker" på plads.

(Gælder kun for produkter med bælteører).

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Varenummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik udstyrsidentifikation



Global Trade Item Number (GTIN-varenummer)



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker