

Anvendelsesområde

Neria™ soft 90 anvendes til subkutan infusion af lægemidler, der enten administreres ved hjælp af en ekstern pumpe eller som bolusinjektion. Neria™ soft 90 anvendes til patienter, hvor peroral og/eller rektal medicinering ikke optages optimalt eller giver tilstrækkelig symptomlindring.

Neria™ soft 90 tilbydes i flg. størrelser:

neria™ soft 90

Produktbeskrivelse

neria™ soft 90 infusionssæt 27G, 6 mm sikkerhedskanyle, 30 cm slange	Varenr. 722030-5226
neria™ soft 90 infusionssæt 27G, 9 mm sikkerhedskanyle, 60 cm slange	722060-5229
neria™ soft 90 infusionssæt 27G, 6 mm sikkerhedskanyle, 60 cm slange	722060-5226
neria™ soft 90 infusionssæt 27G, 9 mm sikkerhedskanyle, 110 cm slange	722110-5229

Varenr.

Vær opmærksom på at
slangevolumen afhænger
af slangelængde:

30 cm slange:	0,05 ml
60 cm slange:	0,10 ml
110 cm slange:	0,18 ml

Anlæggelse

Der skal være skærpet opmærksomhed, hvis der anvendes flere forskellige medikamenter samtidigt, og om der i så fald kan være risiko for kontraindikationer eller krystallisering. Hvis der er risiko for krystallisering, skal der anvendes flere subkutane nåle/porte. Ved tvivl kontakt den ordinerende myndighed eller det lokale apotek.

1. Nålen placeres et centralt sted på kroppen med god blodcirkulation. Der må ikke være ødem/lymfødem, og huden skal være intakt og uden behåring. Undgå at anlægge den subkutane kanyle i hudfolder, ved knoglefrem-spring eller i nærheden af led. **Optimalt anlægges den subkutane nål på brystkasse, mave, overarm eller yderside af låret.** Hos konfuse patienter eller patienter der vil seponere nålen, kan det være en fordel at anlægge nålen på ryg eller skulder, eller andet passende sted uden for patientens rækkevidde. Der anvendes samme hygiejniske principper og teknik som ved anden subkutan injektion.
2. Slangen primes med ordinerede medicin eller isot. NaCl og proppen påsættes afslutningsvist.
 - a) Medicinindgift: Inden indgift af medicin fjernes proppen og luerlocken (indgiftstedet på slangen) afsprittes kortvarigt
 - b) Medicinen tilsluttes/injiceres, og proppen påsættes. Hvis der bruges forskellige medikamenter i samme subkutane kanyle, kan der med fordel skylles med NaCl mellem indgift svarende til den volumen slangen indeholder, se ovenfor
 - c) Den subkutane kanyle kan sidde i op til 72 timer

Observation af indstikssted

Indstiksstedet observeres ved hver injektion og mindst én gang i døgnet. Ved rødme, irritation, hævelse, smerter eller ved sivning af medicin ved siden af nålen skiftes kanylen. Indstiksstedet skal fornys ved hver ny anlæggelse.

Seponering af subkutan kanyle:


1. Det semipermeable plaster fjernes forsigtigt
2. Kanylen trækkes langsomt ud af huden. Hvis der er lidt sivning fra indstiksstedet påsættes der en forbindelse over kanylen
3. Luk beskyttelseshætten omkring nålen som anvist nedenfor og kasser herefter i kanylebøtte eller sammen med risikoaffald

Brugervejledning


neria™ soft 90




Infusionssættet primes.

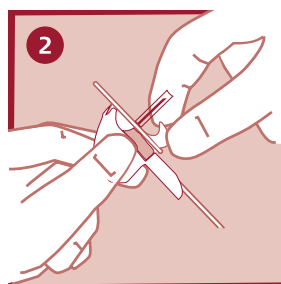


Fjern forsigtigt
bagpapiret.

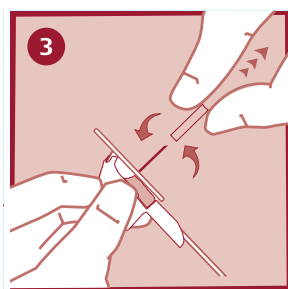


Drej og træk forsigtigt nåle-
beskyttelseshætten af.

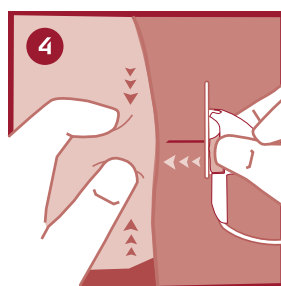


Klem huden sammen og indfør
neria™ soft 90 infusionssættet
i en 90° vinkel (vinkelret ind).
Placer som illustreret to fingre
på hver side af introducernålen,
og lad pegefingeren skubbe
nålen ind.*

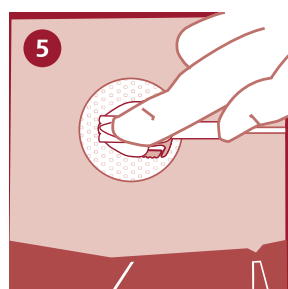


Tryk forsigtigt på toppen
af produktet, for at sikre
en komplet indføring af
bløddelsnålen.

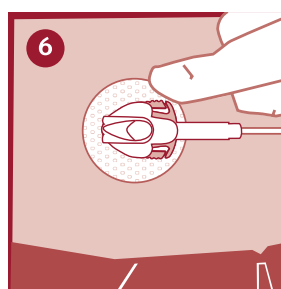


Følg klæbekanten med
fingrene for at sikre, at
plasteret hæfter godt.

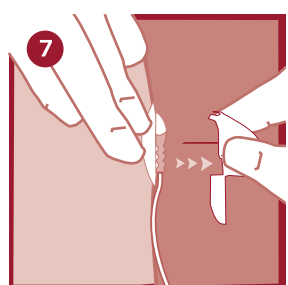

Placer to fingre på
klæbekanten og fjern
forsigtigt introducernålen
ved at trække den lige
tilbage.

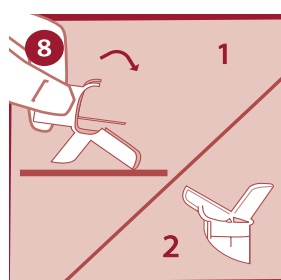

Luk beskyttelseshætten ned
over introducernålen mod et
hårdt underlag for at dække
nålen.

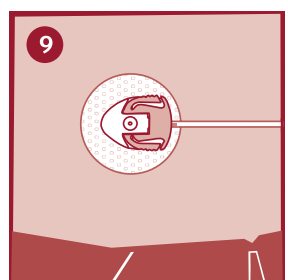

Tjek hyppigt
infusionsstedet.

Læs altid omhyggeligt
indlægssedlen før ibrugtagning.