



Rengøring af flergangs – sprøjter


TRÆK OP OG SKYL

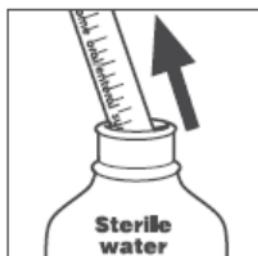

Til patienter med nedsat immunforsvar og til børn <1 år, anvendes sterilt vand.

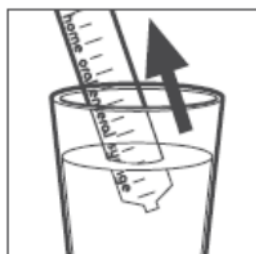


Træk postevand op eller afkølet kogt vand.

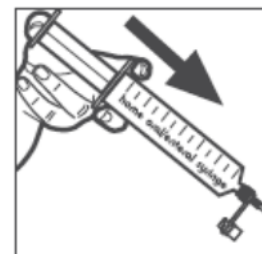


Skyl sprøjte og ernærings udstyr.

RENGØRING

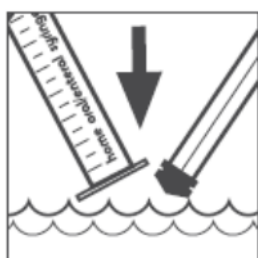

Adskil sprøjte og stempel og rengør dem i varmt sæbevand.

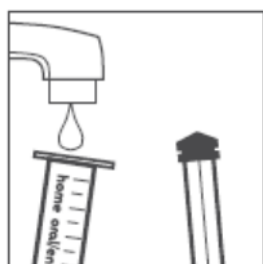


Adskilt sprøjte og stempel, skylles under kold vandhane. Tørres af med køkkenrulle. Opbevares i en tør beholder.

- Sprøjten rengøres straks efter brug.
- Kom sprøjten i varmt sæbevand.
- Sprøjten rengøres indvendigt ved at trække stemplet ind og ud indtil alle spor af ernæring eller medicin er væk.
- Adskil sprøjte og stempel og rengør omhyggeligt i varmt sæbevand .
- Skyl sprøjte og stempel i rindende vand. Ryst overflødig vand af.
- Tør med ren køkkenrulle (brug ikke viskestykke/klud).
- Sprøjte og stempel (stadig adskilt) opbevares i en ren og tør beholder med låget påsat.
- Anvend ikke rengøring i opvaskemaskine, da det forkorter levetiden af sprøjterne.
- Hvis stemplet går trægere, markeringerne bliver uklare eller sprøjten bliver beskadiget, bør den kasseres og erstattes med en ny sprøjte.

UDSKIFTES EFTER 7 DAGE



Udskiftes efter maksimum 7 dage.

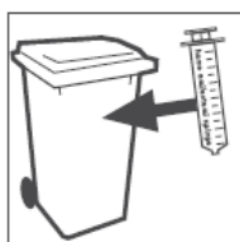

Den brugte sprøjte bortskaffes sammen med husholdnings affald.

