

Steri-Strip

Brugervejledning

Steri-Strip™



Tapesuturer

Beskrivelse:

3M™ Steri-Strip™ Tapesuturer består af et porøst, nonwoven materiale. Taperen er forstærket med længdegående tråde, og består desuden af et ikke kendt som allergent klæbemateriale.

3M™ Steri-Strip™ hudfarvet tapesutur består af et porøst, nonwoven materiale, med et ikke kendt som allergent klæbemateriale.

3M™ Steri-Strip™ Elastisk tapesutur består af et porøst, nonwoven elastisk materiale. Den er designet så den tillader ødemdannelse i vævet og kropsbevægelser, og er belagt med et ikke kendt som allergent klæbemateriale.

Anvendelsesområder:

Steri-Strip tapesutur er indikeret til brug ved sårlukning ved behandling af flånger og kirurgiske incisioner. Steri-Strip tapesutur kan også anvendes sammen med hudsuturer eller stapler eller efter at disse er fjernet, til fortsat understøttelse af såret.

Kontraindikationer:

1. Brug af Steri-Strip tapesutur over områder, hvor god fastklæbning ikke kan afstedkommes, er kontraindiceret. Mulige årsager til utilstrækkelig klæbeevne kan være eksudat, fedtet hud, fugtighed eller behåring.
2. Brug af Steri-Strip tapesutur over inficerede sår er kontraindiceret.
3. Brug af Steri-Strip tapesutur er kontraindiceret over sårområder hvor huden er meget spændt, hvorved sårkanterne ikke kan sammenholdes med lethed ved hjælp af fingrene eller pincet.

Advarsler:

1. Dannelse af postoperativ ødem kan forårsage hudbristninger, vabeldannelse eller at tapesuturens kanter løsner.
2. Applikation af enhver kirurgisk tape eller klæbende sårlukningsanordning kan resultere i hudstripping ved fjernelse.
3. Som ved enhver applikation af klæbende produkter på hud, kan hypo- eller hyperpigmentering opstå efter fjernelse hos en lille del af patienterne.
4. Ved test på sunde forsøgspersoner er der blevet påvist en lidt forøget forekomst af akne og follikulitis.

Forholdsregler:

1. Huden skal være ren, tør og fri for fedt for at sikre god vedhæftning.
2. Taperen må ikke strækkes ved applikation. Hvis tapesuturen strækkes kan dette forårsage hudbristninger, dannelse af vabler eller utilstrækkelig fastklæbning.

Brugsanvisning:

1. Rengør og tør huden. Hvis man ønsker, kan et tyndt lag benzoindråber applikeres for at forbedre fastklæbningen af tapestrimlen.
2. Åbn pakken. Tag pakken ud, og fjern stroppen fra kortets ende.
3. Tag fat i en tapestrimmel, og løft den lige opad fra kortet.
4. Når suturtaperen anvendes som den eneste sårlukningsmetode, uden suturer eller stapler, skal sårkanterne tilpasses ved hjælp af fingrene eller pincet. Placer suturtaperen på tværs over såret, og sørg for at strimlerne ikke strækkes ved applikationen.
5. Større sår skal opdeles i sektioner, således at hudens spænding bliver fordelt. Placer suturtaperen med cirka 3 mm mellemrum.
6. Yderligere suturtape kan applikeres parallelt med såret, cirka 12 mm fra sårkanterne. Dette kan nedsætte den strækkende kraft under suturtapens ender.

Levering:

1. Leveres som individuelt pakkede kort med steril suturtape.
2. Skal opbevares ved stuetemperatur. Opbevaring ved høj temperatur eller luftfugtighed skal undgås.
3. Produktet er sterilt, medmindre emballagen er uåbnet eller beskadiget.



Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget eller har været åbnet



Dette produkt og pakningen indeholder ikke naturgummilætex



Må ikke genbruges



Opmærksom, se brugsanvisningen




Fremstillingsdato

Steri-Strip™


1




2

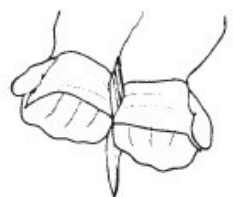

3

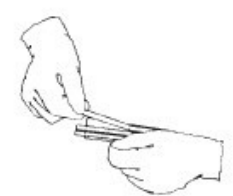

4

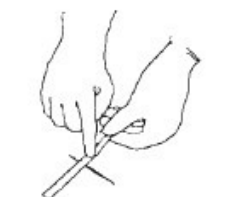

5



6

