

NÆSTE GENERATIONS DESINFEKTIONSMIDDEL



Incidin[®] OxyWipe S

Klar-til-brug rengørings-/desinfektionsmiddel med hurtigvirkende hydrogenperoxid

Det unikke indhold i Incidin OxyWipe S byder på fordelene ved en patenteret hydrogenperoxidopløsning med bredspektret virkning.

Midlet er effektivt mod et bredt spekter af bakterier og vira og efterlader ingen pletter takket være en hurtig fordamning.

Incidin OxyWipe S tilbyder:

- ▲ Sporicidal & virucidal aftørningsmiddel til alle overflader
- ▲ Hi-speed H₂O₂[™]
- ▲ Overholder EN 16615
- ▲ De aktive indholdsstoffer nedbrydes til vand og ilt
- ▲ Fremragende materiale kompatibilitet



HOVEDFUNKTION	FORDELE
EFFEKTIVT	Bredspektret effektivitet Kort kontakttid
SIKKERHED	De aktive indholdsstoffer nedbrydes til vand og ilt. Fremragende materiale kompatibilitet
NEMT	Samme middel til både rengøring og desinfektion, men i to arbejdsgange.†

† SSI anbefaler at rengøring og desinfektion udført som 2 separate procedurer, idet dette er mere effektivt til at fjerne mikroorganismene end rengøring alene, desinfektion alene eller rengøring og desinfektion i en og samme procedure.

ANVENDELSESOMRÅDE: Rengørings og desinfektionsservietter til desinfektion af rene, mindre overflader på inventar og kontaktpunkter, samt rent ikke-invasivt og ikke-kritisk medicinsk udstyr.

BRUGSANVISNING: Rengøring og desinfektion SKAL foretages i to adskilte processer.

RENGØRING: Brug en enkelt serviet og foretag grundig mekanisk bearbejdning af overfladen til overfladen er synlig ren.

DESINFEKTION: (foretages når overfladen er synlig ren.) Brug en enkelt serviet og fordel jævnt over hele overfladen. Vær sikker på at tilstrækkelig kontakttid er overholdt jf. den dokumenterede effekt, som er fundet ved de udførte EN-tests nedenfor. Lad overfladen tørre, undgå at skylle. Vær sikker på, at hele overfladen er behandlet.

Ikke til afsluttende desinfektion af invasivt medicinsk udstyr. Brug ikke på overflader, der er følsomme over for oxyderende midler såsom marmor, kobber eller messing.

MIKROBIOLOGISKE OG VIRULOGICALE TESTRESULTATER

EFFEKTIVITET UFORTYNDET		
Testet iht. RKI anbefaling 01/2004*	Rene forhold	Urene forhold
Effektiv mod indkapslede vira iht. RKI recommendation 01/2004*	-	30 sek
Euro-normer – suspension-tests		
EN 13727 (bactericid)	-	2 min
EN 13624 (gærdræbende)	-	15 min
EN 13624 (fungicid)	-	30 min
EN 14348 (tuberkulocid, mykobakteriecid)	-	30 min
EN 14476 (virucid)	-	30 min
EN 14476 Adeno	-	30 sek
EN 14476 Noro	-	15 min
EN 13704 (sporicid)	60 min	-
EN 13704 (C. difficile)	15 min	-
Euro-normer – 4-field-tests		
EN 16615 (bactericid)	-	2 min
EN 16615 (gærdræbende)	-	1 min
EN 16615** (fungicid)	-	5 min
EN 16615** (tuberkulocid, mykobakteriecid)	-	5 min
EN 16615** (sporicid)	30 min	-
EN 16615** (c. difficile)	5 min	-

* DVV 2008 ** Modificerede tests – metode EN 16615

INHOLD: 100 g Incidin OxyWipe S indeholder: 1.5 g hydrogenperoxid

PAKKESTØRRELSE OG ORDREINFORMATION

Varenr: 3082300 Incidin OxyWipe S 6x100 st
 Varenr: 10033877 Vægdispenser OxyWipe S 1 st

OPBEVARING: Produktet skal opbevares i sin originale indpakning på et tørt og køligt sted (maks. 25 °C), væk fra direkte sollys. Opbevaringstid efter åbning: 1 måned

HÅNDTER ALTID BIOCIDER SIKKERT. LÆS ALTID ETIKETTEN OG PRODUKTINFORMATIONEN FØR BRUG. KUN TIL PROFESSIONELT BRUG.