

Instruktion AmpSnap® Ampullbrytare



Gör så här:

Tryck ner valfri hylsände (ordentligt) över ampullhalsen och bryt från ev brytmarkering (rits).

Bryt, med hylsan i stadigt tvåhandsgrepp, i riktning från dig.

När du använder AmpSnap riskerar du inte att skära dig när du bryter ampuller.



Den avbrutna ampullhalsen kapslas in i hylsan och kan därmed inte skada någon annan heller. AmpSnap bör användas även när engångsfil behövs.



Glasspillet fastnar i hylsan och blir skyddat. – Utan risk vid hantering av avfallet.

Många bryter ampuller med hjälp av en kompress eller liknande. Och riskerar skada.

Svenska AmpSnap tillverkas i miljövänlig PE. Passar ampuller mellan 1-10 ml.

**Minska
risken**



**Använd
AmpSnap® Ampullbrytare
– Skyddet mot skärsår och glasbitar**