



neria™ guard infusionsæt

neria™ guard er et infusionsæt med en integreret indføringsadapter med bløddelskanyle, til enkel og nem anlæggelse ved ét tryk på en knap. En tilbagetrækningskanyle eliminerer risiko for stikskader og forbedrer patientkomforten i forbindelse med anlæggelse af den subkutane kanyle.

Produktspecifikation

Kanyle materiale: Blødt plastik

Indføringsvinkel: 90 grader (lige ind)

Frakobling: Ja.
Ved injektionsstedet

Indføringskanyle: G27

Bløddelskanyle: 0,68 mm i diameter
(~ G23)

Hudklæber: Hudvenlig non-woven polyester med akrylatklæber

Kanylesikkerhed: Ja.
Kanylen ligger beskyttet i indføringshuset før, under og efter injektionen

Indføringshus: Ja.
Indbygget i produktet


Bløddelskanyle (længde)	Infusionslange (længde)	Infusionslange (længde og slangevolumen)
6 mm	12 cm	12 cm ~ 0,04 ml
9 mm	60 cm	60 cm ~ 0,10 ml
	80 cm	80 cm ~ 0,12 ml
	110 cm	110 cm ~ 0,15 ml

neria™ guard infusionsæt tilbydes i æsker à 10 stk.
Kanyler og infusionslanger tilbydes separat i æsker à 10 stk.




neria™ guard

Anlæggelsesguide:

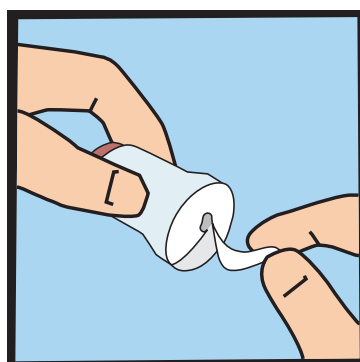


1.
Fjern forsigtig bagpapiret.

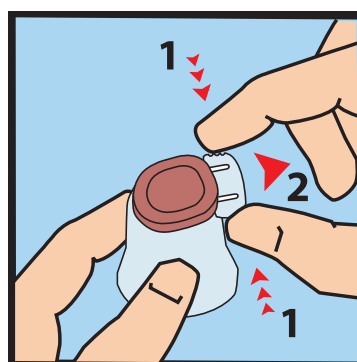


2.
Fjern beskyttelsesdækslet fra indføringshuset. Dette gøres ved forsigtigt at klemme på siderne af beskyttelsesdækslet samtidigt med at beskyttelsesdækslet trækkes lige ud.




3.
Placér indføringshuset på huden og tryk den røde aktiveringsknop helt i bund for at indføre infusionskanylen.

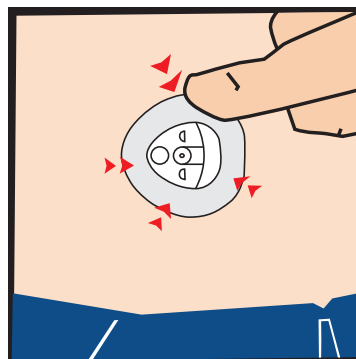

4.
Følg klæbekanten med fingrene for at sikre, at plasteret hæfter godt.

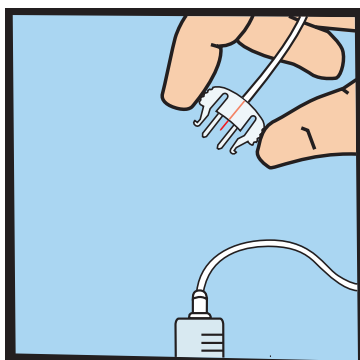

5.
Forbind pumpe eller sprøjte for at fylde (prime) slangen. Følg producentens brugervejledning.

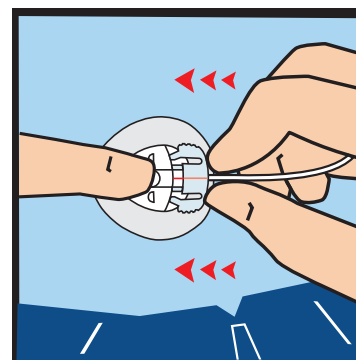

6.
Placér en finger på kanylehuset og påsæt slangekonnektoren lige ind. Der høres et "klik" når den sidder korrekt.

Bemærk venligst at denne anlæggelsesguide kun illustrerer nogle af de trin der indgår i anlæggelsen af neria™ guard infusionssæt. Guiden er dermed ikke en erstatning for at gennemlæse brugervejledningen som er vedlagt produktet.

neria is a trademark of Unomedical a/s © ConvaTec Inc. 2017 AP-016680-MM