



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Opticlude™

Produktbeskrivelse:

3M Opticlude skeleplaster består af et blødt kompres og et lysebrunt rygmateriale med hudvenligt klæbestof. Skeleplasteret lader huden ånde og tilpasser sig øjen-omgivelserne.

Indikationer:

Anvendes til behandling af skelen. Målet med behandlingen er at tvinge det skelende øje til at arbejde. Den mest almindelige – og mest effektive metode er, at dække det raske øje til.

Brugsvejledning:

Påsætning

1. Huden skal være ren og tør før påsætningen. Fjern beskyttelsespapiret fra skeleplasteret.
2. Luk begge øjne og hold ansigtsmusklerne afslappet. Undgå smilerynker om øjet ved påsætning.
3. Påsæt Opticlude skeleplaster med den smalle del mod næsen. Plasteret og huden må ikke strækkes.
4. Opticlude skeleplaster sidder bedre når man efterfølgende gnider det let.

Fjernelse

Løsn yderkanten af plasteret og træk det forsigtigt af (180°) ind mod næsen.



Deklaration:

Micropore tape: Rayon viskose med brun pigment og acrylat klæber

Pude: Rayon fibre

Holdbarhed og opbevaring:

Tørt ved stuetemperatur. Holdbarhed: 5 år efter produktionsdato.

Bestillingsinformation:**3M Opticlude**

Varenr.:	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
1537 mini	5 x 6 cm	20	24
1539 maxi	5,7 x 8 cm	20	24

DS52/000039-4