


QUICKVUE

In-Line[®]

Strep A TEST

- * **Se nøje efter!** Dette er et positivt resultat. Selv ved forekomst af kun en meget svag, lyserød testlinje og en blå kontrollinje, skal svaret afgives som POSITIV. Den positive testlinje er sædvanligvis meget tydelig, men testlinjeintensiteten kan variere.
- * **Katso tarkasti!** Tämä on positiivinen tulos. Vaikka näkisit vain hyvin haalean vaaleanpunaisen testiviivan ja sinisen kontrolliviivan, tulos tulee ilmoittaa positiiviseksi. Positiivinen testiviiva on yleensä hyvin selkeä, mutta sen vahvuus voi vaihdella.
- * **Vær oppmerksom!** Dette er et positivt resultat. Selv om en meget svak rosa testlinje synes sammen med den blå kontrolljen, skal resultatet rapporteres som POSITIVT. Den positive testlinjen er vanligvis mycket framträdande, men intensiteten kan variera.
- * **Titta nog!** Detta är ett positivt resultat. Även om en mycket svag testlinje syns tillsammans med den blå kontrolljen, ska resultatet rapporteras som POSITIVT. Den positiva testlinjen är vanligtvis mycket framträdande, men intensiteten kan variera.

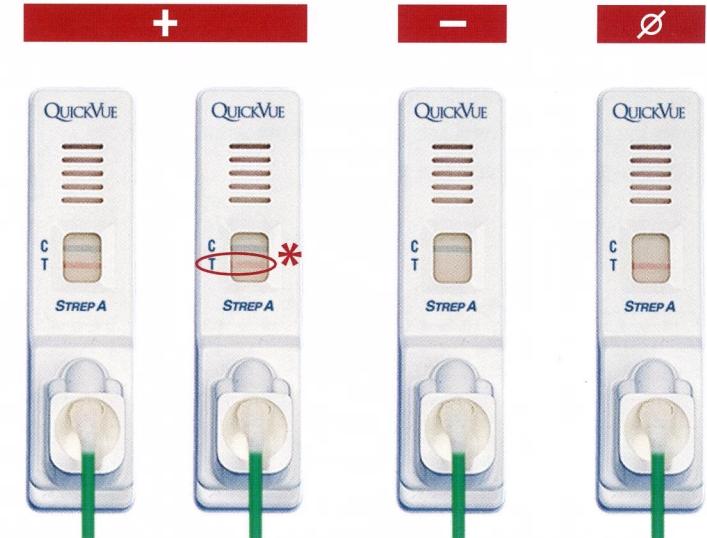

Se brugsanvisningen
Katso käyttoohjeita
Les instruksjonene for bruk
Se bruksanvisningen



Quidel Corporation
San Diego, CA 92121 USA

QUIDEL[®]

QUICKVUE

In-Line[®]

Strep A TEST

PROCEDUREKORT PIKAOHJE PROSEDYREKORT BILDBESKRIVNING


1

Skal anvende podepindene i kittet


Käytä pakkauksessa toimitettuja näytepukkoja

Prøvetakingspinnene som medföljer utstyrspacken **må** benyttes

Provtagningspinnarna i kitet **måste** användas

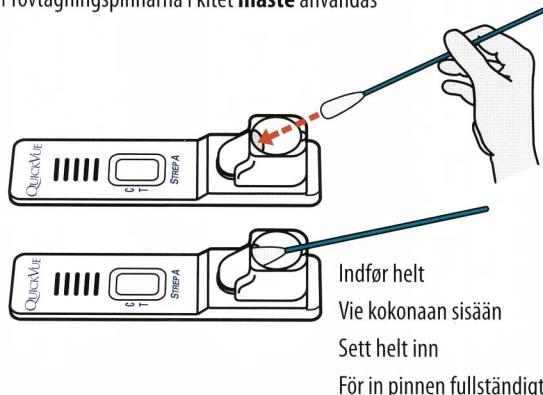

2

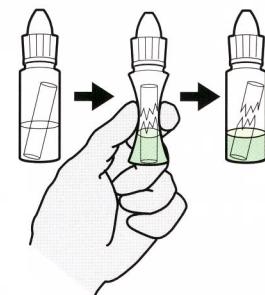


Pres **én gang** for at brække
Purista **kerran** rikkoaksi
Press hardt **én gang** for å bryke
Kläm **en gång** för att bryta sönder

3



Ryst
Ravista
Rist
Skaka

4

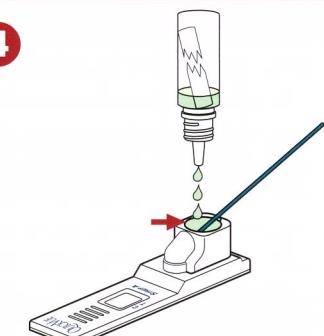

Tag hætten af. Hold flasken lodret og fyld hurtigt kammeret til kanten (ca. 8 dråber).

Poista korkki. Täytä kammio nopeasti reunaan asti (noin 8 tippaa).

Ta av skrukorken. Hold ampullen vertikalt og fyll kammeret raskt til kanten (ca.8 dråper).

Ta av skruvkorken. Håll ampullen vertikalt och fyll kammaren snabbt till kanten (ca 8 droppar).

Hvis væsken ikke har bevæget sig hen over resultatvinduet på 1 minut, skal podepinden fjernes helt og indføres på ny.

Jos liuos ei ole liikkunut tulosikkunan poikki 1 minuutin kuluessa, ota puikko kokonaan pois ja vie se uudelleen sisään.

Hvis væsken ikke har beveget seg over resultatfönstret i løpet av 1 minutt, fjern prøvetakingspinnen fullstendig og sett den inn på nytt.

Om vätskan inte har rört sig tvärs över resultatfönstret på 1 minut, ta bort provtagningspinnen helt och sätt in den igen.