

ANVENDELSE AF LUKKET FORMALINSYSTEM - TIL FIKSERING AF SMÅ VÆVSPRØVER

Klargøring af systemet :



1. Find det nye, ubrugte formalinsystem frem, som skal anbringes i holderen.
2. Kontrollér, at systemet er tæt og fri for skader.



3. Anbring formalinsystemet i holderen.
4. Kontrollér, at hanen er vandret (lukket), se billede nedenfor.

Anvendelse af systemet:



1. Kontrollér, at hanen er vandret (lukket).



2. Tag engangs-handsker på (nitrilhandsker er de bedst egnede).



3. Kontrollér, at væsken i formalinsystemet er farveløs, klar og gennemsigtig. Ved det mindste tegn på uklarhed eller misfarvning: **KASSÉR STRAKS SYSTEMET**, se "Affald".



4. Skru låget af, kom din prøve i glasset og træk stemplet lidt ned.



5. Skru låget på.




6. Sæt glasset op i adapteren. HUSK at dreje glasset 2-3 mm mod uret til det sidder fast. Glasset skal nu kunne hænge af sig selv.



7. Åbn hanen og sug formalin ned til prøven. HUSK, at der **ALTID SKAL** være luft tilbage i toppen af glasset.



8. Luk hanen igen. (Er der ikke nok formalin i glasset, kan stemplet trykkes lidt op, og yderligere formalin kan suges ned i glasset).

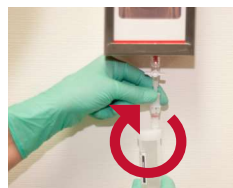

9. Drej glasset 2-3 mm med uret og tag det af adapteren.



10. Kontrollér, at hanen er vandret (lukket).
11. Tag engangs-handskerne af og kassér dem, se "Affald".

Klargøring af prøver til forsendelse:



1. Knæk stemplet af.
2. Mærk prøven med patientdata o.lign. som sædvanligt.
3. Send prøven af sted til analyse jf. arbejdspladsens procedurer for forsendelse af diagnostiske prøver.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål ring til vores kundeservice på tlf. 86 21 08 00