






Sekusept® MultiEnzyme

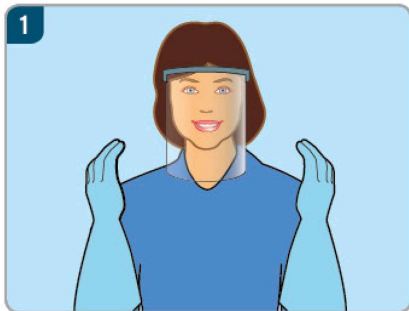

1
Anvend altid beskyttelsesmasker og handsker i henhold til hospitalets lokale bestemmelser

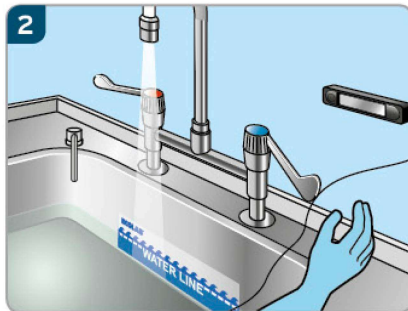


2
Fyld vand til niveaumærket. Vandtemperaturen bør helst være maks. 35 ° C.

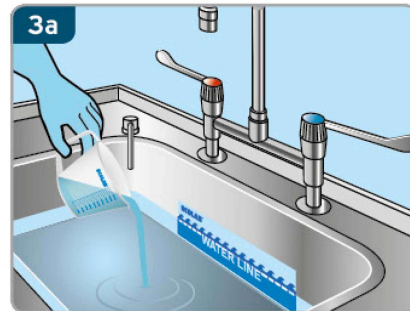


3a
Når vandet når mærket, dosér Sekusept MultiEnzyme med pumpe eller målebæger.



3b
Når vandet når mærket, afgiv Sekusept med doseringsknappen ved vasken (hold knappen nede i ca. 1 sek.)

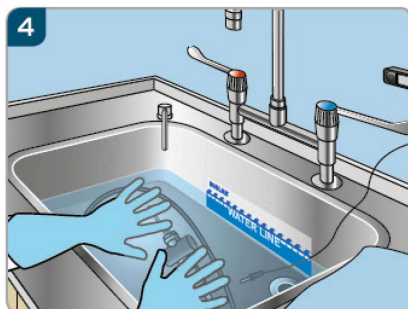

4
Sænk instrumenterne, så alle overflader er 100% tildækket. Rengør i forhold til producentens anvisninger.

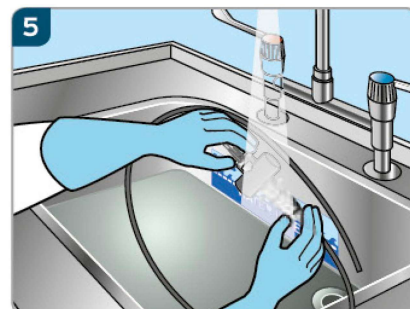

5
Skyl instrumentet grundigt med rent vand efter processen.

SKIFT AF BRUGSOPLØSNING: Anvend kun én opløsning pr. skop ad gangen. Lav ny opløsning efter hver proces.

DOSERING

Den anbefalede dosering af Sekusept MultiEnzyme er 3-20 ml. pr. liter vand. Den automatiske pumpe er kalibreret til at give præcis mængde middel i forhold til tilsatte vandmængde.

Vask eller beholder

Vandmængde til niveaumærkningen

Volumen af Sekusept tilpasses vandmængde.



SERVICE

Hvis du har brug for teknisk service eller rådgivning, kontakt venligst Ecolab på 36 15 85 85.



ARTIKELNUMMER

SEKUSEPT® MULTIENZYM 6L
3046640
SEKUSEPT® MULTIENZYM 4X2L
3046620

ECOLAB ApS
Høffdingvej 36
2500 Valby
Danmark
+45 36 15 85 85
www.ecolab.com

CE 0297

ECOLAB®