

# SenSura<sup>®</sup> Mio Kids

1-dels tømbar ileostomipose

Stomipleje



## Brugervejledning

23327407 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-04-13  
Velcro<sup>®</sup> tilhører Velcro Industries B.V

## Tilsligtet formål

Stomiposen er beregnet til passivt at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

## Indikationer

For spædbørn og børn i alderen 6 måneder op til 4 år.

## Advarsler

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for barnet.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at barnet lider fysisk skade eller får en infektion.

## Forholdsregler

For at undgå, at stomien blokeres, skal du skære et hul i basispladen, så den passer præcis til stomiens størrelse og form ved hjælp af en lille buet saks. Undgå, at der kommer skarpe kanter på basispladen under tilskæringen.

## Information

Stomipose til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik strejkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.


## Særlige opbevaringskrav

Produktet skal opbevares vandret.


Bør ikke udsættes for sollys.

## Sådan anvendes


### Forberedelse

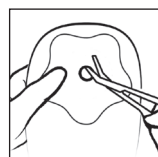


Følg klippeguiden på klæberen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. Det er vigtigt, at hullet passer nøjagtigt til stomien for at mindske risikoen for lækage, hudproblemer og skade på stomien.

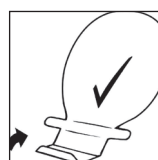

Læg posen på et fladt underlag med klæberen nedad. Luk udløbet ved at folde den nederste del af udløbet op tre gange, indtil Velcro<sup>®</sup>-strimlen bliver synlig.

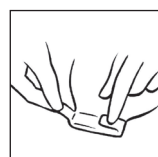


Fold de to tapper indad for at fastgøre Velcro<sup>®</sup>-stykket.

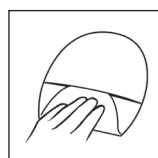

Udløbet kan skjules på to måder. Enten ved hjælp af Velcro<sup>®</sup>-punktet lige over udløbet eller Velcro<sup>®</sup>-punktet midt på posen.

(Det gælder ikke for de transparente poser, hvor der ikke er et Velcro<sup>®</sup>-punkt midt på posen.)

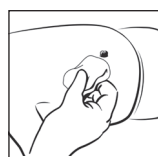

Rengør dine hænder, stomien og den omgivende hud omhyggeligt. Huden skal være helt ren, tør og fri for babypulver og olieholdige stoffer, før klæberen påføres.

### Påsætning



Træk den beskyttende film af klæberen, og bortskaf den på forsvarlig vis uden for børns rækkevidde.



Placer klæberen omkring stomien, og tryk på klæberen for at sikre, at den hurtigt klæber fast, og at der opnås en perfekt pasform mellem den klæbende overflade og huden omkring stomien.


For at forebygge tilskadekomst skal det sikres, at klæberen ikke berører stomien.

Når der trykkes på klæberen/posen på underlivet, skal du begynde i området omkring stomien og trykke den klæbende overflade let ind mod huden. Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien for at sikre, at klæberen er helt vedhæftet. Glat klæberen ud. Start ved stomien og glat udad mod kanterne for at sikre, at klæberen har fuld kontakt med huden.



Tryk på posen omkring stomien for at sikre, at posen sidder godt fast.

## Tømning af posen

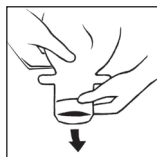

Åbn udløbet og tøm posen ud i toilettet ved behov.



Rens udløbet, for eksempel med toiletpapir. Fold og luk udløbet igen, når du har tømt posen.

## Aftagning




Fjern forsigtigt posen ved at trække aftagningsfligen på klæberen væk fra huden og langsomt rulle klæberen nedad. Tryk let på huden med din frie hånd for at lette aftagningen.

## Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toilettet.

## Filterlabel

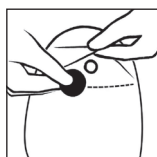

For at forhindre udslip af tarmluft kan man, om nødvendigt, sætte en af de medfølgende filterlabels på filtret.

## Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.

## Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugervejledning



Må ikke genbruges



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik enhedsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker