

LoFric[®]
Hydro-Kit™



Sådan anvender du LoFric Hydro-Kit



LoFric.dk

Viden og inspiration
til alle

wellspect
HEALTHCARE

Sådan anvender du LoFric Hydro-Kit

- 1** Hold produktet lodret. Fold vandposen og klem til. Lad nu vandet løbe ned til kateteret.
- 2** Vask dine hænder med vand og sæbe, og forbered dig til kateteriseringen. Mens du forbereder dig, bliver kateterets overflade vandmættet (30 sekunder).
- 3** Vend produktet om, så vandet løber ned i opsamlingsposen.
- 4a - b** Riv over ved riveslids A for at afdække kateterspidsen. Riv derefter ved riveslids B. Brug nu sektion B som hjælp til håndtering af kateteret (dette er især praktisk ved de lange herrekatetre).

Kateterisér nu på normal vis.
- 5** Efter kateterisering, skub det brugte kateter tilbage i opsamlingsposen.
- 6** Bind en knude for at forsegle posen.
- 7a - b** Brug riveslidsen på opsamlingsposen og tøm posens indhold ud.

Gode råd

Tip! For at tilsi­k­re tæt forse­g­ling mellem kateteret og opsamlingsposen inden kateterisering: Træk forsigtigt kateteret ud af pakningen indtil konnektoren kommer til et stop.

Tip! Efter kateterisering, kan du bortskaffe opsamlingsposen og kateteret separat ved at anvende riveslids C.

NB! LoFric® Hydro-Kit™ er udelukkende til engangsbrug. Vandposen indeholder sterilt vand, der kun bør anvendes til aktivering af LoFric.

RIK & nedre toilette

Vask dig forneden én gang dagligt med vand og mild sæbe. Yderligere afvaskning er kun nødvendig ved synlig forurening.

Husk at vaske dig forfra og bagud mod endetarmen, og ved toiletbesøg at tørre dig forfra og bagud.

Det er vigtigt at du holder dig ren – så undgår du nemmere urinvejsinfektioner. Omvendt kan overdreven vask fjerne de naturlige bakterier, som beskytter mod infektion.



