
da | Brugsanvisning

Produktbeskrivelse:

Debrisoft® Pad er fremstillet af polyæsterfibre og er forsynet med et lag polyacrylat på bagsiden samt en gråbelomme af polyester, polyamid og elastan. Hvert enkelt produkt er indpakket og EO-steriliseret. Debrisoft® Pad kan kun anvendes én gang og må ikke resteriliseres. Produkterne er sterile, så længe emballagen er uåbnet og ubeskadiget.

Tilsligtet anvendelse:

Debrisoft® Pad anvendes til hurtig, effektiv, sikker og næsten smertefri debridering. Derudover kan Debrisoft® Pad anvendes til absorption af eksudat, henfald af død væv og keratoser under debrideringen og skåner intakt væv.

Indikationer:

Debrisoft® Pad egner sig til akutte eller kroniske, overfladiske sår samt til huden omkring såret:

- diabetiske sår
 - arterielle og venøse sår
 - tryksår
 - postoperativ sekundær heling af sår
 - traumatiske eller kirurgiske sår (fx hudafskrabninger, incisioner, lacerationer)
 - forbrændinger og skoldninger (3. grad: efter kirurgisk debridering)
 - lymfedømer
- Egnet til tør, pergamentagtig, hyperkeratotisk, seborroisk eller fedtet, sund eller beskadiget hud.

Bemærk:

Debrisoft® Pad giver også et særdeles godt resultat ved kraftige keratotiske, nekrotiske belægninger, hvis disse forinden behandles autolytisk.

Bivirkninger:

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme uforlidelighed med huden.

Anvendelse:

1. Debridering af såret:
 - a) Åbn indpakningen på det dertil beregnede sted - fig. 1.
 - b) Opblød Debrisoft® Pad i fx dest. vand eller saltvandsopløsning NaCl 0,9 %, jvf. nationale retningslinjer (anbefalet mængde til fugtning: ca. 20-40 ml) - fig. 2.
 - c) Brug den bløde side med fibrene på den gennemfugtede Debrisoft® Pad til at rense såret med et forsigtigt tryk - fig. 3.
 - d) Smid den brugte Debrisoft® Pad ud - fig. 4.
2. Efter debrideringen anlægges en ny sårforbinding.
3. Ved sår skal man desuden være opmærksom på følgende:
 - a) Fjern den gamle sårforbinding før debridering.
 - b) Til huden omkring såret anvendes en ny Debrisoft® Pad.

Forsigtighedsregler:

- Debrisoft® Pad er ikke egnet til anvendelse på såret over længere tid.
- Produktet må ikke anvendes, hvis patienten har intolerance eller allergi over for et eller flere af indholdsstoffene.
- Der må ikke klippes i Debrisoft® Pad.