


ALLEVYN® Gentle



DK

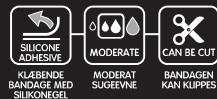

Beskrivelse

ALLEVYN® Gentle er en klæbende bandage med silikonegel, der leverer et optimalt fugtigt sårhelingsmiljø til moderat til kraftigt væskende sår. Den absorberende pude består af hydrocellulært skum. Det klæbende silikonelag er skånsomt, selv for sart hud, og gør den nem at påføre, omplacere og fjerne. En åndbar topfilm forhindrer bakteriel kontaminering og er vandafvisende ved anvendelse sammen med et passende sekundært fastgørelsesmateriale.

Indikationer

Sårbehandling af overfladiske, granulerende sår, kroniske og akutte væskende sår, inklusive fuld- og delhudssår

- bensår
- diabetiske fodsår
- operationssår
- første- og andengradsforbrændinger
- donorsteder for hudtransplantation
- rifter
- tryksår

Forholdsregler

- Anvend ikke sammen med oxideringsmidler som f.eks. hypokloritopløsninger (f.eks. EUSOL) eller hydrogenperoxid, da disse kan reducere bandagens sugsevne.
- Hvis der forekommer rødme eller øget følsomhed, skal brugen afsluttes.
- Kun til engangsbrug. Hvis den anvendes til mere end én patient, kan der forekomme krydskontaminering eller infektion.
- Når posen er åbnet, må ubrugte bandager ikke beholdes til brug på et senere tidspunkt.
- Brug altid ren teknik ved påføring
- Hvis produktet anvendes på inficerede sår, skal infektionen kontrolleres og behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer

Yderligere oplysninger


Kan bruges sammen med INTRASITE® Gel til nekrotiske sår eller sår med dødt væv. Kan klippes, så den passer til vanskelige områder – brug altid ren teknik, når der klippes i bandagen. Posens mål er kun vejledende, og der skal udvises forsigtighed for at undgå krydskontaminering.

Du kan få mere at vide på: www.allevyn.com


Brugsanvisning



1. Rens påføringsstedet. Sørg for, at den omgivende hud er ren, tør og fri for kraftig hårvækst.

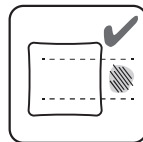

2. Vælg en passende bandagestørrelse. Sørg for, at bandagen dækker hele det sårområde, der skal beskyttes.

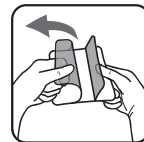

3. Fjern den første beskyttelsesfilm, og fastgør den klæbende side af bandagen til huden ved brug af ren teknik.



4. Fjern tilbageværende beskyttelsesfilm med ren teknik.




5. Glat den ud. Sørg for, at bandagen dækker såret. Stræk ikke bandagen. Bandagen kan omplaceres efter behov.



6. Fastgør med sekundært fastgørelsesmateriale, f.eks. OPSITE® Flexifix filmbandage, OPSITE® Flexifix Gentle filmbandage, tape eller kompressionsterapi.

Hyppighed af bandageskift

I de tidlige faser af behandlingen skal bandagen kontrolleres ofte. Bandagen kan sidde i op til syv dage. Bandager skal skiftes afhængigt af såret og den omgivende huds tilstand, eller når eksudatet er under 1,5 cm fra bandagens kant. Nedenstående diagram er kun vejledende, og en beslutning om skift af bandage skal tages på baggrund af en klinisk vurdering og lokale protokoller:

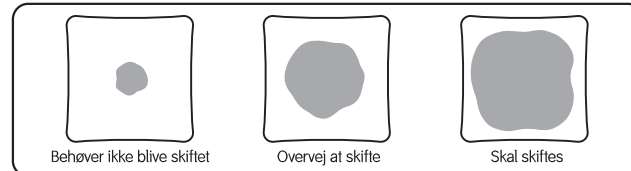

Fjernelse: Løft et hjørne, og træk langsomt tilbage, indtil den er fjernet helt.

Produktvarianter

Varenr.	Størrelse	Bestillingsenhed
66802128	5cm x 5cm	Æske med 10
66802129	10cm x 10cm	Æske med 10
66802130	10cm x 20cm	Æske med 10
66802131	15cm x 15cm	Æske med 10
66802132	20cm x 20cm	Æske med 10
66802133	20cm x 50cm	Æske med 2

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England.

©Varemærker tilhørende Smith & Nephew ©Smith & Nephew
Udstedelsesdato 08/2020



Det Grønne Punkt



Steriliseret med ethylenoxid



Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget



Må ikke genbruges



Læs brugervejledningen



Forsigtig



Opbevares tørt (under 25°C/77°F)



Må ikke udsættes for sollys