


Markedets mindste trådløse ultralydsscanner!

- ✓ Høj billedkvalitet
- ✓ Let at betjene

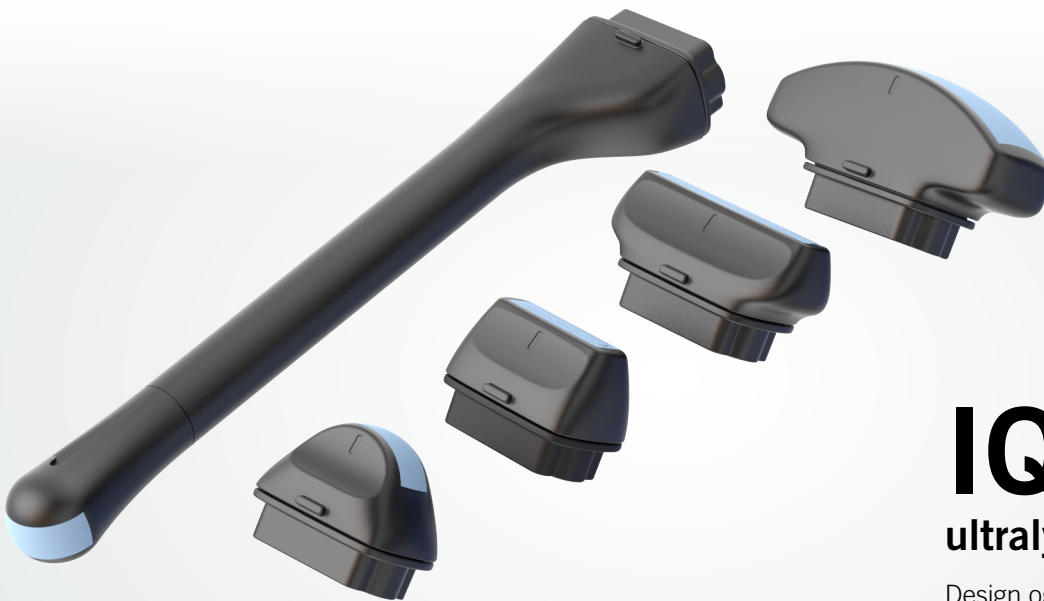

IQ-Q7 ultralydsscanner

Design og innovation mødes med
simpel og intuitiv brugerflade



Kontakt din lokale konsulent for mere information og få mulighed
for gratis at afprøve systemet i din praksis.

Hvad kan vi bruge ultralyd til i klinikken?

IQ-Q7 ultralydsscanneren gør det nemmere og hurtigere at diagnosticere ved hjælp af visualisering i realtid, og det kan læres på kort tid.

Diagnosticeringsområderne omfatter bl.a.:

Gynækologi	Identificering af fibromyomer i uterus samt ovariecyster, måling af endometrietykkelse, kontrol af spiralplacering (IUD).
Obstetrik	Specialistopgave, men ved blødning tidligt i graviditeten kan man sikre, at der er en intrauterin gestationssæk, og senere, at der er et levende foster.
Kardiologi	Man kan danne sig et indtryk af hjertets symmetri, perikardieansamling samt belastning (evt. FATE). Den regelrette ekkokardiografi er en specialistopgave.
Lungemedicin	Påvisning af pleuralvæske og med lidt træning pneumothorax samt infiltrater. Øvrig lungescanning er en specialistopgave.
Kredsløb	Aorta og arterier kan undersøges for flow og flowbegrænsninger samt evt. ektasi. Venerne på benene kan undersøges for reflux (venøs insufficiens). Påvisning/afkræftelse af dyb venetrombose kræver nogen træning.
Endokrinologi	Cyster i gl. thyroidea og pancreas.
Mammasygdomme	Cyster (tømning), fibroadenomatose, malignitet. Ultralydsscanning skal altid kombineres med mammografi, men et positivt fund fremmer forløbet for patienten. Et negativt fund ved klinisk mistanke om malignitet skal medføre henvisning til kontrol i speciallægeregi.
Gastroenterologi	Galdesten samt påvisning af kolecystitis og ascites. Fokale processer i leveren kan have mange årsager, og skal kontrolleres af en specialist. Manglende påvisning af leverproces er ikke det samme som "frikendt". Lejlighedsvis kan en inflammæret appendix visualiseres med Doppler.
Urologi	Visualisering af begge nyrer, udmåling af bredde og længde samt parenkyndiameter. Påvisning af evt. hydronefrose. Volumenbestemmelse af blære før og efter tømning (residualurin). Scanning af tests er en specialistopgave.
Bevægeapparat	Scanning af inflammærede led, sener og bursae. Påvisning af belastningslæsioner i muskler, sener og led. Mulighed for præcis anlæggelse af blokade samt ultralydvejledt tømning af ansamlinger.

Mulighed for at prøve ultralydsscanneren i jeres klinik i 2 uger uden beregning!

IQ-Q7 ultralydsscanner

Varenr. 8072208

- Let at betjene og indstille på probehovedet
- Portabel og trådløs
- Intuitiv brugerflade
- Mulighed for tilkøb af yderligere 3 probehoveder
- 4 timers scanning per opladning
- Ingen abonnement
- Gratis softwareopdateringer
- Fungerer på både Windows, iOS og Android
- Vandtæt
- Vægt: ca. 160 g

Medfølger:

- 3 valgfrie probehoveder
- Gennemtestet tablet med skærm og installeret scanningsapp




Innovativ ultralydsscanner med 3 valgfrie probehoveder, tablet og opsætning...

Pris 99.990 kr.
(124.987,50 inkl. moms)



IQ-Q7 ultralydsscanner

Design og innovation mødes med simpel og intuitiv brugerflade

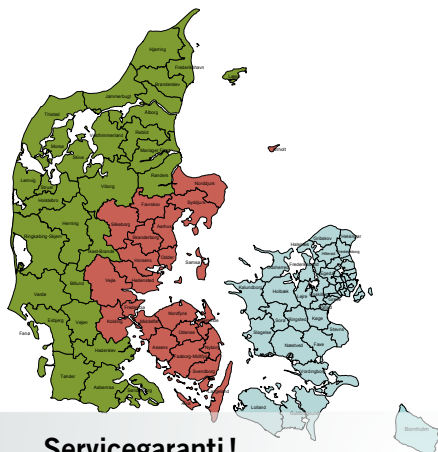

Salgskonsulent, Midt / Fyn
Claudia Bundgaard
claudia.bundgaard@onemed.com
Telefon 26 890 890



Salgskonsulent, Øst
Lonnie Marthin
lonnie.marthin@onemed.com
Telefon 28 937 045



Salgskonsulent, Vest / Nord / Syd
Henrik Christensen
henrik.christensen@onemed.com
Telefon 28 937 044

Servicegaranti!

Vi besøger dig inden for 3 hverdage, når du har brug for os...



Salgssupporter
Lene Jørgensen
praksis@onemed.com
Telefon 87 425 678



Salgschef
Kittie Hülle
kittie.hulle@onemed.com
Telefon 20 469 469

GØR DET NEMT...

Kontakt din konsulent for at tilmelde klinikken betalingservice!

Reg.nr.	Kontor:	INDBETALINGSKORT	KA71	KVITTERING
Betaling-ID og indbetaler		Kan betales i pengestiftul og på posthus		Kreditnummer og betalingsmodtager
Tilsendt til BetalingsService		Kreditnummer og betalingsmodtager		Kvittering
PBS-nr.	Deb.gr.nr.: 00001	Underskrift ved overførsel fra konto		
Kontraktnummer		Betalingsskaber		
Dag		Måned		År

Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde dig. Klik ind på www.praksisonemed.dk og se vores garantier for service og levering.

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 87 425 678
praksis@onemed.com
www.praksisonemed.dk