

Datablad



3M™ Coban™ 2-lags kompressionsbehandling

Produktbeskrivelse:

3M Coban™ 2-lags kompressionsbehandling består af 2 lag. Et komfortlag som sikrer maksimal komfort og et kompressionslag, som giver en effektiv og sikker kompression.

Begge lag er produceret af lette materialer, som hæfter på hinanden, dette betyder minimal nedglidning og normalt fodtøj kan anvendes.

Egenskaber:

- Giver en vedvarende og dermed effektiv kompression
- Stabilt og gradueret subbandagestryk
- Hurtig ødemreducering og derfor hurtigere sårheling
- Løsner sig ikke, derfor minimal nedglidning
- Komfortabelt for patienten
- Mulighed for at anvende normalt fodtøj
- Hurtig og nem at anlægge
- Kan sidde på benet i op til 7 dage

Indikationer:

- Ordineret kompressionsbehandling
- Venøse bensår
- Ankel/armindex > 0,8

Brugsvejledning:

Kompressionsbehandling er altid en lægeordineret behandling.

Komfortlaget lægges med skumlaget mod huden med cirkulær teknik og kun minimal overlappning. Hælen skal ikke lukkes. Foden holdes i en vinkel på 90° under anlæggelse.

Kompressionsbindet anlægges med fuldt stræk og med cirkulær teknik med 50% overlappning.

Hælen lukkes 2-3 gange. De 2 lag moduleres sammen med hænderne, hvorefter bindene hæfterne på hinanden og ekstra fiksering er derfor ikke nødvendig.



Deklaration:

- Skumlaget består af: Polyurethan skum, spandex. Latex-fri
- Kompressionslaget består af: Polyester fibre, spandex. Latex-fri
- Coban 2-lags kompressionsbehandling er til engangsbrug

**Bestillingsinformation****Coban™ 2-lags kompressionsbehandling**

Varenr.:	Størrelse cm x m	Antal/æske	Æsker/karton
2094	Skumlag: 10 cm x 2.7 meter Kompressionslag: 10 cm x 4.7 meter fuld stræk	1 sæt	8



3M a/s
Health Care
Fabriksparken 15
2600 Glostrup
Tlf. 43 48 01 00
www.3mhealthcare.dk

Protecting Skin. Healing Wounds.

DS53/000256-1