


KOMPRESSIONSBEHANDLING

SurePress Absorberende Vat



SurePress Absorberende Vat er beregnet til polstring og trykudjævning under kompressionsbandager

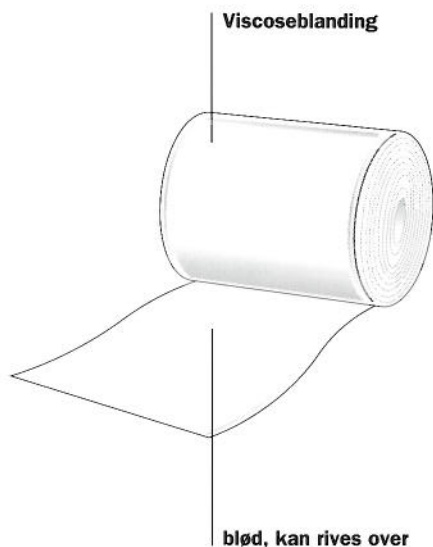

*Udjævner tryk og er komfortabel.
Beskytter hud og kompressionsbåndet mod fugt.*

SurePress Absorberende Vat

SurePress Absorberende Vat er en polstringsvat bestående af en speciel fiberblanding som gør den blød. Ved hjælp af sine egenskaber føles den også sval at have på. En speciel fordel er den absorberende evne ved lækage af sårsekret fra primærbandagen. SurePress absorberende vat kan rives over for at tilpasse længden. Ved at anvende SurePress Absorberende Vat opleves kompressionsbehandlingen mere behagelig.

Fakta om SurePress Absorberende Vat

SurePress Absorberende Vat er beregnet til engangsbrug. Vattet er fremstillet af viscosefibre i en unik blanding med gode trykfordelene egenskaber. Er pakket i plastik med 6 ruller. Hver rulle er 3 meter lang og 10 cm bred.

Opbevaring og holdbarhed

Opbevares ved rumtemperatur, tørt og svalt. Produktet kan ikke autoklaveres. Undgå stærkt sollys ved opbevaringen.

VARENUMMER


SurePress absorberende vat

Størrelse	Stk / pakn	varenummer
3 m x 10 cm	6 stk.	650948


Således anvender du SurePress Absorberende Vat



Såret bandageres med en passende bandage f. eks. en DuoDERM plade og kompletteres eventuelt med Hydrogel / Aquacel Hydrofiber bandage

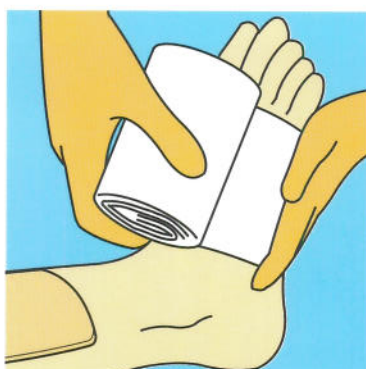


SurePress absorberende vat lægges i cirkelture fra tåbasen med cirka 50 % overlappning. Det er specielt vigtigt at polstre bag knogle prominenser ved foden.

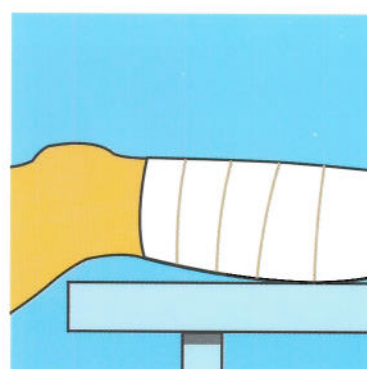


Hele benet bandageres. Vattet klippes eller rives af cirka 2 cm under knæet.



Anlæg derefter efter ordination SurePress højelastisk kompressionsbind.

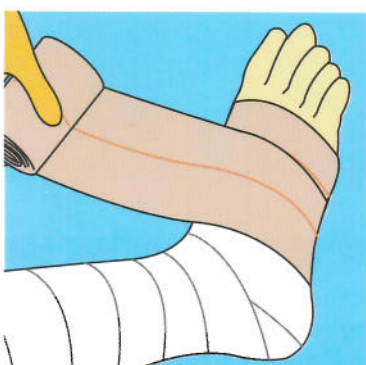

Eller anlæg efter ordination SurePress kortstræksbind.

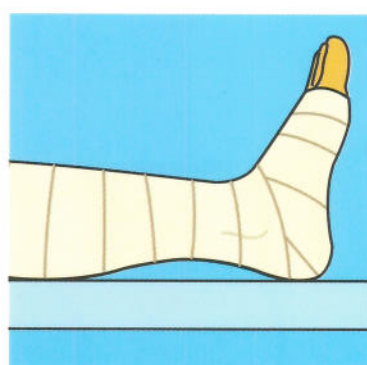

Vigtigt at man lægger bindet med fodleddet i 90° vinkel.