



Produktbeskrivelse

ComfiPression kompressionsstrømper også kaldet behandler strømper er ideelle til personer, hvis læge eller behandler har givet tilladelse til anvendelse af dette sæt i stedet for traditionelle kompressionsbandager.

Sættet består af en inderstrømpe (10 mmHg), der anbefales at have på hele tiden, samt en yderstrømpe (30 mmHg) der minimum bør anvendes i dagtimerne. Yder - og inder strømpen er lettere at tage på end flerlags standard bandager og yder gradvis kompression op ad benet med en samlet gennemsnitlig kompression på 40 mmHg ved anklen.

Indikationer for anvendelse

- Kompression af ben med venøse lidelser
- Kontrol og reduktion af ødem (hævelse) og hjælp til at opretholde et kontrolleret lymfødem
- Hjælp til at behandle og forebygge recidiverende venøse bensår
- Hjælp til at forebygge recidiv af varikøse vener

Kontraindikationer

- Diabetes patienter undtagen efter specialsthenvisning og superviseret påtagning
- Ben med store sår eller kraftigt eksudat
- Arteriesygdom ifølge vaskulær vurdering
- Et ankel arm indeks på under 0,8 (undtagen efter specialist henvisning, superviseret påtagning og regelmæssig opfølgning)
- Hjerteinsufficiens, obs.
- Små ben eller knogleprominenser
- Store eller uregelmæssigt formede ben
- Ubehandlet/ukontrolleret lymfødem
- Overfølsomhed overfor materialet i strømpen

Materiale

Inderstrømpe: 90 % nylon, 10% lycra

Kompressionsstrømpe: 75% nylon, 25% lycra

Vaskeanvisning

Anbefales skånsom vask ved max. 40 grader.

Antal vaske, ved fulgt vaskeanvisning, er ca.

100 gange uden at tabe kompressionsstyrke.

gennemsnitlig kompression på 40 mmHg ved anklen.

COMFIPRESSION



Et godt alternativ til kompressionsbandager

Høj sikkerhed for korrekt subbandagestryk

1. Stabilt tryk uanset hvem er hjælper strømpen på.
2. Hurtigere opheling af bensår.
3. Ingen anvendelse af subbandagestrykmåler.
4. Enkel opmåling.

Stor patient komfort

1. Optimal bevægelsesfrihed.
2. Almindeligt fodtøj kan anvendes.
3. Mindre afhængighed af behandlere.
4. Hurtigere sårheling.

Lettere arbejdsgange

1. Kræver ingen speciel oplæring.
2. Kan hjælpes på af alle personalegrupper.
3. Brugeren kan ofte selv tage strømpen på og af.

God økonomi

1. Besparelse på personaletimer.
2. Hurtigere sårheling.
3. Nedsat brug af sårbehandlingsprodukter.

Guide til måltagning og udvælgelse af størrelse

Strømperne har farvekoder for let og præcis udvælgelse

Mål det tykkeste sted på læggen (A), Mål lige over ankelknoglen (B)

Mål fra det bageste af hælen til den længste tå (C)

Størrelse (cm)	S	M	L	XL	XXL
	Rød tråd	Blå Tråd	Grøn Tråd	Gul Tråd	Lilla Tråd
A	30.5 - 37.5	33.0 - 40.0	35.5 - 43.0	38.0 - 46.0	40.0 - 49.0
B	19.5 - 25.5	21.5 - 27.5	22.5 - 29.5	23.0 - 32.0	23.5 - 34.0
C	20.5 - 24.0	23.0 - 26.0	25.5 - 29.5	26.5 - 32.5	26.5 - 32.5

Måltagningsguide (cm) en størrelsesangivelse vist ved en farvet tråd i yder og inderstrømpen

Varenummer	Beskrivelse	Pakning (æske)	Ref. nr.
101840	Comfipression behandlerstrømpe sæt small rød	1 sæt	CPHK01
101841	Comfipression behandlerstrømpe sæt medium blå	1 sæt	CPHK02
101842	Comfipression behandlerstrømpe sæt large grøn	1 sæt	CPHK03
101843	Comfipression behandlerstrømpe sæt xlarge gul	1 sæt	CPHK04
101844	Comfipression behandlerstrømpe sæt xxlarge lilla	1 sæt	CPHK05
1 sæt består af 1 kompressionsstrømpe og 2 linerstrømper			
101845	Comfipression behandlerstrømpe small rød	3 stk	CPLK01
101846	Comfipression behandlerstrømpe medium blå	3 stk	CPLK02
101847	Comfipression behandlerstrømpe large grøn	3 stk	CPLK03
101848	Comfipression behandlerstrømpe xlarge gul	3 stk	CPLK04
101849	Comfipression behandlerstrømpe xxlarge lilla	3 stk	CPLK05
1 æske indeholder 3 linerstrømper			

Der tages forbehold for trykfejl (januar 2016)