


# SORBACT® SURGICAL DRESSING

Infektionsforebyggende kirurgisk bandage med klæber

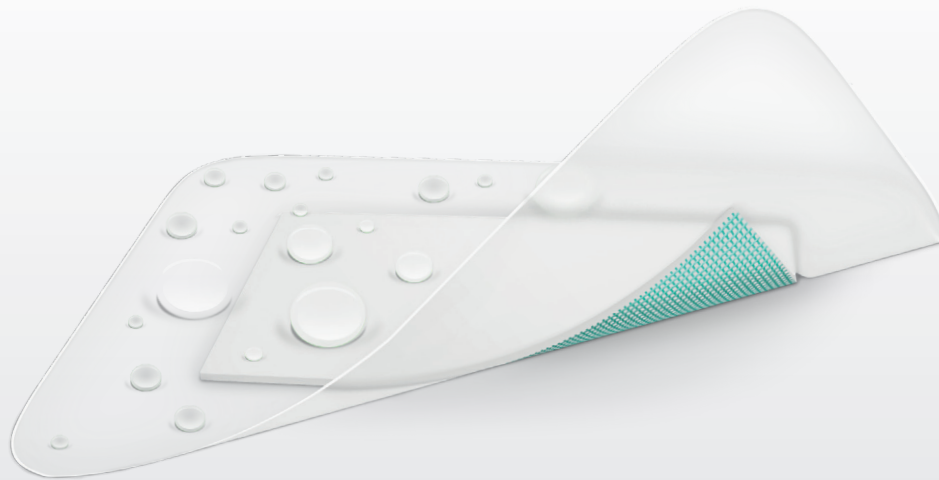

## REDUCERER SIGNIFIKANT RISIKOEN FOR POSTOPERATIVE INFEKTIONER<sup>1</sup>

*Sorbact® Surgical Dressing er en steril sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag kombineret med en absorberende sårpude og en transparent, semipermeabel, klæbende film. Sorbact® Surgical Dressing absorberer og holder på eksudat og opretholder et fugtigt sårmiljø. Den vandafvisende film beskytter mod ekstern kontaminering og lader overskydende væske fordampe.*

| Produkt                    | Varenr. | Størrelse | Str. sårpude | Stk. / æske |
|----------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|
| Sorbact® Surgical Dressing | 98140   | 5x7,2 cm  | 2,8x3,8 cm   | 100         |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98141   | 8x10 cm   | 4x5 cm       | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98142   | 8x15 cm   | 3,8x10 cm    | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98143   | 10x20 cm  | 5x15 cm      | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98144   | 10x25 cm  | 5x20 cm      | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98145   | 10x30 cm  | 5x25 cm      | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98146   | 10x35 cm  | 5x30 cm      | 20          |




## TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact® Surgical Dressing er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede sår, der er tørre eller med lavt eksudatniveau, såsom operationssår og traumesår, f.eks. rifter, snitsår og hudafskrabninger.



## BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis. Kontrollér at huden omkring såret er ren og tør.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Fjern beskyttelsesfilmen fra bandagens sårkontaktside.
5. Læg bandagen på. Sørg for at den grønne side af sårkontaktlaget er i direkte kontakt med hele såret.
6. Tryk kanterne fast på den omgivende hud.
7. Fjern den øverste stabiliserende film. Begynd ved den blå markør.

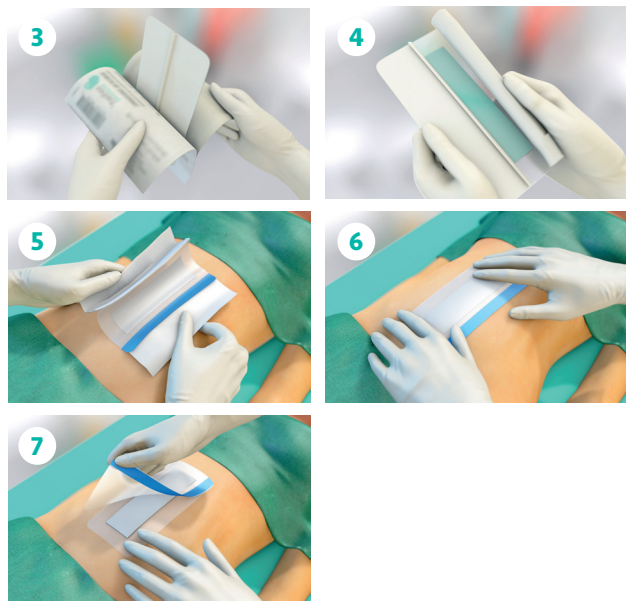

Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.

Reference: 1. Stanirowski PJ, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. *Surg Infect (Larchmt)* 2016; 17(4):427-35.

2016-93



## SORBACT® – RIGHT FROM THE START FOREBYGGER OG BEHANDLER SÅRINFEKTIONER

Sorbact® bakteriebindende bandager forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret helt naturligt. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.