

Cutimed® sorbion®

Closing wounds. Together.

**Perfekt
samarbejde**

Cutimed® sorbion®
for effektiv
sårbehandling



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15
SE-427 40 Billdal

kundeservice.dk@bsnmedical.com
www.bsnmedical.dk
Tlf.: +45 33 36 35 34
Fax: +45 33 36 35 31

70551-00002-00 05/2015

BSN medical

THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

INDHOLD

| | |
|---------|---|
| side 06 | Cutimed® sorbion® sachet S Absorberer og tilbageholder |
| side 08 | Cutimed® sorbion® sachet EXTRA Klargøring af sårbund – Vores stærkeste primære forbindelse |
| side 10 | Cutimed® sorbion® sachet multi star Klargøring af sårbund i sin mest fleksible form |
| side 11 | Cutimed® sorbion® sachet S drainage Til katetre og drænagerør |
| side 12 | Cutimed® sorbion® sachet border Hypoallergen, klæbende forbindelse |
| side 13 | Cutimed® sorbion® sachet XL Sårforbinding til behandling af omfattende sår |
| side 14 | Cutimed® sorbion® sana Atraumatisk sårforbinding – beskytter og absorberer |
| side 16 | Cutimed® sorbion® sana multi star Fleksibel, atraumatisk sårforbinding |
| side 17 | Cutimed® Atraumatisk sårkontaktlag |
| side 18 | Produktoversigt |

SORBION®

Sammen med målrettet medicinsk behandling hjælper sorbion-sårforbindinger med at lindre symptomer og forbedre livskvaliteten for patienter med akutte og kroniske sår.



RESULTATER UDEN KOMPROMISSER

HYDRATION RESPONSE-TEKNOLOGI (HRT) ER DET DESIGNKONCEPT, VI BRUGER TIL UDVIKLING OG FREMSTILLING AF DE AVANCEREDE SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER.

Vores mål er at fremstille sårbehandlingsprodukter, der leverer maksimale resultater, ved at bruge så få komponenter som muligt og udelukkende hypoallergene materialer. En af fordelene ved at bruge moderne, mekaniske fremstillingsteknikker er, at vi kan undgå brug af lim, bindemidler og klæbestoffer. Dette gør det muligt for os at udvikle særdeles biokompatible sårforbindinger til krævende anvendelsesområder, f.eks. til patienter med overfølsomhed.

Hydrokinetiske fibre er et nøgleelement ved implementeringen af dette designkoncept i vores produkter. Disse fibre danner en matrix, der er karakteriseret ved en bestemt kombination af materialer, herunder deres proportioner, densitet og masse. Produktionsprocessen involverer sammenbinding af udvalgte

cellulosefibre (A) og geldannende polymere (B) efter en speciel formel.

Ekspansionskanten, som muliggør bred kontakt med sårområdet, selv ved høj mætningshastighed, spiller også en vigtig rolle i designkonceptet.


Den bløde, fleksible polypropylenmembran er forseglet med ultralyd og kan derfor fremstilles uden brug af bindemidler eller klæbestoffer. Den har en høj væskepenetrationshastighed og kan fjernes uden at efterlade rester. Den har også høj rivestyrke, selv når den er mættet. Samtidig har de en høj MVTR (Moisture Vapour Transmission Rate).

Hypoallergent polypropylenlag, ultralydsforseglet, uden bindemidler eller klæbestoffer

Fleksibel border

Mekanisk modificerede cellulosefibre

Geldannende polymere

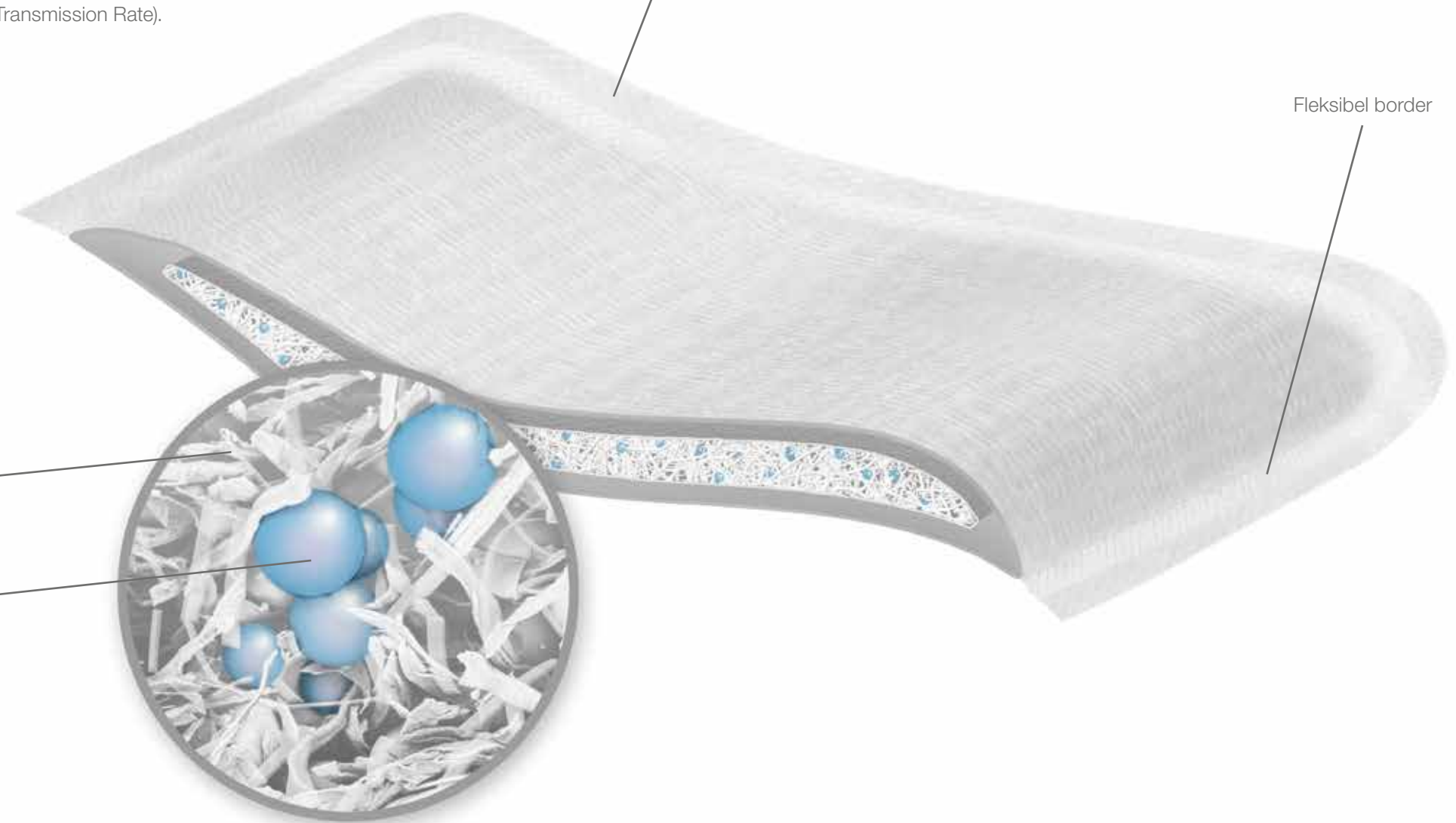

CUTIMED® SORBION® SACHET S

ABSORBERER OG TILBAGEHOLDER

Cutimed® sorbion® sachet S er en alsidig fiberforbinding, som er særdeles behagelig at have på. Forbindingen, der er beregnet til primær sårkontakt,

- absorberer sårekssudat og lukker det inde
- fjerner dødt væv
- absorberer og lukker bakterier inde i inderkernen og understøtter sårrensingsfasen
- opretholder et fugtigt sårmiljø

Indikationer

Forbindingen er velegnet til moderat til kraftigt væskende sår, herunder

- akutte og kroniske sår
- ben-, fod- og tryksår
- sårheling ved sekundær intention



PRIMÆRE FORDELE CUTIMED® SORBION® SACHET S

PROAKTIV STYRING AF EKSSUDAT

- Enestående kapacitet til sårekssudat
- Høj retention af absorberede væsker
- Skaber et fugtigt sårmiljø gennem geldannelse


KLARGØRING AF SÅRBUND

- Reduktion af fibrinøst nekrotisk væv (skånsom debridering)
- Modulation af proteaser og proinflammatoriske cytokiner
- Reducerer risikoen for krydskontaminering ved at indkapsle bakterier inde

BEHAGELIG OG SIKKER

- Lukker ekssudat sikkert inde, selv under kompressionsbehandling
- Reducerer lugt
- Lav risiko for hudirritation og overfølsomhed

Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® sachet S

|  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|---------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sachet S 7.5 x 7.5 cm | 7323200 | 10 |
| | 7323201 | 25 |
| | 7323202 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 12 x 5 cm | 7323203 | 10 |
| | 7323204 | 25 |
| | 7323205 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 10 x 10 cm | 7323206 | 10 |
| | 7323207 | 25 |
| | 7323208 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 20 x 10 cm | 7323209 | 10 |
| | 7323210 | 25 |
| | 7323211 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 15 x 15 cm | 7323212 | 10 |
| | 7323213 | 25 |
| | 7323214 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 20 x 20 cm | 7323215 | 10 |
| | 7323216 | 25 |
| | 7323217 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 30 x 20 cm | 7323218 | 10 |
| | 7323219 | 25 |
| | 7323220 | 50 |

CUTIMED® SORBION® SACHET EXTRA

VORES STÆRKESTE PRIMÆRE FORBINDING

Cutimed® sorbion® sachet EXTRA er en alsidig fiberforbinding, der er særdeles behagelig at have på. Forbindingen, der er beregnet til primær sårkontakt,

- absorberer sårekssudat og lukker det inde
- fjerner sårrester
- absorberer og lukker bakterier irreversibelt inde i inderkernen og understøtter sårrensingsfasen
- opretholder et fugtigt sårmiljø.

Cutimed® sorbion® sachet EXTRA har endnu stærkere absorption, retention og evne til at binde eksudatet end satchet S. Med sin enestående kapacitet og deraf følgende ydeevne er Cutimed® sorbion® sachet EXTRA ideel til sår, hvor behandling af sår bunden og en bestemt brugstid kræves (op til 7 dage).

Indikationer

Cutimed® sorbion® sachet EXTRA bruges til meget kraftigt væskende sår, f.eks.

- Venøse bensår/sår med forskellige sygdomsårsager
- Tryksår
- Diabetisk fodsyndrom
- Secernerende sår
- Væskende sår, der heler ved sekundær intention
- Væskende brandsår
- Purulente fistler i huden
- Akutte sår
- Postoperative sår
- Donorsteder
- Sårruptur
- Karcinom og lignende væskende sår



PRIMÆRE FORDELE CUTIMED® SORBION® SACHET EXTRA

PROAKTIV STYRING AF EKSSUDAT

- Enestående kapacitet til sårekssudat
- Høj retention af absorberede væsker
- Skaber et fugtigt sårmiljø gennem geldannelse

KLARGØRING AF SÅRBUND

- Reduktion af fibrinøst nekrotisk væv (skånsom debridering)
- Modulation af proteaser og proinflammatoriske cytokiner
- Reducerer risikoen for krydskontaminering ved at indkapsle bakterier inde

BEHAGELIG OG SIKKER

- Lukker eksudat sikkert inde, selv under kompressionsbehandling
- Reducerer lugt
- Lav risiko for hudirritation og overfølsomhed

Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® sachet EXTRA

|  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|---------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sachet EXTRA 5 x 5 cm | 7323400 | 5 |
| Cutimed® sorbion® sachet EXTRA 7.5 x 7.5 cm | 7323401 | 5 |
| Cutimed® sorbion® sachet EXTRA 10 x 10 cm | 7323402 | 5 |
| Cutimed® sorbion® sachet EXTRA 20 x 10 cm | 7323403 | 5 |
| Cutimed® sorbion® sachet EXTRA 20 x 20 cm | 7323404 | 5 |
| Cutimed® sorbion® sachet EXTRA 30 x 20 cm | 7323405 | 5 |


CUTIMED® SORBION® SACHET MULTI STAR

KLARGØRING AF SÅRBUND I DEN MEST FLEKSIBLE FORM


Cutimed® sorbion® sachet multi star kombinerer fordelene ved sorbion sachet med flere anvendelsesområder. Med den specielle form tillader Cutimed® sorbion® sachet multi star fleksibel anvendelse på steder som f.eks. tæer, hæle, fødder, korsben, bryst, armhuler, albuer eller ved dybe sår.



APPLIKATION

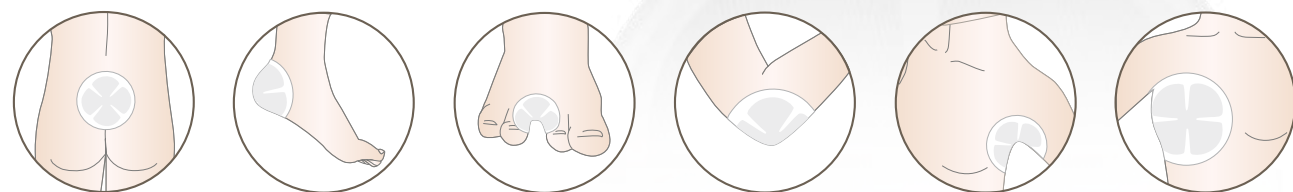

Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® sachet multi star

|  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|--------------------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sachet multi star ø 8 cm | 7323700 7323701 | 5 10 |
| Cutimed® sorbion® sachet multi star ø 14 cm | 7323702 7323403 | 5 10 |

CUTIMED® SORBION® SACHET XL

SÅRFORBINDING TIL BEHANDLING AF OMFATTENDE SÅR


Formen og størrelsen på Cutimed® sorbion® sachet XL er specialdesignet til behandling af moderat til kraftigt væskende sår, der er vanskelige at forbinde på steder som f.eks.: Underben, korsbensregion, brystkasse, lår, nedre del af abdomen.

Primære fordele Cutimed® sorbion® sachet XL

- Mere praktisk ved brug af en enkelt forbinding
- Beskyttelse mod maceration og hudirritation
- Langvarig komfort for patienten
- Nem at sætte på



Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® sachet XL

|  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|---------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sachet XL 45 x 25 cm | 7324000 | 10 |




CUTIMED® SORBION® SACHET BORDER

HYPOALLERGEN KLÆBENDE FORBINDING

Cutimed® sorbion® sachet border er en selvklæbende hydroaktiv sårforbinding til håndtering af moderat til kraftigt væskende sår. Bruges, når der er behov for hurtig og nem påsætning, uden at der gås på kompromis med de veldokumenterede fordele ved sorbion sachet S.

Primære fordele Cutimed® sorbion® sachet border

- Hurtig og nem påsætning
- Hudvenligt
- Fleksibel og åndbar
- Enestående absorption og retention

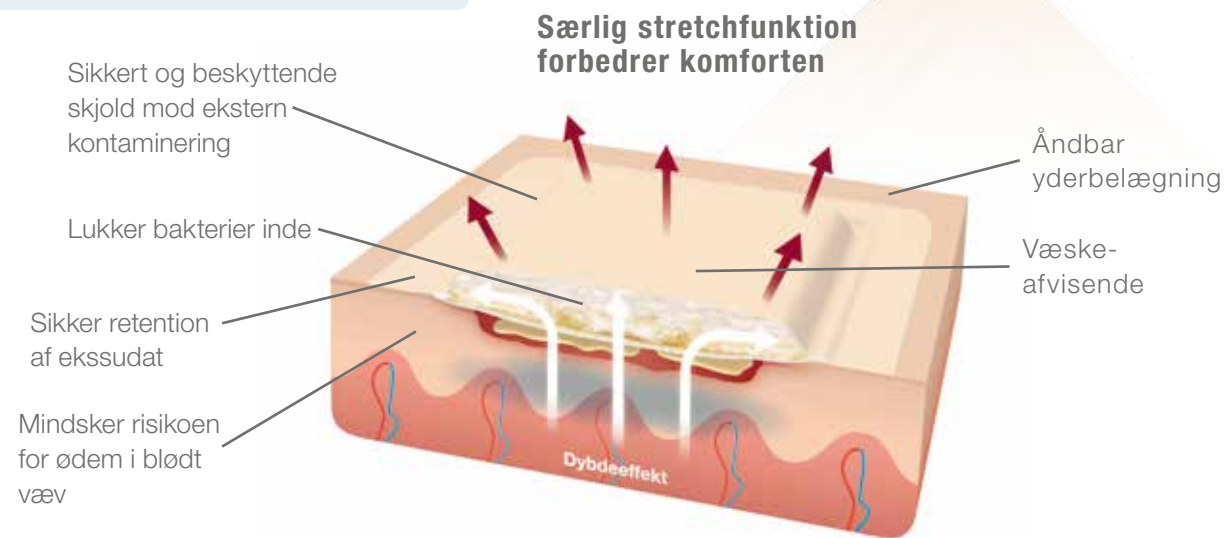

Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® sachet border

|  | Pudestørrelse | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|---------------|---------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sachet border 10 x 10 cm | 7.5 x 7.5 cm | 7323600 | 10 |
| | 7.5 x 7.5 cm | 7323601 | 25 |
| Cutimed® sorbion® sachet boder 15 x 15 cm | 10 x 10 cm | 7323602 | 10 |
| | 10 x 10 cm | 7323603 | 25 |
| Cutimed® sorbion® sachet boder 25 x 15 cm | 20 x 10 cm | 7323604 | 10 |
| | 20 x 10 cm | 7323605 | 25 |

CUTIMED® SORBION® SACHET S DRAINAGE

TIL KATETRE OG DRÆNAGERØR


Cutimed® sorbion® sachet S drainage blev især udviklet til brug sammen med katetre, drænerør osv. Det slidsede design sikrer en speciel god pasform ved drænenes udgangspunkter m.v.



APPLIKATION



Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® sachet S drainage

|  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|---------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sachet S drainage | 7324100 | 10 |
| | 7324101 | 25 |
| | 7324102 | 50 |

CUTIMED® SORBION® SANA

ATRAUMATISK SÅRFORBINDING – BESKYTTER OG ABSORBERER

Cutimed® sorbion® sana er en atraumatisk fiberforbinding til primær sårkontakt, som er særdeles behagelig at have på, og som

- understøtter autolytisk debridering
- opretholder et fugtigt sårmiljø
- fremmer vævsdannelse
- absorberer sårekssudat og indkapsler det
- giver smertefri forbindingsskift

INDIKATIONER

Cutimed® sorbion® sana er velegnet til moderat til kraftigt væskende sår, herunder:

- Cancersår
- Brandsår
- Bensår
- Tryksår
- Diabetisk fodsyndrom
- Traumesår
- Epidermolysis bullosa
- Skrøbelig hud
- Donorsteder

Cutimed® sorbion® sana er særligt velegnet til sår med en forskellig helingsproces

Primære fordele Cutimed® sorbion® sana

Binder ekssudat sikkert

- Geldannelse skaber et fugtigt sårmiljø
- Indkapsler ekssudat
- Høj retention af absorberede væsker

Beskyttelse af patient/bruger

- Hæfter ikke i såret
- Kan fjernes uden at efterlade rester
- Hudvenligt

Komfort for patienten


- Minimerer lugtgener
- Lav risiko for hudirritation og overfølsomhed
- Indkapsler ekssudatet, selv under kompressionsbehandling
- Anvendes i op til 7 dage

... og derudover indeholder sorbion sana ikke binde- midler, lim, feststoffer/paraffiner og latex.




CUTIMED® SORBION® SANA

FORDELE VED DEN TREDIMENSIONELLE MEMBRAN

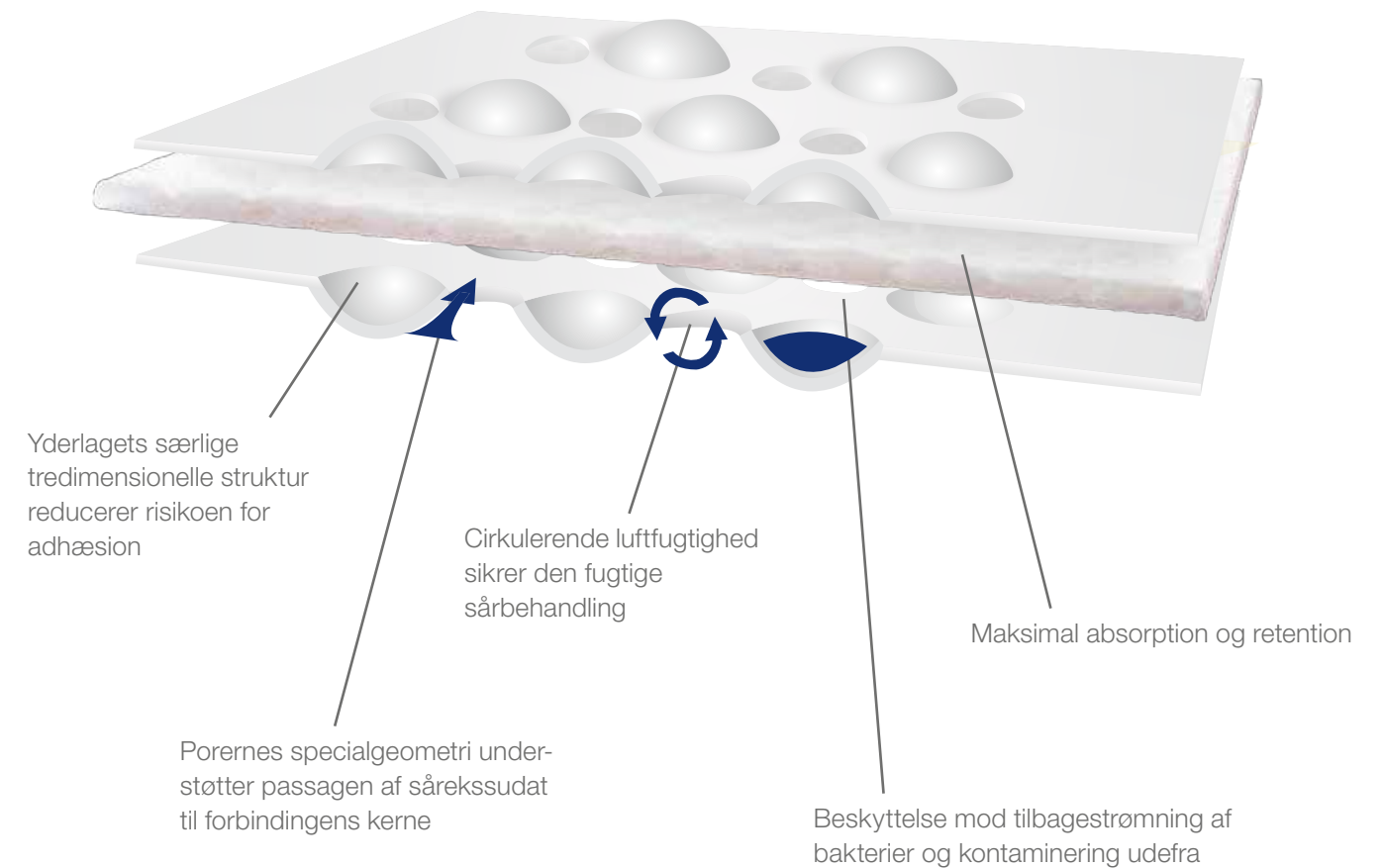

Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® sana

|  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|---------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sana 8.5 x 8.5 cm | 7323300 | 10 |
| | 7323301 | 25 |
| | 7323302 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sana 12 x 12 cm | 7323303 | 10 |
| | 7323304 | 25 |
| | 7323305 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sana 22 x 12 cm | 7323306 | 10 |
| | 7323307 | 25 |
| | 7323308 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sana 22 x 22 cm | 7323309 | 10 |
| | 7323310 | 25 |
| | 7323311 | 50 |


CUTIMED® SORBION® SANA MULTI STAR

FLEKSIBEL, ATRAUMATISK SÅRFORBINDING


Cutimed® sorbion® sana multi star kombinerer fordelene ved sorbion sana med flere anvendelsesområder. Med den specielle form tillader sorbion sana multi star fleksibel anvendelse på steder som f.eks. tæer, hæle, fødder, korsben, bryst, armhuler, albuer eller dybe sår.





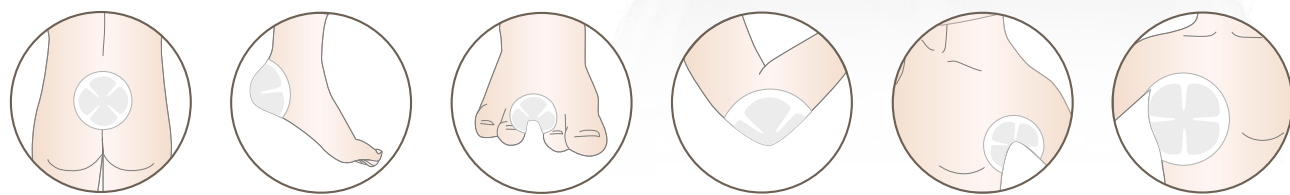

APPLIKATION



Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® sana multi star

|  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|--------------------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sana multi star Ø 11 cm | 7323800 7323801 | 5 10 |
| Cutimed® sorbion® sana multi star Ø 17 cm | 7323802 7323803 | 5 10 |

PRODUKTOVERSIGT

| Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion® | | |
|--|---------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sachet S  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
| Cutimed® sorbion® sachet S 7.5 x 7.5 cm 3 x 3 inch | 7323200 | 10 |
| | 7323201 | 25 |
| | 7323202 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 12 x 5 cm | 7323203 | 10 |
| | 7323204 | 25 |
| | 7323205 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 10 x 10 cm | 7323206 | 10 |
| | 7323207 | 25 |
| | 7323208 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 20 x 10 cm | 7323209 | 10 |
| | 7323210 | 25 |
| | 7323211 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 15 x 15 cm | 7323212 | 10 |
| | 7323213 | 25 |
| | 7323214 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 20 x 20 cm | 7323215 | 10 |
| | 7323216 | 25 |
| | 7323217 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet S 30 x 20 cm | 7323218 | 10 |
| | 7323219 | 25 |
| | 7323220 | 50 |
| Cutimed® sorbion® sachet EXTRA  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
| Cutimed® sorbion® sachet EXTRA | 7323400 | 5 |
| | 7323401 | 5 |
| | 7323402 | 5 |
| | 7323403 | 5 |
| | 7323404 | 5 |
| | 7323405 | 5 |
| Cutimed® sorbion® sachet multi star  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
| Cutimed® sorbion® sachet multi star | 7323700 | 5 |
| | 7323701 | 10 |
| | 7323702 | 5 |
| | 7323403 | 10 |
| Cutimed® sorbion® sachet XL  | Varenr. | Stk. pr. enhed |
| Cutimed® sorbion® sachet XL 45 x 25 cm | 7324000 | 10 |





Sårdybde

-  Overfladisk
-  Dybt
-  Overfladisk + dybt





Sårfase

-  Nekrotisk
-  Inficeret
-  Fugtig nekrose
-  Granulation
-  Epitelisering

Eksudatniveau

-  Tørt til lavt
-  Lavt til medium
-  Medium til højt
-  Højt til meget højt

Bestillingsinformation – Cutimed® sorbion®

| Cutimed® sorbion® sachet border  | Wound Pad Size | Varenr. | Stk. pr. enhed |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Cutimed® sorbion® sachet border 10 x 10 cm | 7.5 x 7.5 cm | 7323600 | 10 |
| | 7.5 x 7.5 cm | 7323601 | 25 |
| Cutimed® sorbion® sachet border 15 x 15 cm | 10 x 10 cm | 7323602 | 10 |
| | 10 x 10 cm | 7323603 | 25 |
| Cutimed® sorbion® sachet border 25 x 15 cm | 20 x 10 cm | 7323604 | 10 |
| | 20 x 10 cm | 7323605 | 25 |
| Cutimed® sorbion® sachet S drainage  | Varenr. | Stk. pr. enhed | |
| Cutimed® sorbion® sachet S drainage | 7324100 | 10 | |
| | 7324101 | 25 | |
| | 7324102 | 50 | |
| Cutimed® sorbion® sana  | Varenr. | Stk. pr. enhed | |
| Cutimed® sorbion® sana 8.5 x 8.5 cm | 7323300 | 10 | |
| | 7323301 | 25 | |
| | 7323302 | 50 | |
| Cutimed® sorbion® sana 12 x 12 cm | 7323303 | 10 | |
| | 7323304 | 25 | |
| | 7323305 | 50 | |
| | 7323306 | 10 | |
| | 7323307 | 25 | |
| Cutimed® sorbion® sana 22 x 12 cm | 7323308 | 50 | |
| | 7323309 | 10 | |
| | 7323310 | 25 | |
| | 7323311 | 50 | |
| Cutimed® sorbion® sana multi star  | Varenr. | Stk. pr. enhed | |
| Cutimed® sorbion® sana multi star Ø 11 cm | 7323800 | 5 | |
| | 7323801 | 10 | |
| | 7323802 | 5 | |
| Cutimed® sorbion® sana multi star Ø 17 cm | 7323803 | 10 | |

Produktsortiment er forskelligt fra land til land.