


Atrauman® Ag

Salvekompres med sølv

Salvekompresets opgave er at forhindre fastvoksning af forbindingen i såret og derved gøre forbindingskiftet lettere for både patienter og personale. Atrauman Ag giver salvekompreset endnu en dimension. Ved at tilsætte sølv har salvekompreset også en antibakteriel funktion. Det virker forebyggende mod sårinfektioner og yder lokal støtte ved allerede fremkomne infektioner.

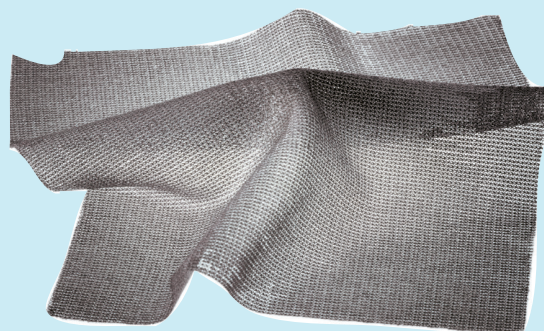

1 Ikke hæftende

2 Lavt sølvindhold

3 Let at kombinere

Fordele:

- Dræber skadelige bakterier
- Påvirker ikke raske celler
- Blød og komfortabel
- Økonomisk
- Beskytter såret
- Efterlader ingen mærker på huden



Egenskaber

Det tynde og bløde materiale er let at aplikere og giver en god kontakt med sårområdet. Salvemassen beskytter sårkanterne og holder dem bløde. Sølv i kompresset består af metallisk sølv, som ioniserer, når det kommer i kontakt med såreksudatet. Atrauman Ag er virksomt mod gramnegative såvel som grampositive bakterier inklusive MRSA-stammer. Atrauman Ag frigiver små mængder sølv over længere tid (7 dage), for ikke at risikere at dræbe eventuelt raske celler, som findes i sårområdet og derved forsinke helingsprocessen. Den mængde sølv, som frigives, dræber de skadelige bakterier, som findes i såret.

Materiale

Gitternet af polyamidfibre omgivet af elementært sølv og imprægneret med en salvemasse på triglyceridbasis. Salvemassen indeholder: Caprylic/Capric/Stearic Triglycerid, Bisdiglyceril-polyacyladipate-2 samt Macrogol 2000. (Analog INCI). Indholdet af sølv modsvarer 30-50 mg/100cm². Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation og tips

Som kompletterende foranstaltning i forbindelse med behandling af sår, som udviser høj bakteriebelastning eller til inficerede sår. Også som kompletterende infektionsprofylax i forbindelse med sårbehandling.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Eftersom Atrauman Ag ikke fæstner mod huden, så kan det være svært at fiksere kompresset eksempelvis på undersiden af benet. Det nemmeste er først at lægge salvekompreset på sekundærforbindingen og derefter aplikere begge på såret.

Hvis der ikke behøves nogen sekundærforbinding, kan salvekompreset evt. fikses med et gazebind.

Bestemte forsigtighedsforanstaltninger

Før hver behandling af stærkt bakteriebelastede eller inficerede sår er det nødvendigt med en lægelig vurdering. En sølvforbinding kan aldrig erstatte sårrensning. Såret skal renses, hvis såret indeholder nekroser, fibrin eller pusdannelser, ellers ødelægges disse forbindingens funktion. Behandling med sølvforbinding kan aldrig erstatte en behandling med antibiotika. Atrauman Ag bør ikke anvendes i kombination med paraffinholdige salver, eftersom de reducerer forbindingens virkning.

ONEMED

OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
8200 Aarhus N

Telefon 86 109 109
Fax 86 109 209
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk

Sortiment	Størrelse	Ref.nr.	Afp	Tfp
Atrauman® Ag	5 x 5 cm	499 571	10 stk	12 Afp
Steril, pakket enkeltvis	10 x 10 cm	499 573	10 stk	12 Afp
	10 x 20 cm	499 575	10 stk	6 Afp