

## **Brugsanvisning – Opsite Spray**

Vandfast flydende plaster

### **Beskrivelse**

OPSITE spray er let og behagelig at anvende og giver en gennemsigtig og hurtigtørrende film, som kan anvendes til mindre tørre sår og overfladiske sår. OPSITE Spray er let at fordele over vanskelige steder og beskytter huden med et tyndt filmlag - som et ekstra hudlag.

### **Indikationer**

OPSITE Spray kan anvendes til behandling af ikke-punkterede vabler, mindre brandsår og skoldninger, overfladiske tørre sår og suturerede (syede) sår.

### **Kontraindikationer**

Må ikke anvendes på børn under 18 måneder.

### **Brugervejledning**

1. Vask hænderne før og efter behandling af såret.
2. Rens og tør forsigtigt såret og den omkringliggende hud.
3. Ryst dåsen, hold spraydåsen omvendt og ca. 20 cm fra huden. Spray det pågældende område i et tyndt, ligeligt fordelt lag og lad det tørre. For at opnå de bedste resultater bør der sprayeres i flere tynde lag.

### **Forbindsskift**

OPSITE Spray kan sidde på såret i flere dage. Det tynde lag kan fjernes med vand og sæbe, ved at "pille" filmen af eller anvende REMOVE – serviet til fjernelse af klæbemiddel.

### **Forholdsregler**

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Kun til udvortes brug.
- Undgå inhalation. I tilfælde af indånding, søg frisk luft.
- Undgå kontakt med ØJNE. I tilfælde af kontakt med øjne, rens straks med vand og rådfør med en læge.
- Må ikke anvendes med jod præparater. Må ikke anvendes i forbindelse med medicinske præparater.
- Brandfarlig. Indholdet er under tryk og må ikke udsættes for åben ild eller stærk varme.
- Bør ikke anvendes tæt ved åben ild eller gnister.
- Undgå at spraye på tøj.

### **Indholdsstoffer**

Acryl-copolymer, Ethylacetat, acetone, isopropylalkohol, drivgasser (butane 40 og dimethyl ether),  
Indeholder **ikke** CFC-gasser.

### **Pakning**

OPSITE Spray findes i en størrelse: 100 ml. og 240 ml.

Opbevares ved stuetemperatur (<15-25°C)

### **Producent**

Fremstillet i England af Smith & Nephew Medical Ltd, Hull HU3 2BN

\*Varemærke tilhørende T.J. Smith & Nephew Ltd.

© Smith & Nephew 2012

CE 0086