

Hurtig og nænsom re-hydrering af  
nekrotisk væv



# INTRASITE<sup>®</sup> Gel hurtig og nænsom re-hydrering af nekrotisk væv

INTRASITE Gel fremmer hurtig og nænsom debridering af nekrotisk væv ved at absorbere svampet væv og overskydende eksudat. INTRASITE Gel anvendes også til at skabe de bedste betingelser for et fugtigt sårmiljø under granulations- og epitheliseringssfasen af sårhelingen. Dette gør INTRASITE Gel ideel til behandling af sår i alle stadier af sårhelingsprocessen. INTRASITE Gel er en klar amorf hydrogel, som indeholder CMC polymere, propylen-glycol og vand.

## Fordele

### Nænsom re-hydrering af nekrotisk væv

Alt dødt væv og cellerester i et sår skal fjernes før nyt væv kan dannes. INTRASITE Gel fremmer naturlig debridering gennem autolyse ved nænsom rehydrering af nekrotisk væv. I de fleste tilfælde foregår debrideringen hurtigt.

### Blid og effektiv oprensning

Nekroser og belægnings opstår ved akkumulation af døde celler i eksudatet. Ved at opsuge overskydende eksudat fra såroverfladen standser INTRASITE Gel ophobning af cellulær debris og forebygger på denne måde dannelse af nekroser. På steder, hvor belægnings og døde cellerester allerede er opstået, fjernes disse hurtigt og blidt gennem gelens re-hydrerende evne uden at ødelægge det raske væv og den omkringliggende hud.

### Fremmer fugtig sårheling

INTRASITE Gel øger fugtindholdet i sårets overflade og skaber et fugtigt sårmiljø, som derved forebygger dannelse af sårskorpe. Gelen fremmer hurtig og problemfri sårheling ved at bevare det skrøbelige granulationsvæv fugtigt og tillader derved vandrings af epithelceller fra kanterne til bunden af såret.

### Let at bruge


Den unikke Applipak dispenser gør det let at kontrollere applikationen i såret selv på vanskelige steder. INTRASITE Gel er ikke-klæbende og er derfor let at fjerne fra såret med vand eller saltvand uden at ødelægge skrøbeligt væv eller påføre patienten unødigt smerte.

## Indikation

INTRASITE Gel anvendes til behandling af overfladiske og dybe sår, f.eks liggesår, skinnebessår, operationssår, cancersår, forbrændinger, flænger m.m. Gelen kan også anvendes til behandling af granulerende kaviteter, hudafskrabninger og brandsår forårsaget af stråling. INTRASITE Gel kan anvendes på inficerede sår under professionelt tilsyn, følgende lokale forskrifter.

## Forholdsregler

Undgå brug ved kendt overfølsomhed overfor indholdsstoffer i gelen. INTRASITE Gel bør anvendes med omtanke i nærheden af øjne og dybe sår med snævre åbninger (f.eks fistler og kaviteter), hvor fjernelse af gelen er vanskelig. INTRASITE Gel er til udvortes brug.

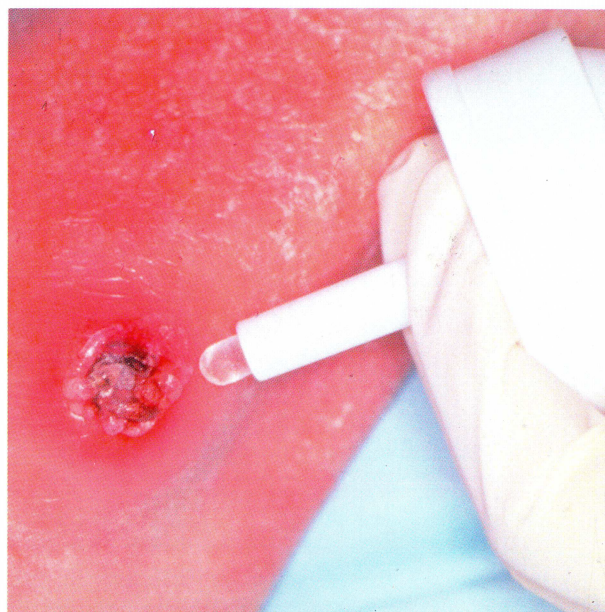

### Produktsortiment

Varenr.	Størrelse	Antal pr. æske
7308	8g	10
7311	15g	10
7313	25g	10

Wound Management [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)  
Smith & Nephew  
Nærum Hovedgade 2  
Postboks 30  
2850 Nærum

T 45 80 61 00  
F 45 80 61 51

\*Trademark of Smith & Nephew