

HARTMANN



LIGASANO®

Trykaflastning og aktivt oprensende forbinding



LIGASANO® - Trykaflastning

Tryksår opstår når hud eller væv udsættes for konstant tryk og utilstrækkelig eller manglende blodcirkulation i længere eller kortere tid. Stopper cirkulationen tilstrækkeligt længe, dør celler og blodgennemstrømningen får sværere ved at genetableres. Indenfor nogle dage falder de døde celler sammen og tryksåret er en realitet. Årsager til tryksår er tryk mod huden, friktion, fugtig eller tør og sprukken hud.

LIGASANO trykaflastning er fremstillet af opskummet polyuretan. LIGASANO trykaflastning (hvid) findes i forskellige størrelser. LIGASANO klimaplade må aldrig anbringes direkte mod huden. Den skal altid anvendes under den hvide.

Patientens vægt afgør hvor mange plader der skal bruges. Man kan tilpasse LIGASANO til aflastning af forskellige kroppsdele.

Egenskaber

- LIGASANO trykaflastning giver en jævn trykfordeling og er luftgennemtrængelig. Fugt og varme holdes ikke tilbage ved huden, hvilket hjælper med til at holde normal hudtemperatur.
- Overfladens struktur mindsker friktionseffekten i vævslaget og reducerer friktionen mod huden.
- Risikoen for iskæmi mindskes og dermed risikoen for tryksår.
- LIGASANO er let at forme og tilpasse til det område, man behandler. Trykaflastningen kan evt. kontrolleres ved at lægge hånden under den aflastede del af kroppen, mellem underlaget og LIGASANO.
- Det anbefales at de store belastningssteder, f.eks. os sacrum, skal aflastes med mere materiale end lettere steder som f.eks. hælene. LIGASANO klimaplade (grøn) er beregnet til brug som "opbygningsmateriale" (bundplade) under LIGASANO trykaflastning (hvid). **Klimapladen må aldrig lægges direkte mod hud eller væv.**

Anvendelse

Trykaflastning ved forebyggende behandling samt som behandling ved allerede opståede tryksår. Trykaflastning kan ske mellem tær og fingre, under brystet, i lysken, i hænder med kontrakturer mm.

Sammenfatning

- Sikrer lufttilførsel
- Absorberer sekret
- Forhindrer at hud ligger mod hud
- Mindsket friktion mod huden.

Vaskeanvisning

LIGASANO trykaflastning og klimaplade tåler op til 121°C. Ved gentagen vask nedbrydes materialet løbende, hvilket mindsker produktets effektivitet. OBS! LIGASANO kan misfarves ved lyspåvirkning.



LIGASANO – forebyggelse og behandling af tryksår.

Foto: LIGAMED medical Produkte GmbH

Anbefalet LIGASANO-tykkelse

Patientvægt	Tykkelse ved sacrum	Tykkelse ved hæl
Under 45 kg	2 cm	1 cm
Op til 75 kg	mindst 3 cm	2 cm
Over 75 kg	mindst 4 cm	3 cm

LIGASANO® - Sårheling

LIGASANO er en aktivt oprensende forbindelse af opskummet polyuretan med absorptionsceller i form af store porer. LIGASANO absorberer 15-20 gange sin egen vægt, hvilket giver en hurtig oprensning af såret. LIGASANO er helt luftgennemtrængelig, hvilket gør at fugt og varme ikke akkumuleres ind mod vævet.

Egenskaber

LIGASANO absorberer vertikalt, d.v.s. uden at sårvæsken spredes ud til siderne. Således beskyttes sårkanterne og risikoen for maceration mindskes.

Anvendelse

LIGASANO bruges først og fremmest til væskende og inficerede sår, f.eks. bensår, diabetessår, tryksår og brandsår. LIGASANO kan formes som fyld af sårhuller og fistler. Klip LIGASANO til efter sårets form. Placer LIGASANO med et let tryk i direkte kontakt med såret. LIGASANO har god effekt ved behandling og forebyggelse af svampeinfektioner. Skiftehyppigheden afhænger af sårets sekretion. Materialets overfladestruktur påvirker vævet, hvilket til at begynde med kan give en øget sekretion. Efterhånden som såret renses op, aftager sekretionen og LIGASANO skiftes med længere intervaller.

OBS! Hvis tamponadebind anvendes i fistler, skal det klippes over. Man skal kunne kontrollere at hele tamponaden kommer ud, når man skifter og der ikke bliver rester af tamponaden tilbage i fistelgangen.

Sammenfatning

- Effektiv oprensning
- Færre skift
- Absorberer sekret
- Enkel at bruge
- Økonomisk



Diabetessår som følge af uegnet og snæver sko.



Diabetessår med klinisk infektion, sepsis, blottet sene.



Sårhuller/fistler



Bensår – venøst/arterielt (blandingsår)

Fotos: Christina Lindholm, Akademiska Sjukhuset, Uppsala



PAUL HARTMANN A/S
DK-3400 Hillerød

Sortiment	Art. nr.	Størrelse	Antal pr. pk.	Antal pr. karton
<u>Ligasano</u>				
Trykafastning	8821452	49 x 59 x 2 cm	7	49
	8821454	49 x 59 x 1 cm	14	98
	8821458	100 x 200 x 2 cm	1	6
	8821460	100 x 200 x 1 cm	2	2
	8821461	50 x 200 x 2 cm	1	10
<u>Ligasano</u>				
Trykafastning, klimaplade	8821462	45 x 55 x 2 cm	25	50
	8821463	45 x 55 x 2 cm	7	7
<u>Ligasano</u>				
Kompresser	8821444	15 x 15 x 1 cm	10	110
	8821445	15 x 15 x 2 cm	5	55
	8821440	14 x 26 x 1 cm	10	60
<u>Ligasano</u>				
Tamponade	882449	5 x 300 x 0,3 cm	8	96