



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ Roll

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ Roll er en usteril transparent film på rulle. Den består af en tynd, transparent film som tillader maksimal fleksibilitet, da den nemt kan klippes til den rette størrelse.

Egenskaber:

- Fungerer som badeplaster
- Nem at applicere
- Siderne uden klæb gør det nemt at holde og applicere forbindingen, samtidig med at såret kan observeres optimalt
- Bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø
- Semipermeabel – tillader huden at ånde
- Elastisk
- Hindrer udefrakommende bakterier, væsker og virus* i at trænge ind
- Transparent. Inspektion af såret hindrer unødige skift af forbindingen, hvorved sårhelingen kan fortsætte uforstyrret
- Kan let klippes til den ønskede størrelse eller form. Hjørnerne kan formes og rundes hvis det ønskes.

*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV-1 and HBV while the dressings remain intact without leakage.

Fordele:

- Fremragende klæbeevne
- Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- Risiko for maceration nedsættes, da ilt trænger igennem forbindingen, samtidig med at fugten kan komme ud.
- Nem at fjerne

Indikationer:

- Beskyttelse af huden mod friktion og kropsvæsker
- Vandtæt fiksering af primære forbindinger, såsom absorberende forbindinger, alginater, skumforbindinger og hydrogeler
- Fiksering af medicinsk udstyr

OBS: Anvendelse af enhver forbindelse til sår bør indgå i en veldefineret protokol for sårbehandling til forebyggelse af infektion



Forsigtigt:

Dette er et **usterilt produkt**. Må ikke anvendes på ødelagt hud eller intravaskulære katetre.

Brugsvejledning:

- Klip den ønskede længde og fjern lineren (nummer 1)
- Hold forbindingen ved kanterne og applicer den.
- Fjern linerne på ydersiden (nummer 2)
- Glat forbindingen

Fjernelse:

Tag fat i en af kanterne med den ene hånd og træk forbindingen af parallelt med huden, samtidig med at huden støttes med den anden hånd. Forbindingen strækkes og afslappes for at løsne klæberen.

Deklaration:

- Film: Polyurethan
- Klæbestof: Akrylatklæber

Bestillingsinformation**3M™ Tegaderm™ Roll**

| Varenr.: | Størrelse i cm | Antal/æske | Æsker/karton |
|----------|----------------|------------|--------------|
| 16002 | 5 cm x 10 m | 1 | 4 |
| 16004 | 10 cm x 10 m | 1 | 4 |
| 16006 | 15 cm x 10 m | 1 | 4 |