

## Skånsom sårbehandling



DuoDERM® Mini bandage er en sårbandage, der anvendes til okklusiv, fugtbevarende og effektiv sårbehandling af mindre sår med let sekretion. I kontakt med sårveske dannes en gel, som opretholder et fugtigt sår miljø, hvilket fremmer den autolytiske debridering og sårheling. DuoDERM® Mini bandage består af en selvhæftende hydrokolloid masse, indeholdende gelatine, pektin og natriumcarboxymethylcellulose. Overfladen er belagt med en polyurethanfilm/-skum. DuoDERM® Mini bandage er forsejlet med ekstra hæftkant, hvilket sikrer en god vedhæftning. DuoDERM® Mini bandage er vandtæt, og kan anvendes ved både brusebad og badning. Skiftes efter behov, dog mindst en gang om ugen. Varm gerne pladen mellem hænderne og sørg for, at huden er tør inden applicering på såret for at sikre den bedste vedhæftning.

**DuoDERM® Mini bandage**

DuoDERM® Mini bandage er en steril, selvhæftende 2 lags bandage, indeholdende gelatine, pektin og natriumcarboxymethylcellulose (CMC). Overfladen er belagt med en polyurethanfilm/-skum. DuoDERM® Mini bandage er forseglet med ekstra hæfteskant, hvilket sikrer en god vedhæftning.

**INDIKATIONER**

Anvend DuoDERM® Mini bandage til mindre sår med let sekretion. Bandagen kan med fordel anvendes til skrabsår, gnavsår eller brandskader på svært bandagerbare områder, såsom hænder, fødder, ryg og hofter, samt ved små kirurgiske indgreb som laparoskopisk kirurgi eller biopsier.

**SKIFTEFREKVENNS**

Bandagen skiftes efter max. 7 dage, eller når den er mættet.

**OPBEVARING & HOLDBARHED**

Opbevares ved stuetemperatur. Holdbarheden er 5 år.

**STERILISERINGSMETODE**

Gammasteriliseret.

**KLASSIFICERING**

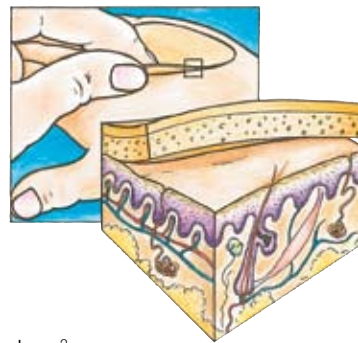
DuoDERM® Mini bandage er CE-mærket og opfylder alle relevante miljø- og sikkerhedskrav

Yderligere oplysninger kan ses i brugsanvisningen i æsken.


**DuoDERM® bandage er originalen blandt de hydrokolloide bandager.**

DuoDERM® Mini bandage giver en okklusiv, fugtbevarende og effektiv sårbehandling til mindre sår med let sekretion. En okklusiv fugtbevarende sårheling giver følgende dokumenterede fordele:

- fremmer sårheling<sup>1</sup>
- fremmer autolytisk debridering<sup>1</sup>
- understøtter granulation og celledeling<sup>1</sup>
- lavere infektionsrate sammenlignet med traditionel bandage<sup>2</sup>
- skader ikke og har ingen anden negativ indflydelse på nydannet væv<sup>3</sup>


**REFERENSER:**

1. Jones.VJ. The use of gauze: will it ever change? Int. Wounds J. 2006;3:79-86
2. Hutchinson JJ, McGuckin M. Occlusive dressings: A microbiological and clinical review. Am J Infect Control. 1990;18:257-268.
3. Friedman SJ, Su WPD. Management of leg ulcers with hydrocolloid occlusive dressing. Arch Dermatol. 1984;120:1329-1336.
4. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds. 1993;5:1-8.

**DuoDERM® Mini bandage**

Størrelse	Stk./ æske	Varenr.
5 x 5 cm	50 stk.	37300

