

Bandagen, som viser, hvornår den skal skiftes



DuoDERM[®] Signal[™] -bandage er en okklusiv, absorberende bandage, som kan anvendes til let til moderat væskende sår. Ved kontakt med sårveske dannes en fugtig gel, som oprettholder et fugtigt sårmiljø og fremmer sårhelingen. DuoDERM Signal -bandage har en visuel skifteindikator, der viser, hvornår bandagen skal skiftes. Resultatet er færre bandageskift og en omkostningseffektiv sårbehandling.

SKABER ET FUGTIGT SÅRHELINGSMILJØ

Ved kontakt med sårveske dannes en gel, der fremmer sårheling og autolytisk debridering af devitaliseret væv, f.eks. fibrin og nekroser.



GUNSTIGT

SÅRHELINGSMILJØ

Gel, der skaber et fugtigt sårhelingsmiljø. DuoDERM Signal opretholder et fugtigt sårmiljø og er nem at fjerne fra såret.



OVERFLADE MED LAV FRIKTION

Mindsker risikoen for, at bandagen krøller eller ruller sig sammen før tid.



VISUEL SKIFTEINDIKATOR

Viser hvornår bandagen skal skiftes, og reducerer risikoen for for tidlige bandageskift.


BEHAGELIG FOR PATIENTEN

DuoDERM® Signal™ -bandage danner en gel ved kontakt med sårveske og er derfor nem at fjerne uden ubehag for patienten.

NEM AT ANVENDE

DuoDERM® Signal™ -bandage appliceres med en margin på 3 cm ud over sårkanterne. Bandagen er gennemsigtig, hvilket medfører, at det er nemt at kontrollere såret.

Fås i flere forskellige størrelser, også til hæl og sacrum. Ved tørre sår kan DuoDERM® Hydrogel® anvendes i såret og DuoDERM® Signal™ -bandage som yderbandage. Ved dybere sår kan kaviteten fyldes med AQUACEL® Hydrofiber®-bandage.

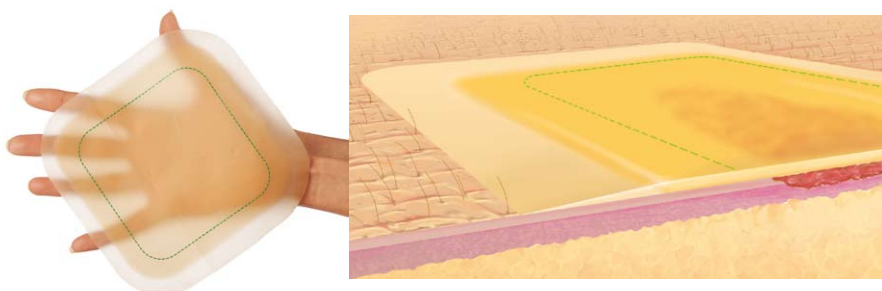

DuoDERM® Signal™

Størrelse	Stk./æske	Varenummer
10 x 10 cm	5	403326
14 x 14 cm	5	403327
20 x 20 cm	5	403328
18,5 x 19,5 cm (hæl)	5	410500
20 x 22,5 cm (sakral)	5	410501



FAKTA

DUODERM® SIGNAL™

-bandage er en tynd selvhæftende plade, der består af gelatine, pektin, natriumcarboxymethylcellulose (CMC) og syntetiske elastomerer.

INDIKATIONER

DuoDERM Signal -bandage anvendes til let til moderat væskende sår, f.eks. tryksår (stadie I-II), bensår, friktionssår, diabetessår, kirurgiske sår, delhudsforbrændinger, donorsteder og gnavsår.

SKIFTEINTERVAL

Bandagen skiftes efter max. syv dage, eller når den er mættet.

OPBEVARING

Opbevares tørt ved stuetemperatur.

STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

KLASSIFICERING

DuoDERM Signal -bandage er CE-mærket og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

HOLDBARHED

5 år.

Yderligere oplysninger kan ses i brugsanvisningen i pakken.



ConvaTec

Realize the possibilities™

ConvaTec Denmark Aps,
Birkørød Kongevej 2, 3460 Birkørød,
kundeservice: 45 87 60 11,
www.convatec.dk,
convatec.danmark@convatec.com