

Effektiv kombination af dynamisk sølv og
højabsorberende skum

 smith&nephew

ACTICOAT[®]
MOISTURE
CONTROL

Antimicrobial Barrier Dressing


with SILCRYST[®]
NANOCRYSTALS



ACTICOAT[◇] Moisture Control.

7 dages antimikrobiel aktivitet til væskende sår.

ACTICOAT Moisture Control kombinerer alle de antimikrobielle fordele ved ACTICOAT med en absorberende skumforbinding, der håndterer sårekssudat. Den antimikrobielle virkning af nanokrystalliseret sølv er tilstede både i forbindingen og direkte i sårbunden.

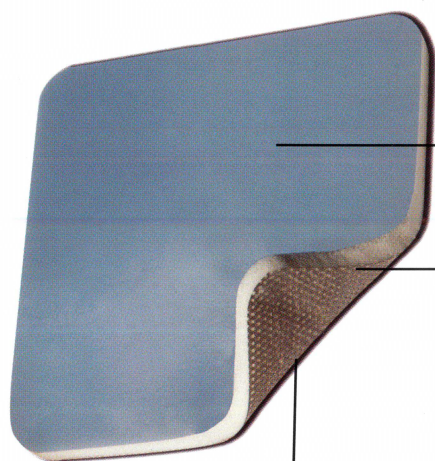

Den blå overfilm giver en effektiv barrierefunktion og sørger for fordampning af overskydende fugt.

Høj-absorberende skumlag, som er 3 x mere absorberende end Hydrofiber^{TM1}

Antimikrobielt sårkontaktlag sørger for en hurtig og vedvarende bakterieredrende effekt i op til 7 dage

Indikationer

Anvendes som en anti-mikrobiel, absorberende barriereforbinding med del- eller fuldhudstab, såsom tryksår, venøse bensår, diabetiske sår, brandsår, donor- og transplantatsteder.

Kontraindikationer


- Må ikke bruges til patienter med kendt overfølsomhed overfor sølv
- Må ikke bruges samtidigt med MRI skanning

Applikation

1. ACTICOAT Moisture Control skal ikke fugtes før brug
2. Klip evt. ACTICOAT Moisture Control i passende størrelse og form
3. Appliker sølv siden (den mørke side) i nær kontakt med sårbunden med den blå side opad. Sørg for at hele såroverfladen er dækket .
4. Fikseres med en passende sekundær forbinding eller fikseringsbind, f.eks OPSITE[°] FLEXIFIX[°]
5. ACTICOAT Moisture Control kan bruges under kompressionsbandage

Forbindingsskift

1. Forbindingen kan sidde i op til 7 dage, men kan kræve et tidligere skift hvis eksudatet er synligt 1,5 cm fra kanten af forbindingen
2. Hvis forbindingen ikke kan fjernes nemt, kan den fugtes eller gennemvædes for at afhjælpe fjernelse og for at undgå beskadigelse af såret.

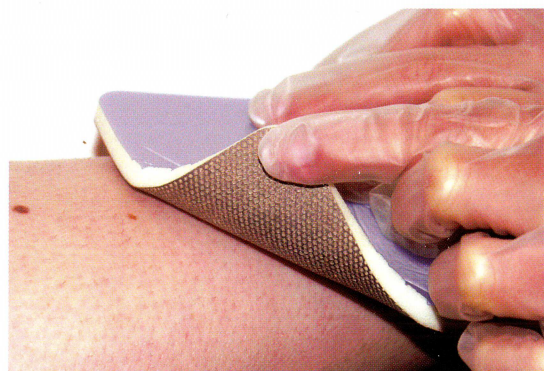

[†]Nanocrystalline Silver is a patented technology of NUCRYST Pharmaceuticals Corp.
SILCRYST is a Trademark of NUCRYST Pharmaceuticals Corp., used under licence.
[°] Trademark of Smith & Nephew. TM: All other trademarks acknowledged ©Smith & Nephew June 2006. 5196

Reference:

1. Smith & Nephew Data On File Ref. 0509003.

Bestilling af ACTICOAT Moisture Control

Varenr.	Størrelse	Karton
66001790	5cm x 5cm	10
66001791	10cm x 10cm	10
66001792	10cm x 20cm	10

Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm

T +45 4580 6100
F +45 4580 6151
www.smith-nephew.com