


# Biatain<sup>®</sup> Ag

- optimal absorption til inficerede sår



Biatain Ag er en blød og formbar polyurethan skumbandage med et patenteret sølvkompleks og fås både i en klæbende og ikke klæbende version.

- Unik 3D skumstruktur for optimal absorption<sup>5</sup>
- Designet til forebyggelse af infektion
- Patenteret sølvkompleks med en bred antibakteriel profil<sup>3,4</sup>
- Vedvarende antibakteriel effekt gennem hele bandagens bæretid<sup>6</sup>

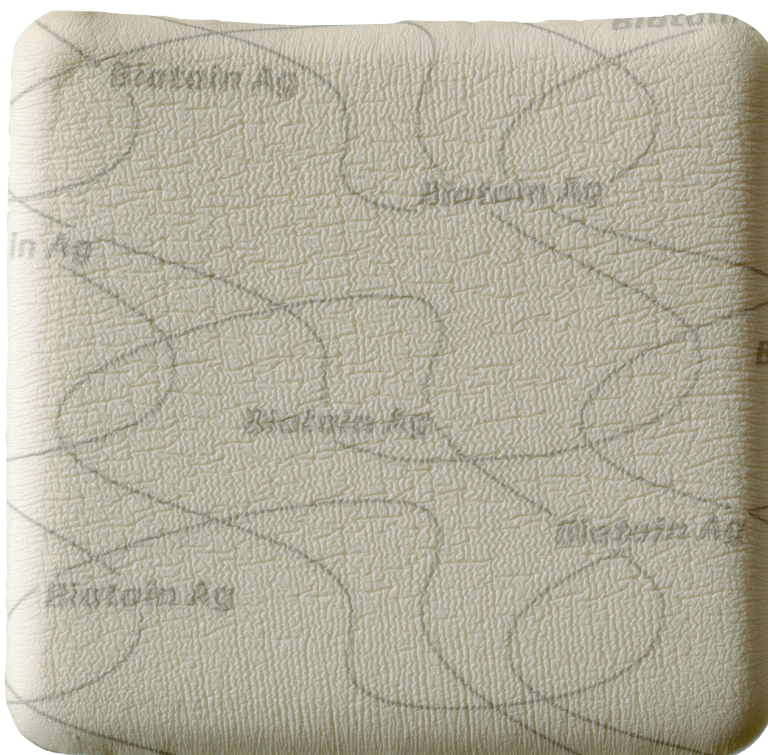

## Anvendelse

Biatain Ag kan anvendes til en lang række væskende sår med forsinket heling på grund af bakterier eller hvor der er risiko for infektion. F.eks. bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2. grads forbrændinger, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger. Biatain Ag kan også anvendes under kompression.



Biatain Ag er en blød og formbar skumbandage med sølv med en dokumenteret hurtig heling af inficerede sår.<sup>1,2</sup>



### Unik 3D skumstruktur med optimal absorption

Ved kontakt med sårveske former den unikke 3D skumstruktur i Biatain sig tæt efter sårbunden og opnår en optimal absorption - selv under kompression.

### Designet til at forbygge infektion

Det patenterede sølvkompleks og den kontrollerede sølvfrigivelse sikrer en homogen spredning af sølvioner til sårbunden og opnår en vedvarende antibakteriel effekt.<sup>6</sup>

### Patenteret sølvkompleks med en bred antibakteriel profil

Uafhængige studier viser, at Biatain Ag er den eneste sårbandage som er effektiv mod alle almindeligt forekommende bakterier i inficerede ikke-helende sår.<sup>3,4</sup> Kliniske studier har påvist, at inficerede sår heler hurtigere med Biatain Ag end andre sårbandager, herunder andre antibakterielle bandager.<sup>1,2,7</sup>

### Vedvarende antibakteriel effekt<sup>6</sup>

Grundet den unikke sølvfrigivelse er der en vedvarende antibakteriel effekt gennem hele bandagens bæretid (op til 7 dage).<sup>6</sup>

### Virkning


Ved kontakt med sårveske frigives sølvioner vedvarende til sårbunden i op til 7 dage.<sup>6</sup>

### Opbygning

Biatain Ag består af en blød og formbar polyurethan skumbandage, som indeholder et patenteret sølvkompleks.

Biatain Ag klæbende er desuden omgivet af en hydrokolloidklæbekant.

### Unik 3D skumstruktur

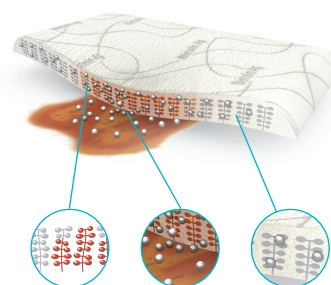

### Biatain Ag ikke klæbende

Vare nr.	Størrelse i cm	Antal æske
5105	5x7	5
9622	10x10	5
9623	10x20	5
9625	15x15	5
9626	20x20	5
9628	5x8	filler 5

### Biatain Ag klæbende

Vare nr.	Størrelse i cm	Pude str.	Antal æske
9631	7,5x7,5	Ø4	5
9632	12,5x12,5	8x8	5
9635	18x18	13x13	5
9641	23x23	Sakral	5
9643	19x20	Hæl	5

1. Jørgensen et al. International Wound Journal 2005;2(1):64-73

2. Münter et al. Journal of Wound Care. 2006;15(5):199-206

3. Ip et al. Journal of Medical Microbiology 2006;55:59-63

4. Basterzi et al. Wounds July 2010

5. Reitzel & Marburger. EWMA 2009

6. Buchholz. Wounds UK 2009 7. Scanlon et al. International Wound Journal 2005;2(2):150-60.

7. Scanlon et al. International Wound Journal 2005;2(2):150-60.