



SÅRKONTAKTLAG MED SILIKONE

PRODUKTBESKRIVELSE

Et sårkontaktlag til mange forskellige typer sår. Sårkontaktlaget er fremstillet af polyester og imprægneret med Silfix® blød silikone. Silflex klæber forsigtigt på huden omkring såret – og ikke i selve såret. Silikone hæfter kun på tørre steder. Silflex er en atraumatisk bandage, udviklet for at reducere smerter og traumer i forbindelse med bandageskift. Giver god passage for eksudat. Latexfri.

BRUGSANVISNING:

Fjern det gennemsigtige beskyttelseslag på begge sider af sårkontaktlaget. Hvis det skal klippes til, bør dette gøres inden dette aftages. Placer det derefter direkte over såret. Silflex kan overlappe sårkanterne. Tildæk med en sekundær sårbandage – absorberende eller bandage med film/klæber. Destrueres som klinisk affald.

Silflex

FORSIGTIGHED: Ved anvendelse over flere dage, bør sårkontaktlaget flyttes i såret, grundet risiko for epitelisering op gennem sårkontaktlaget. Ligeledes ved brug i ansigtet, bør der foretages klinisk observation oftere.

EGENSKABER:

- ✓ Atraumatisk blød silikone sårkontaktlag
- ✓ Reducerer smerter ved bandage skift
- ✓ Blød og behagelig
- ✓ Tørre ikke ud i såret
- ✓ Latex fri

INDIKATIONER:

- ✓ Smertefulde sår og 2. grads brandsår
- ✓ Kirurgiske sår, post operativt
- ✓ Granulerende samt epiteliiserende sår
- ✓ Revner i huden samt hudafskrabninger
- ✓ Ben- og tryksår
- ✓ Alle typer sår, hvor risiko for at bandagen kan hænge i
- ✓ Plastik kirurgiske sår
- ✓ Cikatricer / beskyttelse

KONTRAINDIKATIONER:

Må ikke anvendes til brugere, der er allergiske mod silikone

Produktkode	Størrelse	Pakkeindhold	Æsker/karton
CR 3922	5 cm x 7 cm	10 stk.	30
CR 3923	8 cm x 10 cm	10 stk.	30
CR 3924	12 cm x 15 cm	10 stk.	30
CR 3925	20 cm x 30 cm	10 stk.	15
CR 4006	35 cm x 60 cm	5 stk.	6

Athene Healthcare A/S

Hejreskovvej 22 B / DK - 3490 Kvistgård / Tel. +45 4916 8480 / Fax +45 4916 8481

www.athenehealthcare.dk