

Activon Tube®

Tube med 100% Manuka honning

Produktbeskrivelse

- Activon Tube indeholder 100% Manuka honning, er helt uden tilsætninger og kommer fra New Zealand.
- Manuka honningen er rensset og steriliseret, hvilket gør den meget velegnet til anvendelse i sår.
- Manuka honningen debriderer og oprensner urene sår, mindsker lugtgener samt skaber et fugtigt sårhelingsmiljø.



Indikation

- Tryksår
- Bensår
- Diabetessår
- Kirurgiske sår
- Brandskader
- Kraftigt inficerede sår
- Dybe sår, fistelgange

Kontraindikation

- Overfølsomhed over for bistik

Brugsanvisning

Skrul låget af og påfør rigeligt Manuka honning direkte i såret. Anvend velegnet sekundærbandage afhængig af mængden af sårekssudat.

Kan bruges i op til 90 dage efter anbrud. Opbevares ved stuetemperatur.

Produkt	CE-klassifikation	Varenr.	Indhold	Antal pr. æske / karton
Activon Tube®	IIB	CR3830	25 g	12 / 240

