

## Revamil® Hydrofil sårgel/gel

100 % ren medicinsk honning med et højt enzymindhold



### Produktet:

Revamil hydrofil sårgel giver en effektiv og langvarig antibakteriel virkning.

En langsom frigivelse af små mængder hydrogenperoxid gør Revamil hydrofil sårgel særlig egnet til inficerede sår.

En tube Revamil sårgel inderholder 18 g strålesteriliseret honning. Holdbarhed efter åbning 3 måneder.

### Anvendelse:

Revamil kan anvendes til inficerede sår, dybe sår, kroniske sår og akutte sår.

- Rens såret på vanlig vis.
- Tørre sår fugtes evt. let med rent vand før applikering af Revamil.
- Påfør et tyndt lag sårgel, og forbind såret på vanlig vis.
- Vælg sekundær forbindelse efter sårets beskaffenhed.
- Gentag behandlingen dagligt i den første uge – derefter efter behov.

### Sortiment:

Steril, pakket enkeltvis

Størrelse	Antal	REF
18 g	1	10 100