

## Revamil® Wound Dressing

100 % ren medicinsk honning med et højt enzymindhold



### Produktet:

Revamil Wound Dressing indeholder 100% ren medicinsk honning, der giver en effektiv og langvarig antibakteriel virkning.

Den fleksible polyacetat net forbindelse klæber ikke til såret og garanterer en langsom afgivelse af honning i sårområdet.

En net forbindelse er til engangsbrug og rækker til én behandling.

### Anvendelse:

Revamil kan anvendes til inficerede sår, dybe sår, kroniske sår og akutte sår.

- Rens såret efter behov
- Påfør Revamil net forbindelse.
- Net forbindingen dækkes med en sekundær bandage efter sårets behov
- Fjern net forbindingen og gentag behandlingen efter behov med maks. 3 dages interval

### Sortiment:

Steril, pakket enkeltvis

Størrelse	Antal	REF
5 x 5 cm	10 stk/æsk	10 307
8 x 8 cm	7 stk/æsk	10 300
10 x10 cm	10 stk/æsk	10 302
10 x 20 cm	5 stk/æsk	10 305